

Información de producto

MD 555 cleaner limpiador especial de sistemas de aspiración



MD 555 cleaner - breve descripción

- Detergente especial sin espuma para instalaciones de aspiración dentales, incluso para sus conducciones de desagüe en casos de agua corriente problemática (por ejemplo, aguas muy duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente.
- Está además especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental especiales, como p. ej. equipos de chorro de polvo, y sus polvos de profilaxis o productos en perlas.
- Extraordinario e intenso poder limpiador. Elimina y evita eficazmente los depósitos por composición desfavorable del agua en instalaciones de aspiración y en superficies resistentes a los ácidos.
- Extraordinaria compatibilidad con los materiales – adecuado para todos los sistemas con separador de amalgama.
- Complemento ideal para Orotol® plus u Orotol® ultra y MD 550 para la desinfección completa y profunda, limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.

Propiedades

MD 555 cleaner del sistema Dürr Higiene es un limpiador ácido especial y sin espuma para instalaciones de aspiración dentales, incluidas sus conducciones de desagüe. Se recomienda el uso de MD 555 cleaner en caso de agua corriente problemática (por ejemplo, aguas duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente. MD 555 cleaner está además especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental específicos, como p. ej. equipos de chorro de polvo. La aplicación periódica de MD 555 cleaner previene la formación de incrustaciones en el equipo de aspiración. Se evitan las obstrucciones del equipo de aspiración causadas por el uso de productos profilácticos difícilmente solubles, como polvos de profilaxis o productos en forma de perlas, sobre todo basados en carbonato cálcico, y se disuelven las incrustaciones existentes. Gracias a sus principios activos y adyuvantes especiales, MD 555 cleaner es especialmente adecuado para las instalaciones con separadores de amalgama. Además, MD 555 cleaner puede utilizarse universalmente en cualquier lugar donde deban eliminarse depósitos de aguas duras en superficies (como, por ejemplo, azulejos o escupideras).

Composición del producto

MD 555 cleaner se basa en una combinación de ácidos orgánicos (15 - 30 %), ácido fosfórico (15 - 30 %), tensioactivos sin espuma (< 5 %) y adyuvantes en solución acuosa.

Aplicación

En caso de agua dura o presencia de restos de polvos profilácticos, aplicar MD 555 cleaner periódicamente como solución al 5 % una o dos veces por semana, p. ej. durante la pausa del almuerzo. En casos de mucho uso, usar también a diario. El tiempo mínimo de actuación es de 30 minutos y se puede prolongar en caso necesario. A 50 ml de MD 555 cleaner se añade agua hasta 1 litro y se aspira, p. ej. utilizando OroCup. Verter también en la escupidera 250 ml de solución. Transcurrido el tiempo de actuación, aclarar la instalación limpia con al menos 1 l de agua. Aplicar MD 555 cleaner en casos problemáticos, p. ej. para el saneamiento de sistemas de aspiración intensamente con-

Información de producto

MD 555 cleaner limpiador especial de sistemas de aspiración

taminados con biofilms, alternándolo en este caso con desinfectantes eficaces como Orotol® plus u Orotol® ultra, de una a cinco veces por semana con una concentración del 10 % (a 100 ml de MD 555 cleaner añadir agua hasta obtener 1 l de solución). El efecto óptimo se alcanza respectivamente con un tiempo de actuación de entre 1 y 2 horas. Verter también en la escupidera 250 ml de solución.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Datos físicos

Concentrado:

Aspecto: líquido rojizo y transparente

Densidad: $D = 1,22 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: aproximadamente 1

Solución de trabajo (5 %):

Aspecto: solución transparente, prácticamente incolora

pH: $2,0 \pm 0,5$

Vida útil

Concentrado: 4 años

Tamaño del envase

Botella de 2,5 l

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Accesorios

OroCup

Advertencias generales

Después y entre las diferentes aplicaciones de MD 555 cleaner, Orotol® plus u Orotol® ultra, el sistema de aspiración se debe aclarar a fondo con agua abundante. Se debe prestar atención a no realizar los ciclos de limpieza y desinfección inmediatamente uno tras otro. MD 555 no es adecuado para el uso en superficies sensibles a los ácidos como el aluminio y otras superficies sensibles a los ácidos. No deje actuar la solución MD 555 cleaner durante toda la noche. MD 555 cleaner ha sido probado en cuanto a compatibilidad con los materiales de las instalaciones de aspiración habituales del mercado con unos resultados excelentes. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad limpieza del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro

Advertencias de seguridad

MD 555 cleaner está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.



Distribuido por

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de