



# Router<sup>®</sup> X3000

## Preguntas frecuentes



# Router® X3000 – Preguntas frecuentes

Configuración de las funciones – Parte 1

## ¿Cuántas memorias libres puedo configurar en mi Router® X3000?

- ▶ *El aparato contiene 10 memorias libres programables (M0-M9); se puede seleccionar cualquier modo de funcionamiento (CW, CCW, REC, ATR, EAL).*

## ¿Puedo conectar un localizador de ápices externo a mi Router® X3000?

- ▶ *El Router® X3000 ya lleva incorporado un localizador de ápices.*

## ¿Puedo ajustar el volumen de la señal acústica?

- ▶ *The device sound volume can be adjusted to 4 different sound levels (Vol. 1 to Vol. 4), and the sound volume can also be muted (Vol. 0).*

### ¿Se puede usar el Router® X3000 con sistemas de limas recíprocos diferentes del R-Motion?

- ▶ *El aparato contiene 10 memorias libres programables, y cada una de ellas se puede programar para el modo de funcionamiento recíproco y ajustar para diferentes ángulos recíprocos y velocidades con el objetivo de satisfacer todos los requisitos actuales del movimiento recíproco.*
  - *En el modo REC, la velocidad de trabajo se puede ajustar entre 100 rpm y 500 rpm (incrementos de 50 rpm).*
  - *En el modo REC, el ángulo de avance se puede ajustar entre 20° y 400° (en incrementos de 10°), y el ángulo de retroceso, entre 20° y 400° (en incrementos de 10°).*

# Router® X3000 – Preguntas frecuentes

Características del motor – Parte 1

## ¿Cuánto pesa la pieza de mano con contra-ángulo?

- ▶ *El peso de la pieza de mano y el contra-ángulo es de 157 gramos.*

## ¿Cuál es la tecnología del minimotor integrado en el Router® X3000?

- ▶ *Es un motor sin escobillas.*

## ¿Tiene el Router® X3000 una función de “apagado automático”?

- ▶ *En el estado de espera, el aparato se APAGA automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido. El temporizador se puede ajustar entre 3 y 30 minutos (en incrementos de 1 minuto).*

# Router® X3000 – Preguntas frecuentes

## Características del motor – Parte 2

**Cuando está totalmente cargado, ¿durante cuánto tiempo puedo utilizar el dispositivo?**

- ▶ *El tiempo puede variar dependiendo del uso. La capacidad de la batería es de 2000 mAh.*

**¿Cuánto tarda en cargarse completamente mi Router® X3000?**

- ▶ *El tiempo necesario para cargar completamente el Router® X3000 es de aproximadamente 285 minutos.*

**¿Con qué frecuencia debo calibrar el aparato?**

- ▶ *El motor se debe calibrar antes del primer uso y después de sustituir o lubricar el contraángulo.*

## Router® X3000 – Preguntas frecuentes

Características del contra-ángulo y localizador de ápices

### ¿Tiene el Router® X3000 una función de “inversión automática apical”?

- ▶ *Sí, el motor invierte automáticamente el sentido de giro cuando la lima alcanza el punto de referencia ajustado por el usuario. El motor vuelve automáticamente al sentido de giro inicial cuando la lima se aleja del punto de referencia.*

### ¿Cuáles son las características del contra-ángulo original?

- ▶ *Es un contra-ángulo 4,7:1 que permite una rotación de 360°.*

### ¿Puedo utilizar otro contra-ángulo en lugar del original?

- ▶ *FKG Dentaire SA no recomienda el uso de otro contra-ángulo distinto del original que acompaña al motor de endodoncia Router® X3000.*

# Router® X3000 – Preguntas frecuentes

Limpieza, desinfección y esterilización

## ¿Cómo puedo limpiar, desinfectar y esterilizar los componentes del Router® X3000?

- ▶ Consulte el manual de instrucciones para cualquier pregunta relativa a la limpieza, desinfección y esterilización de los componentes del Router® X3000.