

mélange à la cartouche en alignant les encoches. Pousser ensuite la cartouche et faire tourner la canule de mélange de 90 degrés en sens horaire.

6) Appliquer la pâte SOFRELINER TOUGH de façon régulière sur l'intrados de la prothèse. Avec une spatule, répartir la pâte uniformément sur toutes les surfaces où le primaire a été appliquée.

Remarque : si une partie de la surface recouverte de primaire n'est pas enduite de pâte à cette étape, une contamination par la salive lors de l'insertion en bouche, peut se produire, entraînant une altération de l'adhésion.

7) Aspirer l'excès de salive de la bouche du patient 1 à 1 minute et demie après avoir appliqué SOFRELINER TOUGH sur la prothèse. Placer la prothèse dans la bouche du patient et faire mettre le patient en occlusion centrée, à la dimension verticale voulue. Contrôler l'absence d'excès de SOFRELINER TOUGH et en bouche ; le cas échéant, l'éliminer immédiatement. NE PAS laisser du matériau excédentaire s'écouler dans la trachée ou l'oesophage du patient. La pâte SOFRELINER TOUGH aspirée ou avalée peut entraîner une asphyxie ou d'autres troubles, en dépit de l'absence de toxicité de SOFRELINER TOUGH. En cas d'écoulement vers la trachée du patient, retirer immédiatement le matériau en l'essuyant avec une boule de coton ou de la gaze. Le patient doit être prévenu que s'il sent le SOFRELINER TOUGH ou une autre substance sur le point de passer dans sa gorge, il doit en avertir immédiatement le dentiste.

Remarque : pour rebaser les prothèses maxillaires avec SOFRELINER TOUGH, commencer par la région palatine postérieure afin d'éviter un écoulement du SOFRELINER TOUGH dans la gorge du patient.

En cas de rebasage de la région palatine, veiller à ne pas mettre trop de pâte SOFRELINER TOUGH sur la prothèse, ni trop tôt, car la pâte durcie tend à s'épaissir.

8) Tirer légèrement les joues du patient pour mouler les bords de la zone vestibulaire (le patient devant légèrement fermer la bouche).


9) Laisser la prothèse durcir complètement en bouche tout en contrôlant l'absence de SOFRELINER TOUGH excédentaire. Si le patient salive, aspirer la salive et dire au patient de refermer délicatement la bouche.

10) SOFRELINER TOUGH doit durcir en bouche pendant au moins 5 minutes.

Remarque : l'ébarbage doit être fait après le durcissement. Si l'ébarbage précédait le durcissement, cela pourrait entraîner une déformation.

11) Retirer la prothèse de la bouche du patient et ébarber soigneusement tout excédent de SOFRELINER TOUGH sur les bords avec un scalpel tranchant (Voir la figure 3).

Remarque : NE PAS ébarber au-dessus du biseau de la prothèse. NE PAS laisser un résidu de SOFRELINER TOUGH qui n'adhérait pas à la prothèse.

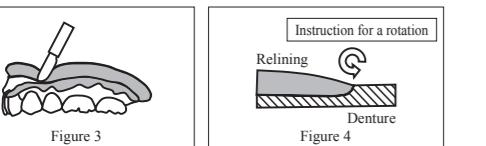

3. **FINITION**
Ébarber le plus possible l'excédent avec un scalpel tranchant et utiliser la POINTE DE MODELAGE (blanc) pour lisser la surface ou ajuster la forme.

Si nécessaire, utiliser la POINTE DE FINITION (marron) pour la finition (Voir la fig. 4).

Remarque : tourner la POINTE DE FINITION (marron) de la zone de rebasage à la zone de la prothèse afin de ne pas casser le bord (Voir la fig. 4).

Utiliser la FRAISE RONDE EN DIAMANT ou un matériau de polissage adéquat pour traiter le relief. Effectuer la ligne de démarcation rouge avec la POINTE DE FINITION (marron) ou un autre outil.

4. **AUTRES REMARQUES IMPORTANTES POUR UN REBASAGE RÉUSSI**

Afin d'améliorer l'adhérence aux prothèses anciennes ou usées, appliquer d'abord le TOKUYAMA REBASE II sur la prothèse. Le laisser durcir complètement avant d'appliquer SOFRELINER TOUGH. Veiller à ce que l'intrados de la prothèse soit meulé suffisamment afin que l'application de SOFRELINER TOUGH ne crée pas de suroclusion, suite au rebasage avec TOKUYAMA REBASE II.

■ APPLICATION CLINIQUE DE SOFRELINER – PROCÉDÉ DE REBASAGE EN LABORATOIRE

1. **EXAMEN DE LA BOUCHE**

Vérifier l'intérieur de la bouche du patient par inspection et palpation. Examiner la zone qui a besoin d'être traitée.

2. **EXAMEN DE LA PROTHÈSE**

Si la prothèse est usée ou ancienne, rebaser d'abord la prothèse avec TOKUYAMA REBASE II, matériau à consistance dure pour le rebasage des prothèses dentaires au fauteuil. Le matériau de rebasage à consistance dure doit être appliquée selon l'épaisseur appropriée afin que lors du meulage du nouveau matériau, il en reste une couche suffisante à la base de la prothèse pour permettre l'adhérence de SOFRELINER TOUGH. Veiller à ce que l'intrados de la prothèse soit meulé suffisamment afin que l'application de SOFRELINER TOUGH ne crée pas de suroclusion, suite au rebasage avec TOKUYAMA REBASE II.

3. **FABRICATION D'UN MODÈLE EN PLÂTRE**

Prendre une empreinte d'occlusion puis couler l'empreinte en plâtre.

1) Réaliser un calibre en plâtre et monter la prothèse sur ce calibre.

2) Mettre de la cire dans l'empreinte en plâtre aux endroits qui pourraient gêner le patient et lui donner des sensations douloureuses.

3) Avec le stylo de marquage, tracer une ligne rouge sur la prothèse pour délimiter la zone à rebaser (Voir la figure 1).

4) Pour garantir que le matériau de rebasage aura l'épaisseur voulue, meuler la zone à rebaser avec une fraise acrylique (Voir la figure 2).

Remarque : la fraise ronde permet de meuler en prenant le diamètre de la fraise pour guide de la profondeur du meulage.

5) Remplacer la prothèse sur le calibre.

- 6) Appliquer un isolant sur la zone des crêtes du modèle en plâtre afin que le matériau de rebasage n'y adhère pas.
- 7) Appliquer le primaire sur toute la zone de la prothèse à rebaser.
- 8) Placer la cartouche de pâte SOFRELINER TOUGH dans le distributeur ; avec la canule de mélange, appliquer la pâte sur la surface où le primaire a été appliquée. Placer la pâte sur le côté de la prothèse et du modèle en plâtre qui fait face à la muqueuse buccale.
- 9) Mettre la prothèse sur le modèle en plâtre puis comprimer avec le calibre de rebasage.
- 10) Laisser la prothèse reposer sur le calibre de rebasage pendant au moins 20 minutes à température ambiante (23 °C/73,4 °F).

Remarque : immerger la prothèse et le calibre de rebasage pendant 5 minutes dans de l'eau dont la température est comprise entre 40 et 50 °C (104 et 122 °F), afin d'accélérer le durcissement.

11) Après durcissement du SOFRELINER TOUGH, enlever la prothèse du modèle en plâtre et ébarber soigneusement le SOFRELINER TOUGH en excès sur les bords au moyen d'un scalpel tranchant (Voir la figure 3). NE PAS ébarber au-dessus du biseau de la prothèse. NE PAS laisser le SOFRELINER TOUGH qui n'adhérait pas à la prothèse.

4. DEFINITION
Ébarber le plus possible l'excédent avec un scalpel tranchant et utiliser la POINTE DE MODELAGE (blanc) pour lisser la surface ou ajuster la forme (Voir la Figure 4).

Si nécessaire, utiliser la POINTE DE FINITION (marron) pour la finition (Voir la figure 4).

■ MESURES DE PRÉCAUTION À L'ATTENTION DES PATIENTS

SOFRELINER TOUGH est contreindiqué en patients allergiques o hipersensibles a los compuestos de silicona o platino, y NO debe utilizarse en estos pacientes.

■ PRÉCAUCIONES

1. SOFRELINER TOUGH está previsto para su venta y utilización exclusiva por profesionales titulados de la salud dental. No es apto para la venta y el uso por no profesionales de la salud dental.

2. SOFRELINER TOUGH sólo debe utilizarse según lo indicado en las presentes instrucciones. NO emplee SOFRELINER TOUGH para ninguna aplicación que no figure en estas instrucciones.

3. NO utilice SOFRELINER TOUGH si el precinto de seguridad está roto o si existen señales de que el contenido haya sido manipulado o adulterado.

4. El activador (primer) contiene etilacetato, un disolvente muy inflamable y volátil. No exponga el activador a llamas abiertas. Utilícelo en lugares ventilados y ciérre herméticamente el tapón después de su uso.

5. Si el paciente experimenta una reacción alérgica o de hipersensibilidad a SOFRELINER TOUGH, por ejemplo dermatitis, retire la prótesis y suspenda su uso inmediatamente.

6. Utilice guantes de exploración sin látex en todo momento durante el uso de SOFRELINER TOUGH para evitar la posibilidad de reacciones alérgicas. Además, los guantes de látex pueden inhibir la polymerización de SOFRELINER TOUGH. Si el activador SOFRELINER TOUGH entra en contacto con los guantes de exploración, deséchelos inmediatamente y lávese las manos con abundante agua.

7. L'immersion de la prothèse dans des solutions de nettoyage fortement chlorées peut modifier la teinte de SOFRELINER TOUGH, mais elle est sans effet sur les performances.

8. La prothèse doit être immergée dans de l'eau lorsqu'elle n'est pas portée.

9. La prothèse rebasée doit être contrôlée et nettoyée aux ultrasons par un dentiste tous les trois mois ou chaque fois qu'un dépôt de plaque dentaire est visible.

10. SOFRELINER TOUGH doit être contrôlé fréquemment pour détecter une quelconque déterioration. Lorsque la couche de rebasage est irrégulière, cassée, fissurée, décollée ou endommagée, le patient doit en informer immédiatement son dentiste. Il ne doit pas porter une prothèse dont le rebasage est défectueux. L'utilisation d'une prothèse endommagée ou cassée peut entraîner une suffocation, une aspiration, une asphyxie ou d'autres troubles.

11. En présence d'un signe d'intolérance clinique à la silicone, le patient doit immédiatement ôter la prothèse et contacter son dentiste.

■ STOCKAGE

1. Stocker SOFRELINER TOUGH à une température comprise entre 0 et 25 °C (32 et 77 °F).

2. Eviter d'exposer directement SOFRELINER TOUGH à la chaleur, à une flamme nue, à l'humidité ou aux rayons du soleil.

3. Ne pas utiliser SOFRELINER TOUGH après la date de péremption indiquée.

4. NE PAS laisser SOFRELINER TOUGH à portée des patients, en particulier des enfants, pour éviter qu'ils ne l'avalent par erreur.

■ ÉLIMINATION

1) Pour éliminer la pâte, faire sortir de la cartouche la pâte inutilisée et la faire durcir avant de la jeter.

2) Absorber le primaire résiduel (liquide) avec un matériau absorbant et inertel tel que de la gaze ou du coton et jeter conformément aux réglementations locales en vigueur.

*Le fabricant n'est nullement responsable d'un dommage ou d'une blessure résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Avant d'utiliser le produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient pour l'application envisagée.

Les spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.

■ ESPAÑOL

Lea cuidadosamente estas instrucciones en su totalidad antes de utilizar SOFRELINER TOUGH.

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL

SOFRELINER TOUGH es un material de silicona para rebases blandos polimerizado por adición, de aplicación directa en la clínica dental. SOFRELINER TOUGH es inodoro e insípido. Se presenta en un sistema de cartucho de automezcla, junto con un activador (primer) adhesivo y otros accesorios. El material polimeriza en 5 minutos intraoralmente o en 20 minutos a temperatura ambiente (23°C).

■ CONTENIDO:

Kit: PASTA / Base (27g) y catalizador (27g) × 1
Activador (10ml) × 1
Tapón de goteo para activador × 1
Punta de mezcla TD (XS) × 10

3. Aplicar un isolant sur la zone des crêtes du modèle en plâtre afin que le matériau de rebasage n'y adhère pas.
4. Placer la cartouche de pâte SOFRELINER TOUGH dans le distributeur ; avec la canule de mélange, appliquer la pâte sur la surface où le primaire a été appliquée. Placer la pâte sur le côté de la prothèse y sobre la boca del paciente.
5. Nota: Utilice un dispensador apropiado para el cartucho de SOFRELINER TOUGH.
6. Reposiciones: Pasta / Base (27g) y catalizador (27g)
Activador (10ml)
7. Puntas de mezcla TD II XS
8. Puntas de mezcla TD II S
9. PUNTA PARA AJUSTE DE LA FORMA (blanca) × 1
10. PUNTA DE ACABADO (marrón) × 1
11. FRESA REDONDA DE DIAMANTE (para aliviar la prótesis) × 1

* Nota: Utilice un dispensador apropiado para el cartucho de SOFRELINER TOUGH.

Reposiciones: Pasta / Base (27g) y catalizador (27g)
Activador (10ml)

Punta de mezcla TD II XS

Punta de mezcla TD II S

PUNTA PARA AJUSTE DE LA FORMA (blanca) × 1

PUNTA DE ACABADO (marrón) × 1

FRESA REDONDA DE DIAMANTE

* Consulte con su distribuidor local en relación con las reposiciones

■ APPLICACIONES CLÍNICAS DE SOFRELINER TOUGH

1. Dolor provocado por rebordes afilados del hueso alveolar y atrofia de la mucosa.
2. Retención deficiente por atrofia extrema de la cresta alveolar.
3. Defectos de gran tamaño o torus palatino / mandibular.
4. Retención de sobredentaduras anteriores de colocar la fijación final

■ CONTRAINDICACIONES

SOFRELINER TOUGH está contraindicado en pacientes alérgicos o hipersensibles a los compuestos de silicona o platino, y NO debe utilizarse en estos pacientes.

■ PRECAUCIONES

1. SOFRELINER TOUGH está previsto para su venta y utilización exclusiva por profesionales titulados de la salud dental. No es apto para la venta y el uso por no profesionales de la salud dental.
2. SOFRELINER TOUGH sólo debe utilizarse según lo indicado en las presentes instrucciones. NO emplee SOFRELINER TOUGH para ninguna aplicación que no figure en estas instrucciones.
3. NO utilice SOFRELINER TOUGH si el precinto de seguridad está roto o si existen señales de que el contenido haya sido manipulado o adulterado.
4. El activador (primer) contiene etilacetato, un disolvente muy inflamable y volátil. No exponga el activador a llamas abiertas. Utilícelo en lugares ventilados y ciérre herméticamente el tapón después de su uso.

5. Si el paciente experimenta una reacción alérgica o de hipersensibilidad a SOFRELINER TOUGH, por ejemplo dermatitis, retire la prótesis y suspenda su uso inmediatamente.

6. Utilice guantes de exploración sin látex en todo momento durante el uso de SOFRELINER TOUGH para evitar la posibilidad de reacciones alérgicas. Además, los guantes de látex pueden inhibir la polymerización de SOFRELINER TOUGH. Si el activador SOFRELINER TOUGH entra en contacto con los guantes de exploración, deséchelos inmediatamente y lávese las manos con abundante agua.

7. L'immersion de la prothèse dans des solutions de nettoyage fortement chlorées peut modifier la teinte de SOFRELINER TOUGH, mais elle est sans effet sur les performances.

8. La prótesis debe ser removida de la boca del paciente y recortada cuidadosamente para la existencia de posibles excesos de SOFRELINER TOUGH.

9. Deje que la prótesis permanezca en la boca del paciente y recorte cuidadosamente cualquier exceso de material SOFRELINER TOUGH de las zonas marginales utilizando un bisturí afilado (Véase Figura 3).

10. Deje que la prótesis permanezca en la boca del paciente y recorte cuidadosamente cualquier exceso de material SOFRELINER TOUGH de las zonas marginales utilizando un bisturí afilado (Véase Figura 4).

11. Despues del fraguado de SOFRELINER TOUGH, quite la prótesis de la boca del paciente y recorte cuidadosamente cualquier exceso de material SOFRELINER TOUGH sobre las zonas marginales utilizando un bisturí afilado (Véase Figura 3).

12. Despues del fraguado de SOFRELINER TOUGH, quite la prótesis de la boca del paciente y recorte cuidadosamente cualquier exceso de material SOFRELINER TOUGH de las zonas marginales utilizando un bisturí afilado (Véase Figura 4).

13. Recorte lo más posible el exceso de material con un bisturí afilado y utilice la PUNTA PARA AJUSTE DE FORMA (blanca) para alisar la superficie o ajustar la forma.

14. Recorte lo más posible el exceso de material de rebase de la zona palatina para evitar que ese material sea la garganta del paciente. SOFRELINER TOUGH aspirada o ingerida puede provocar asfixia u otras lesiones. Elimine inmediatamente cualquier exceso de material de rebase de la zona palatina para que el grosor de SOFRELINER TOUGH no afecte a su polymerización.