

# VDW.GOLD® RECIPROC® – Recomendaciones para una medición exitosa de longitud

## ① Activar el localizador apical




Ponga en contacto el clip labial con el micro-motor. La pantalla pondrá: APEX LOCATOR ON

## Recomendaciones generales para su éxito


- Utilice siempre guantes; se recomienda el uso de un dique de goma
- Ponga siempre la funda protectora al contra-ángulo para una medición de longitud simultánea
- Coloque siempre el clip labial en la boca en el lado opuesto del diente a tratar
- Seque siempre la cavidad de acceso con aire de presión o un algodón
- Medición de longitud por separado: seleccione el instrumento manual adecuado (de acuerdo con el diámetro del conducto radicular)
- Primero determine la longitud de trabajo usando un instrumento manual, entonces controle la longitud de manera simultánea con el contra-ángulo durante la preparación



## ② Medición de longitud por separado

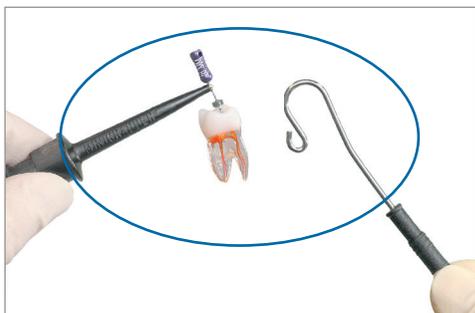


Coloque el instrumento manual en el clip de limas y cuelgue el clip labial en la boca del paciente

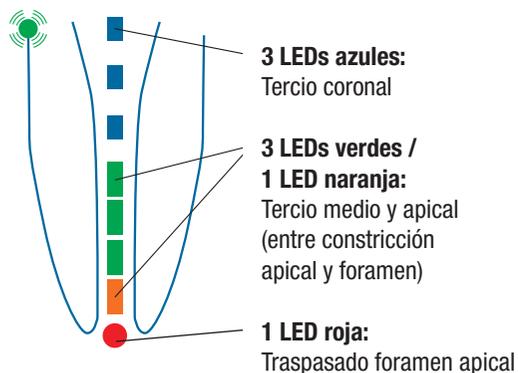

Se fija la longitud de trabajo en el tercer LED verde

## ③ Control de longitud simultáneo

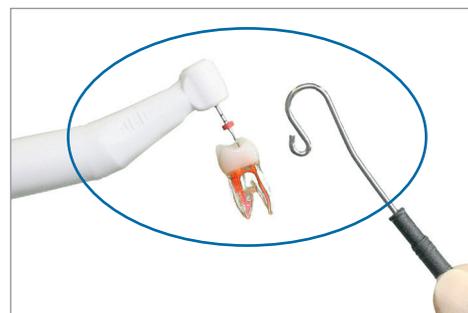

Introduzca una lima rotatoria o recíproca en el contra-ángulo y cuelgue el clip labial en la boca del paciente

## ④ Opción: Parada apical automática se activa vía el menú

MENU  
APEX STOP >ON



# VDW.GOLD® RECIPROC® – Recomendaciones adicionales para...

### 1. Lubricar el contra-ángulo 6:1 (con la ayuda de aire comprimido)

①

②

③

④

⑤

⑥

ACEITE 1 seg. [Calendar icons]

AIRE 5 seg. [Calendar icons]

### 2. Desinfección de superficie

①

②

**¡NO UTILICE** aerosol de manera directa sobre la pantalla!

### 3. Cargar la batería

Símbolo rojo intermitente: carga

Tiempo de carga aprox. 3 h  
Tome en cuenta los siguientes puntos antes de cargar:

- El símbolo de batería cambia de rojo a verde después de **aprox. 30 min.**
- En este momento la batería ya tiene una capacidad de sólo 20%.
- No pare el proceso de carga: cargue la batería durante 3 h enteras.

Una vez finalizado el proceso de carga, el tiempo de funcionamiento es de 2 horas.

Símbolo verde intermitente: **NO** cargue la batería



<http://www.vdw-dental.com>