

m[®]
two

El eficiente sistema NiTi



Power in Control



Inteligente por su diseño – fuerte por su eficacia de corte y flexibilidad

Para un trabajo efectivo en el conducto radicular

El diseño específico de cada instrumento permite una preparación segura y rápida.



- **Fiable permeabilidad rotatoria para la preparación inicial con 10/.04 y 15/.05**

El amplio y constante ángulo helicoidal y, por lo tanto, el mayor número de espiras, aumentan la estabilidad de los instrumentos.

- **Remoción eficiente de la dentina y moldeo selectivo con 20/.06 y 25/.06**

Las hojas de corte activas y la distancia progresiva de corte permiten una remoción eficiente de la dentina y una elevada capacidad lateral de corte.

- **Tratamiento conservador con 30/.05, 35/.04, 40/.04**

Los instrumentos con conicidad reducida solo amplían en el tercio apical y evitan una remoción innecesaria de la dentina. Las limas no están sometidas a un gran esfuerzo, por lo que se alcanza una gran seguridad en la aplicación.


- **Tratamiento sin problemas de anatomías de mayores conductos, por ej. con 50/.04 o 40/.06**

Gracias a una sección más reducida en instrumentos con tamaños ISO y conicidades mayores, se obtienen instrumentos más flexibles y una conformación segura.




Sección en forma de S con dos hojas de corte activas


- Diámetro fino del instrumento, para una mayor flexibilidad

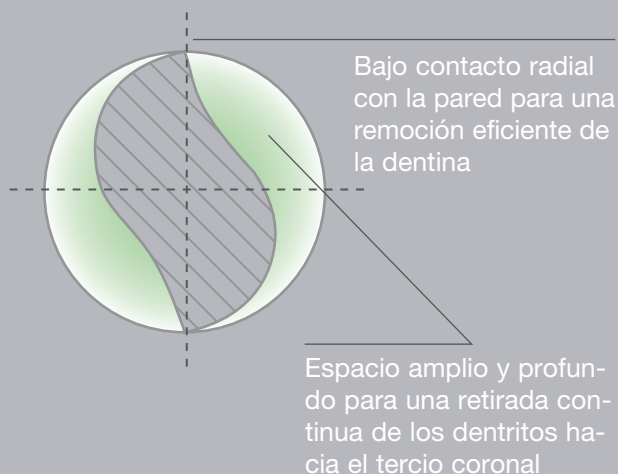

- Sección reducida en instrumentos Mtwo® con tamaños ISO y conicidades mayores, como por ej. Mtwo® 40/.06

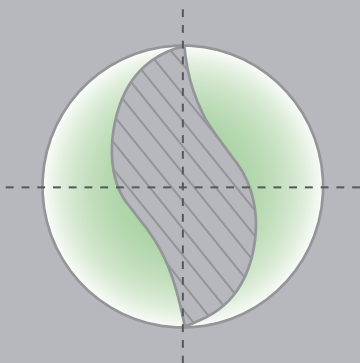

Punta no cortante

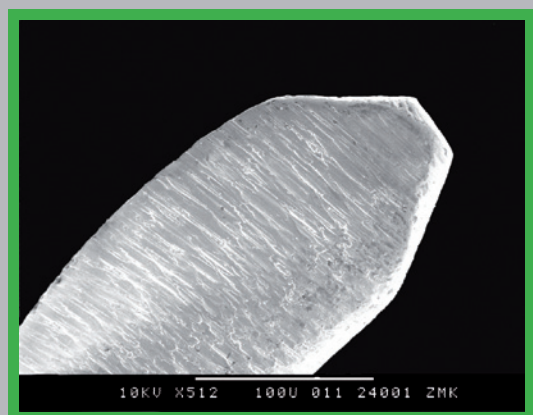

10/.04

25/.06

Reducida distancia de corte, más hojas de corte

Distancia progresiva entre las hojas de corte

Una distancia de corte reducida consigue más hojas de corte, lo que, a su vez, aumenta la estabilidad de los instrumentos.

Con una distancia progresiva entre filos cortantes se consigue una elevada capacidad de corte lateral y, con ello, una remoción eficiente de la dentina, a la vez que impide que el instrumento se enrosque en el conducto.

Con un sistema sencillo y seguro desde la preparación hasta la obturación


01. Preparación del conducto radicular

Es fácil cambiar de una preparación manual del canal radicular a una mecánica


- Simplicidad: Una secuencia de preparación para todos los tipos de conducto radicular.
- Longitud única: Todos los instrumentos alcanzan la longitud de trabajo completa.
- Simultaneous Shaping: Mtwo® corta durante el avance automáticamente con la lima, también lateralmente, realizando un movimiento de cepillado.
- En coordinación: Cada instrumento conforma la vía de acceso para el siguiente.
- Conserva la sustancia: Mtwo® retira solo la sustancia necesaria.

Sus ventajas: Vía de permeabilidad fiable practicada de forma rotatoria, remoción de la dentina y moldeo eficientes, tratamiento seguro de todas las anatomías de conducto.


Secuencia básica

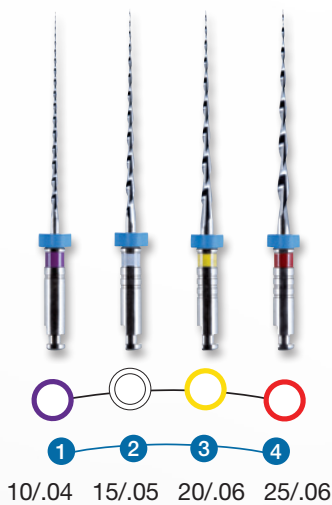


Conformación de anatomías de conductos mayores

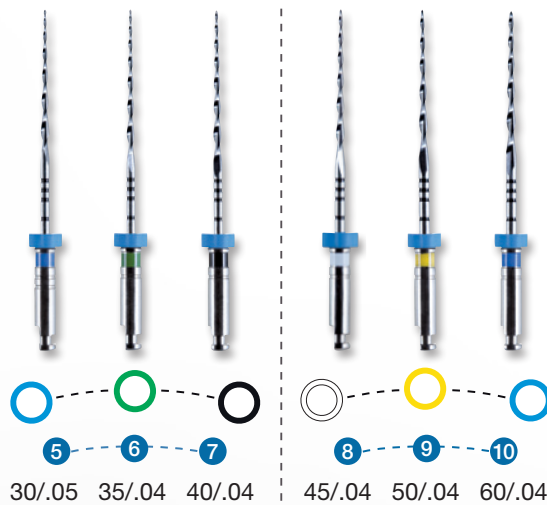

Conformación para técnicas de obturación en caliente

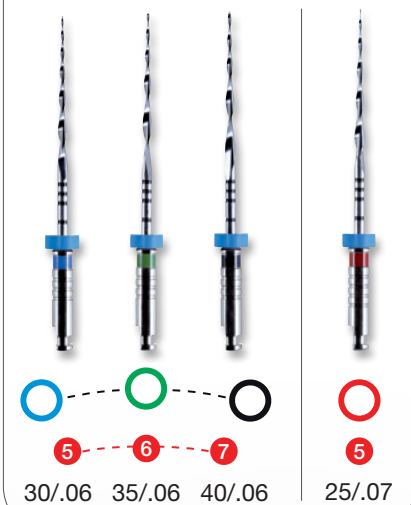

Único en su género
La secuencia básica está disponible con una parte activa de 16 y de 21 mm (longitud de trabajo 25 mm)

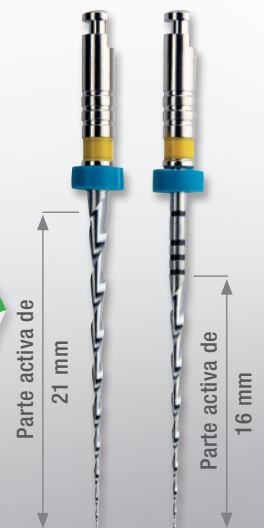

02. Obturación

Mtwo® permite conformar el conducto radicular para todas las técnicas de obturación.



Puntas de papel Mtwo® estériles
Puntas de papel cónicas, adecuadas para el sistema Mtwo® NiTi para un secado eficiente del conducto radicular.



m_{two}® Guttapercha

α-Guttapercha adaptada con precisión al Sistema Mtwo®



GUTTA MASTER®

Técnica de vástago para Mtwo® para una obturación tridimensional en caliente simple y rápida.



BeeFill 2in1

Condensación vertical en caliente con Mtwo® Guttapercha y posterior backfill, para una obturación tridimensional, hermética y duradera.



03. Retratamiento

Instrumentos de retratamiento Mtwo® para retirar con eficacia del conducto los materiales de relleno



Instrumento de retratamiento con punta cortante

R 25/.05 para conductos radiculares grandes y medianos




R 25/.05

R 15/.05 para conductos radiculares estrechos




R 15/.05

Productos Mtwo®

Secuencia básica

Blister de 6 instrumentos


STERILE



Parte activa Mtwo® de 16 mm

Parte activa Mtwo® de 21 mm

Tamaño/Conicidad	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04	0234 021 010	0234 025 010	1234 025 010	1234 031 010
15/.05	0235 021 015	0235 025 015	1235 025 015	1235 031 015
20/.06	0236 021 020	0236 025 020	1236 025 020	1236 031 020
25/.06	0236 021 025	0236 025 025	1236 025 025	1236 031 025

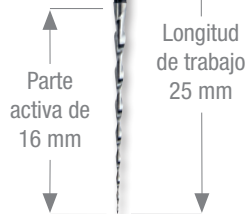

Conformación de anatomías de conductos mayores

Blister de 6 instrumentos


STERILE



Parte activa Mtwo® de 16 mm

Parte activa Mtwo® de 21 mm

Tamaño/Conicidad	21 mm	25 mm	31 mm
30/.05	0235 021 030	0235 025 030	1235 031 030
35/.04	0234 021 035	0234 025 035	1234 031 035
40/.04	0234 021 040	0234 025 040	1234 031 040
45/.04	0234 021 045	0234 025 045	1234 031 045
50/.04	0234 021 050	0234 025 050	1234 031 050
60/.04	0234 021 060	0234 025 060	1234 031 060

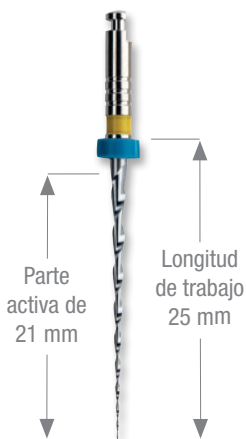

Conformación para técnicas de obturación en caliente

Blister de 6 instrumentos

STERILE



Parte activa Mtwo® de 16 mm

Parte activa Mtwo® de 21 mm

Tamaño/Conicidad	21 mm	25 mm	31 mm
25/.07	0237 021 025	0237 025 025	1237 031 025
30/.06	0236 021 030	0236 025 030	1236 031 030
35/.06	0236 021 035	0236 025 035	1236 031 035
40/.06	0236 021 040	0236 025 040	1236 031 040


Surtidos

STERILE

Parte activa Mtwo® de 16 mm

Parte activa Mtwo® de 21 mm

Blister de 4 instrumentos	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06	0007 021 701	0007 025 711	0007 025 701	0007 031 701
30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	0007 021 702	0007 025 702	-	0007 031 702
Blister de 6 instrumentos	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
2 cada uno x 10/.04, 15/.05, 20/.06	0230 021 456	0230 025 456	-	-
2 x 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	0230 021 457	0230 025 457	-	-
2 cada uno x 10/.04, 15/.05, 20/.06	-	-	1230 025 456	-
2 x 25/.06, LT 21 mm, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07, LT 16 mm	-	-	1230 025 457	-
2 cada uno x 30/.06, 35/.06, 40/.06	0236 021 203	0236 025 203	-	1236 031 203
2 cada uno x 45/.04, 50/.04, 60/.04	0234 021 246	0234 025 246	-	1234 031 246

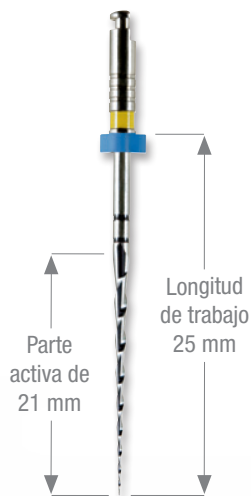

Instrumentos de retratamiento

Blister de 6 instrumentos



STERILE

Tamaño/Conicidad	21 mm
R 15/.05	0232 021 015
R 25/.05	0232 021 025
3 cada uno x R 15/.05, R 25/.05	0232 021 202
Juego con 6 cada uno x 15/.05, 25/.05 con instrucciones	0011 021 500

Etiquetas adhesivas de control Mtwo®

16 adhesivos de control para la secuencia básica, 12 adhesivos de control para tamaños adicionales, autoadherentes, esterilizables en autoclave

REF
0491

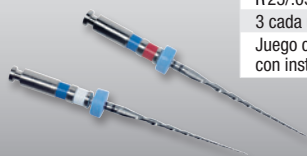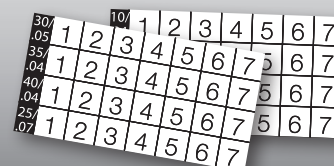

Mtwo® Gutapercha

Caja de 60 unidades

Tamaño/Conicidad		28 mm
25/.06	●	0220 628 025
30/.05	●	0220 528 030
35/.04	●	0220 428 035
40/.04	●	0220 428 040
45/.04	○	0220 428 045
50/.04	●	0220 428 050
60/.04	●	0220 428 060
25/.07	●	0220 728 025
30/.06	●	0220 628 030
35/.06	●	0220 628 035
40/.06	●	0220 628 040
2 cada uno x 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07		0220 028 457



Puntas de papel Mtwo®



Caja de 144 unidades

Tamaño/Conicidad		29 mm
25/.06	●	0225 629 025
30/.05	●	0225 529 030
35/.04	●	0225 429 035
40/.04	●	0225 429 040
45/.04	○	0225 428 045
50/.04	●	0225 429 050
60/.04	●	0225 429 060
25/.07	●	0225 729 025
30/.06	●	0225 629 030
35/.06	●	0225 629 035
40/.06	●	0225 629 040
48 x 25/.06, 24 cada uno x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07		0225 029 457




GuttaMaster® Obturadores endodónticos para Mtwo®

Caja de 6 unidades

Caja de 20 unidades

Tamaño		25 mm	25 mm
020	●	0505 025 020	0506 025 020
025	●	0505 025 025	0506 025 025
030	●	0505 025 030	0506 025 030
035	●	0505 025 035	0506 025 035
040	●	0505 025 040	0506 025 040
045	○	0505 025 045	0506 025 045
050	●	0505 025 050	-
055	●	0505 025 055	-
060	●	0505 025 060	-
020-045		0505 025 236	0506 025 520

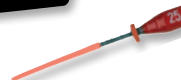

Kit básico Mtwo®

Kit de instrumentos de 25 mm de longitud de trabajo con:
 1 blíster con 2 Mtwo® x 10-20 surtido, parte activa de 21 mm
 1 blíster con 2 Mtwo® x 25/.06, 1 x 30-40 surt.,
 1 x 25/.07, parte activa 21 + 16 mm
 3 bloques de plástico para entrenamiento
 CD-ROM con instrucciones
 Tarjeta Mtwo® para el usuario

REF
0238 025 000



Caja de sistema Mtwo®

Con un módulo para organizar y guardar los instrumentos Mtwo®, sin instrumentos, esterilizable en autoclave

REF
0239



Más seguridad, para usted y para sus pacientes

- Todos los instrumentos Mtwo® vienen envasados estériles en blísteres.
- No hace falta esterilizarlos antes de la primera aplicación.
- Instrumentos listos para usarlos y extraíbles individualmente.
- Gestión de calidad verificada por el organismo TÜV.




¡Afinamos al máximo en cuestión de higiene!

Productos estériles para endodoncia desde hace más de 30 años.

Puede solicitar más información sobre el sistema de preparación Mtwo®:

- Tarjeta Mtwo® para el usuario
- Folleto Mtwo® para el usuario
- Sinopsis de estudios Mtwo®
- Tarjeta de torque Mtwo®
- Información de instrumentos de retratamiento Mtwo®

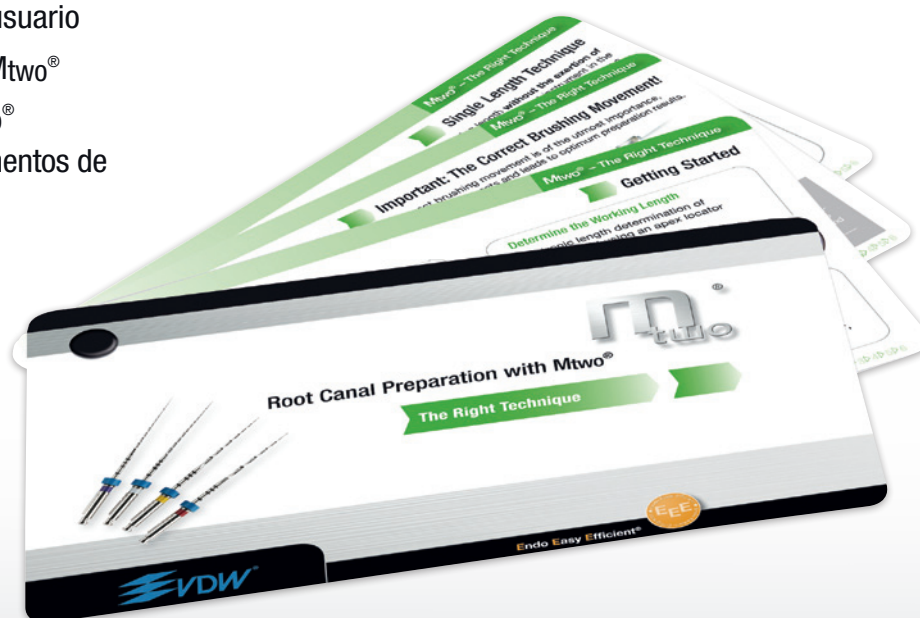

VDW GmbH

P.O. Box 830954 • 81709 Munich • Germany
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com