





Racegel

Pleno poder para el tratamiento gingival



RACEGEL. EL ÚNICO GEL TERMOGELIFICABLE QUE GENERA UN ENTORNO LIMPIO Y SECO PARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN EL QUE ES NECESARIO EL TRATAMIENTO DEL TEJIDO GINGIVAL

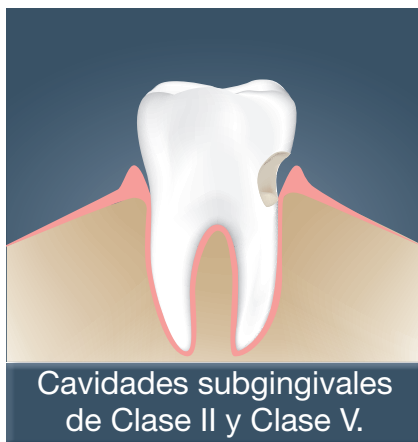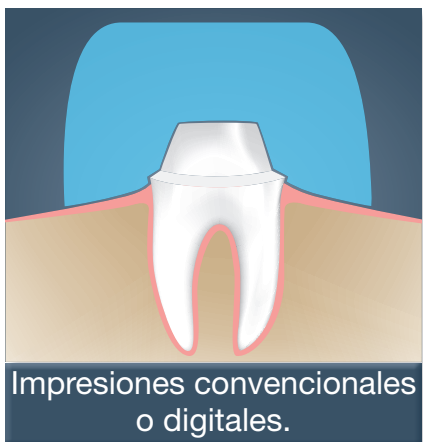

Efecto astringente integrado

- **Contracción de tejidos blandos** gracias al 25% de cloruro de aluminio.
- **Control óptimo** del sangrado sin manchar la encía.
- **Acceso sencillo** a todos los márgenes subgingivales.
- **No es necesario** aplicar soluciones hemostáticas específicas.
- Creación de un entorno **limpio y seco**.



Antes de la aplicación de Racegel.




Después de la aplicación de Racegel: encía limpia y seca.

Preparación gingival atraumática

- **De líquido a gel:** Viscosidad termogelificable única:
 - A temperatura ambiente (20 °C), Racegel es líquido en el interior de la jeringa.
 - La viscosidad de Racegel aumenta con la temperatura.
 - En contacto con los tejidos orales (35 °C), la viscosidad de Racegel aumenta y se convierte inmediatamente en un gel.

Evolución de la viscosidad de Racegel con la temperatura

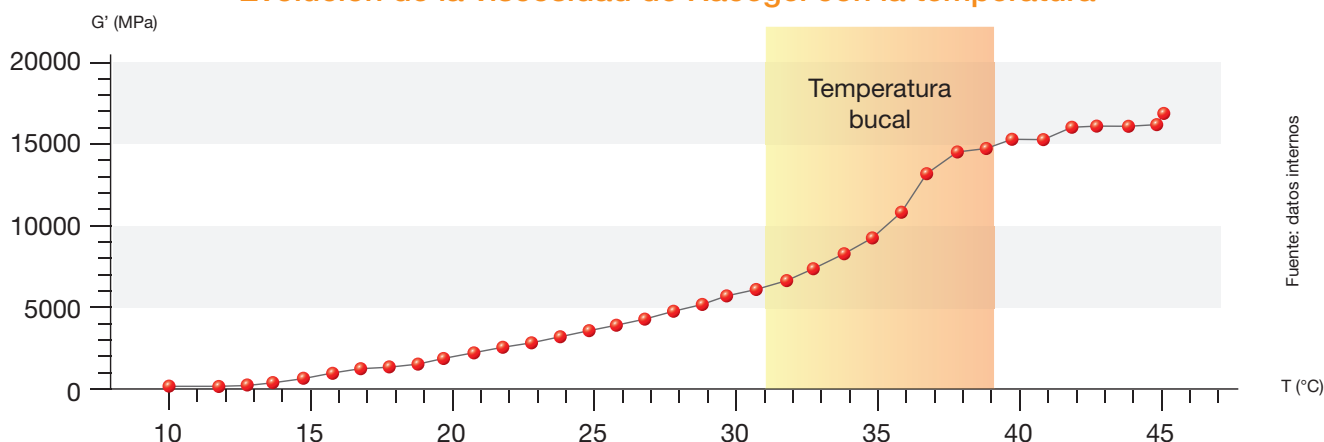

Aplicación sencilla, rápida y precisa


- Jeringa lista para su uso con puntas de las agujas precurvadas.
- Fácil inserción del gel en el surco.
- El gel no se esparce ni gotea durante la aplicación.
- Visualización sencilla del gel gracias al color naranja.



Uso opcional con cordones de retracción en caso de preparación subgingival profunda.

Enjuagado rápido y seguro

- Viscosidad termogelificable **reversible**:
 - La viscosidad de Racegel se reduce cuando se enjuaga con agua fría.
 - Ausencia de sangrado cuando se enjuaga Racegel.

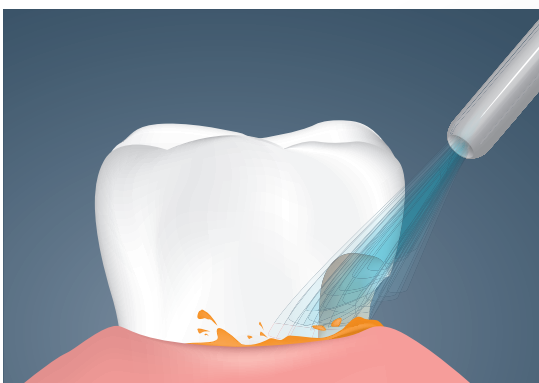

Impresiones de alta calidad con mínimo desplazamiento




Mínimo desplazamiento gingival pero suficiente para un registro preciso de los márgenes cervicales para impresiones de alta calidad en todo momento.

Racegel

La forma eficaz de gestionar todas las preparaciones gingivales


Racegel frente a pastas de retracción	Racegel frente a soluciones hemostáticas	Racegel frente a cordones de retracción
No requiere solución hemostática adicional.	Permanece en su sitio, no se esparce ni gotea.	Es más fácil y rápido de aplicar.
Garantiza impresiones de alta calidad con un desplazamiento gingival mínimo.	No causa manchas gingivales.	No provoca sangrado durante la retirada.
Evita la necesidad de equipos especiales.	Garantiza impresiones de alta calidad con un desplazamiento gingival mínimo.	Garantiza impresiones de alta calidad con un desplazamiento gingival mínimo.
Sabor a frambuesa para una mejor aceptación por parte del paciente.	Ofrece un sistema de aplicación cómodo y listo para su uso.	Mantiene la integridad del ligamento epitelial.

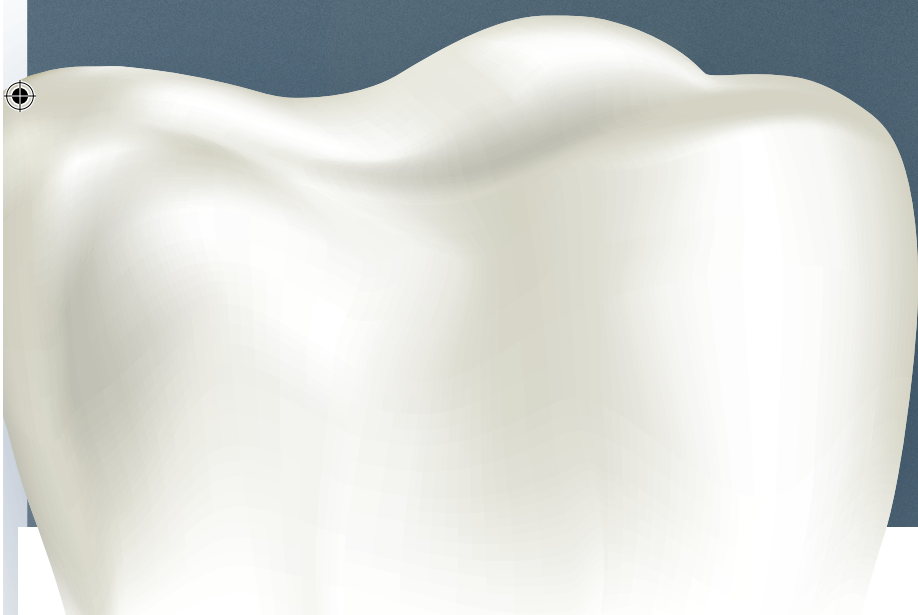

Presentación del producto

Disponible en:

- Caja de 3 jeringas y 30 puntas precurvadas.

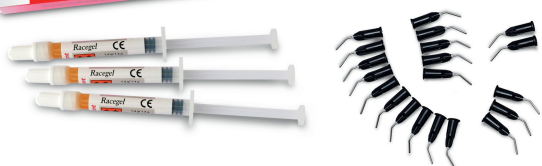

The Dental Pharmaceutical Company

INNOVATIVE, SAFE AND EFFECTIVE SOLUTIONS FOR DENTISTRY WORLDWIDE