

SITSALICINE™

Descripción

Pasta de pulir para la profilaxis después de quitar el sarro.

Indicación

Pasta indicada para **pulir** los dientes una vez eliminado el sarro de los dientes.

La utilización de este producto no presenta ningún riesgo para el niño o la mujer embarazada o lactante.

Propiedades

Pulimento a base de pasta de sílice. El sílice es un polvo ligeramente abrasivo que confiere a la pasta sus propiedades de pulimento: permite eliminar la

microasperezas presentes después de haber quitado el sarro sin dañar el esmalte o la encía. La mezcla aromática le confiere un gusto agradable y refrescante.



Tubo con 60 gr

Composición

- Sílice
- Esencias aromáticas
- Parahidroxibenzoatos de metilo y de propilo sódicos.

Contraindicaciones

- Alergia conocida a los conservadores de tipo parahidroxibenzoatos.

Modo de Empleo

- Depositar un poco de SITSALICINE sobre los dientes a los que se haya quitado el sarro.
- Efectuar el pulimento con una cúpula siliconada o con un cepillito montado en un contraángulo.
- El paciente debe enjuagarse la boca después de la aplicación.