

PULI-JET CLASSIC 5 LITROS

Es una disolución específicamente indicada para **limpiar, higienizar y desodorizar** las aspiraciones dentales. Su especial adibidad detergente exalta el componente antimicrobico para un efecto higiénico-sanitario y desodorante óptimos. Además por sus características químico-físicas preserva el equipo permitiendo un funcionamiento constante y regular del mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto se diluye al 5% en agua caliente (40-50º C). Enroscar en el bidón la bomba dosificadora que suministra 30 ml cada vez, por lo tanto utilizar 4 dosis de Puli-Jet cada 2,5 Lt. de agua (equivalente a un cubo de PULSE-CLEANER lleno hasta la señal de los suctores). Biodegradable más del 90 %.

ADVERTENCIAS

El producto puede contaminar mares, lagos y rios. No abusar en el empleo del mismo. Exclusivamente para uso profesional.

REC. CEE 89/542: contenido inferior al 5% de fenol, fosfates, tensioactivos no-ionicos, blanqueadores a base de cloro.