

<b>MAGNOLIA s.r.l.</b> LABORATORIO	<b>FICHA DE PRODUCTO</b>	ST-02 REV 2	
		fecha	19/06/06
		PAG.	1 di 3

<b>ANTIESPUMOGENO DESINFECTANTE</b>		
<b>USO DESTINADO</b>	COADIUVANTE ANTIESPUMOGENO DESINFECTANTE PARA ASPIRACIÓN DENTAL	
<b>NORMAS Y LEYES APLICABLES AL PRODUCTO</b>	DLG. 65 14/03/2003 ETICHETTATURA PRODOTTI PERICOLOSI	
	DIR. 93/42/CE DISP. MED.	
	UNI EN 14971 GEST. RISCHI	
<b>TESTS DE EFICACIA OFICIALES CE</b>	NORMA prEN 13727 del SET 1999 = EFICACIA BACTERICIDA NORMA Draft prEN 13624 del GIU 1999 = EFIC. FUNGICIDA INFORME DE TEST BIOLAB AM666 DEL 28/02/2003	
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>	20,20 % O-FTALALDEIDE (99%) 33,00 % ASP 15 (silicona 15%) 21,80 % PoliEtilenGlicol PEG 6000 25,00 % SODIO SULFATO ANHIDRO	
<b>CARACTERISTICAS QUÍMICO-FÍSICAS</b>	PH	8 (sol. 0,5%)
	ASPECTO Y COLOR	BLANCO NATA
	OLOR	TIPICO
	SOLUBILIDAD EN AGUA	completa
<b>PRESTACIONES</b>	EFICAZ ANTIESPUMOGENA. EFICAZ CONTRA: - BACTERIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE), e - FUNGHI (CANDIDA ALBICANS)	
<b>MODALIDAD DE EMPLEO</b>	COMO SUMINISTRADO (EN SU FILM HIDROSOLUBLE) La duración de la tablita es función de la cantidad de liquido aspirado. Con aspiración parada la tablita no se gasta, la duración media es de 1 o 2 días laborales.	
<b>VALIDEZ</b>	3 AÑOS DESDE LA PREPARACIÓN ( EN LA CONFECCIÓN ORIGINAL )	
<b>CONDICIONES DE CONSERVACIÓN</b>	AL ABRIGO DE LUZ DIRECTA - A TEMPERATURA <30 °C	
<b>INFLAMABILIDAD</b>	NO INFLAMABLE	

<b>SÍMBOLO DE PELIGRO</b>	Xn
<b>ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD</b>	R 41-22-43

<b>MAGNOLIA s.r.l.</b> LABORATORIO	<b>FICHA DE PRODUCTO</b>		ST-02 REV 2	
			fecha	19/06/06
			<b>PAG.</b>	2 di 3

<b>BIODEGRADABILIDAD DE LOS COMPONENTES</b>	O-FTALALDEIDE al 99 %..... dato no disponibile.	
	PEG 6000 .....degradable con facilidad.	
	ASP 15 .....esta materia prima es constituida por el 15% de aceite silicónico dificilmente biodegradable.	
	SODIO SULFATO ANHIDRO.....inerte, completamente soluble en agua.	
<b>EMPAQUETADO PRIMARIO (ENVOLVIMIENTO)</b>	<b>Empaquetado</b>	FILM IDROSOLUBILE
	<b>Dimensiones (mm)</b>	70 X 90
	<b>Peso (g)</b>	0,7
	<b>Contenido (g)</b>	5,95
	<b>Etiqueta</b>	"MAGNOLIA – ANTISCHIUMA DISINFETTANTE" IMPRESO SOBRE EL FILM

<b>EMPAQUETADO SECUNDARIO (CAJA DE 50PZ)</b>	<b>Empaquetado</b>	CARTON BLANCO
	<b>Dimensiones</b>	70 X 170 X 55
	<b>Peso (g)</b>	16
	<b>Contenido (g)</b>	332,5 (= 50 PZ ENVUELTOS)

<b>EMPAQUETADO SECUNDARIO (ESTUCHE DE 50 PZ)</b>	<b>Empaquetado</b>	ESTUCHE CARTON BLANCO IMPRESO EN CUADRICROMIA
	<b>Dimensiones (mm)</b>	70 X 170 X 55
	<b>Peso (g)</b>	17,1 + 1 CAJA + 50 PZ ENVUELTOS = <b>365,6 g</b>
	<b>Contenido (g)</b>	1 CAJA DE 50 TABLITAS
	<b>Etiqueta</b>	MIRA ESTUCHE ADJUNTO A

<b>EMPAQUETADO COMULATIVO (10 ESTUCHES)</b>	<b>Empaquetado</b>	MALETA DE CARTON IMPRESA EN CUADRICROMIA CON MANIJA
	<b>Dimensiones (mm)</b>	280 X 145 X 180 ( H.)
	<b>Peso (g)</b>	220 + 10 X 365,6 = <b>3876</b>
	<b>Contenido (g)</b>	10 ESTUCHES + MSDS
	<b>Etiqueta</b>	INDICACIONES DEL CONTENIDO + SIMB.PERIC.

**ESQUEMA DE PALETIZACION : BAJO PEDIDO**

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO	ST-02 REV 2	
		fecha	19/06/06
		PAG.	3 di 3

ADJUNTO A

**Estuche de 50 tabletas antiespumógenas desinfectantes**

