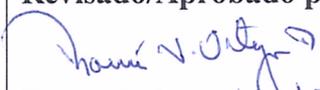


	TÍTULO: SNOW SMILE CLARBEN	CÓDIGO: FT-SGC038.01
	FECHA DE EMISIÓN: 29/DIC/2016	REEMPLAZA: R1
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha 29/DIC/2016	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha 29/DIC/2016
--	---

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

1. CARACTERISTICAS

2. FINALIDAD

Los productos para el blanqueamiento dental se utilizan en odontología para cambiar el color de los dientes naturales dándoles una tonalidad más luminosa o más blanca. Estos productos se aplican directamente en la cavidad bucal sobre las superficies externas de los dientes.

El producto elimina las decoloraciones intrínsecas o adquiridas de los dientes naturales mediante el empleo de productos químicos. En nuestro producto el principio activo es el peróxido de hidrógeno.

La evaluación de la eficacia del producto se realiza conforme a la norma ISO 283399: "odontología, productos para el blanqueamiento dental".

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto Cosmético

4. PRESENTACIÓN

El kit contiene:

- 5 Jeringas x 3ml de Gel SNOW SMILE
- 2 Planchas de Féculas
- 1 Caja Porta-féculas
- 1 Guía de color

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 08-004

Ref: 08-005

Ref: 08-006

6. MODO DE EMPLEO

- Lleve a cabo un cepillado dental y una limpieza utilizando hilo dental
- Tome una jeringa del paquete y quite el tapón de la boquilla localizada en la punta de la jeringa.
- Coloque una pequeña gota del gel SNOW SMILE CLARBEN en cada compartimiento dental de la funda de blanqueamiento. (Dibujo 1) Coloque las fundas de blanqueamiento llenas sobre sus dientes (dibujo 2) Una jeringa alcanza para llenar aproximadamente 6-8 fundas.
- Transcurrido el tiempo del blanqueamiento, quite las fundas, enjuague y utilice el cepillo dental para eliminar el gel sobrante en sus dientes y encías. Enjuague las fundas con agua fría y límpielas suavemente con el cepillo dental.

Visado DT:



- Durante las próximas dos horas transcurridas después de realizar el blanqueamiento es preferible abstenerse de consumir te, café, cigarrillos, vino tinto, etc. pues consumir éstos últimos, disminuye la efectividad del tratamiento.

7. ADVERTENCIAS

- Evitar todo contacto con los ojos. Enjuagar inmediatamente si el producto entra en contacto con estos.
- No utilizar en menores de 18 años.
- Evitar el contacto con las mucosas, ojos y piel. En caso de que esto ocurriera por descuido, lavar la zona afectada con abundante agua y consultar al médico. Hasta ahora no hay estudios en todos los tipos de pacientes, y por eso no se recomienda su uso durante el embarazo, periodo de lactancia.
- Almacenar en lugar fresco o en el frigorífico (4–12°C). El material no debe congelarse, calentarse o exponerse a la luz solar. La fecha de caducidad indicada para la jeringa y en el envase se refiere sólo al material correctamente conservado.

8. IMAGEN

