

	FICHA TÉCNICA	
	21984	
	ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE S/LUZ	VELOCE

PRODUCTO	ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE Sin LUZ	
REFERENCIA	21984	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	

1 Finalidad prevista

Se utiliza para conectar la manguera de la unidad dental y una pieza de mano dental para conducir el agua y el aire.



2 Descripción de los niveles de peligro

 PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN
	PRECAUCIÓN se usa si una deficiencia en la atención adecuada puede resultar en un peligro para el paciente, el usuario u otros.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA
	ADVERTENCIA se usa si el uso inadecuado puede ocasionar lesiones graves.

3 Especificaciones técnicas

		VQC4014K	VQC6016K	VQC6016KW
	Luminosidad ideal (184mA) en	-	3,2 - 3,5V	3,2 - 3,5V
	Luz	-	LED	LED
	Tipo	4-agujeros	6-agujeros	6-agujeros
	Conector adecuado	Veloce, MK-dent, KaVo Mul flex®	Veloce, MK-dent, KaVo Mul flex®	Veloce, MK-dent, KaVo Mul flex®
	Bombilla de repuesto adecuada	-	VBUS012	VBUS012
	Regulación de agua	-	-	Sí



KaVo® es una marca registrada. Veloce no tiene ninguna conexión económica con la compañía mencionada anteriormente.

	FICHA TÉCNICA	
	21984	
	ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE S/LUZ	VELOCE

4 Puesta en servicio y funcionamiento

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA
	Riesgo de infección para pacientes y usuarios debido a instrumentos no estériles → Antes del descanso y después de cada uso posterior, el instrumento y los accesorios deben procesarse y esterilizarse.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA
	Incorrecto funcionamiento y/o riesgo de una infección causada por aire comprimido húmedo y contaminado y por agua de refrigeración contaminada. → Este producto solo puede utilizarse con unidades dentales con certificación CE o con otras certificadas según las directrices nacionales vigentes y con un suministro de agua y aire comprimido de acuerdo con las normas válidas de cuidado dental.

☞ Todas las mañanas enjuague bien el acoplador durante al menos 2 minutos sin instalar ningún instrumento en él.

5 Utilización

5.1 Conexión a una pieza de mano de alta velocidad (Turbina)

Por favor, siga las instrucciones del manual del fabricante de su instrumento

5.2 Conexión a la manguera

☞ Conecte el acoplador al conector de la manguera y apriete la tuerca de acoplamiento a la manguera.

☞ Use la herramienta adjunta para apretar la conexión.

 Después del uso, el acoplador permanece en la manguera.

6 Solución de funcionamiento incorrecto

6.1 Cambio de juntas tóricas

En caso de fuga, reemplace las juntas tóricas en el acoplador.

☞ Retire las juntas tóricas desgastadas y reemplácelas por otras nuevas.


 No use vaselina u otra grasa y aceite para la lubricación.

6.2 Cambio de la lámpara de iluminación (concerniente acopladores con luz)

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA
	Riesgo de quemaduras debido a la lámpara caliente La lámpara encendida produce calor mientras se usa. → Solo toque/cambie la lámpara cuando esté completamente fría.

 Los LED funcionan con un ajuste exacto de los polos. Si el LED no funciona después de la instalación, retire el LED y gírelo 180° antes de volver a insertarlo.

	FICHA TÉCNICA	
	21984	
	ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE S/LUZ	VELOCE

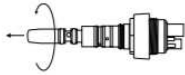

1. Gire la tapa de protección de la bombilla en la dirección de la flecha como se muestra en la figura.



2. Retire la lámpara defectuosa.



3. Inserte la nueva lámpara y vuelva a colocar la tapa de protección de la bombilla girándola en la dirección opuesta a la de la flecha.

7 Procesamiento según ISO 17664

7.1 Limpieza manual de la superficie

Herramientas:

- Agua potable 30°C ± 5° C (86°F ± 10°F)
- Cepillo o cepillo de dientes suave

☞ Coloque el acoplador bajo el chorro de agua y cepille cuidadosamente la suciedad por completo de la superficie.

7.2 Limpieza mecánica de la superficie

No aplica.

7.3 Limpieza manual del interior

- ☞ Enjuague las tuberías de agua y aire con agua potable.
- ☞ Sople el instrumento con aire comprimido desde el interior y el exterior hasta que no queden gotas visibles.

7.4 Limpieza mecánica del interior

No aplica.

7.5 Desinfección



ADVERTENCIA

Incorrecto funcionamiento debido al uso de limpiadores ultrasónicos. ¡Los acopladores no se pueden esterilizar!
→ Limpie el acoplador solo como se describe a continuación.



ADVERTENCIA

El uso de baños desinfectantes y/o desinfectantes clorados puede provocar defectos y un incorrecto funcionamiento del acoplador.
→ Solo limpie y desinfecte el acoplador manualmente.



Utilice únicamente desinfectantes cuya eficacia microbiológica esté garantizada por el fabricante (por ejemplo, VAH / DGHM-registro y marca CE).
Con respecto a la compatibilidad del material, solo se pueden usar desinfectantes libres de aldehído y basados en alcohol.

- ☞ Aplique el desinfectante a un paño y limpie el acoplador.
- ☞ Considere el tiempo de reacción establecido por el fabricante del desinfectante.
- ☞ Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante.

8 Repuestos y accesorios

Acoplamiento con Led / Acoplamiento sin luz	VQC6016K / VQC4014K
Acoplamiento con Led y regulación de agua	VQC6016KW

9 Garantía

Veloce proporciona al usuario final una garantía de funcionamiento adecuado, material inmaculado y mano de obra durante un período de 12 meses después de la compra. Es importante para esto la fecha de la factura de compra.

Veloce no se responsabiliza por los defectos y las consecuencias que puedan surgir debido a desgaste natural, manipulación incorrecta, limpieza o mantenimiento inadecuados, incumplimiento de las instrucciones de operación o manuales, calcinación o corrosión, suministro de aire y agua contaminada o influencias químicas o eléctricas que son inusuales o que no lo permiten de acuerdo con las instrucciones de uso de Veloce o con otras instrucciones del fabricante.

En caso de reclamaciones justificadas, Veloce realiza una reparación gratuita o un posible reemplazo gratuito. Esto será decidido por Veloce. Se excluyen otras reclamaciones de cualquier tipo, en compensación de daño particular. En caso de incumplimiento, negligencia grave o intención, esto solo se aplicará a menos que existan regulaciones legales convincentes.

La garantía no cubre lámparas, conductores de luz de vidrio, vidrio, piezas de goma y la solidez del color de las piezas de plástico. Se excluye toda responsabilidad si los defectos o sus consecuencias surgen debido a intervenciones o modificaciones en el producto por parte del usuario final o por un tercero no autorizado por Veloce.

Las reclamaciones de garantía solo se aceptarán si el producto se envía con un comprobante de compra; factura o una copia del albarán de entrega. El Distribuidor, la fecha de compra, el modelo y el número de serie deben de estar claramente visibles.



FABRICANTE
MK-dent GmbH
Marie-Curie-Str. 2
D-22941 Bargteheide

Phone: +49 (0)4532 40049 0
Fax: +49 (0)4532 40049 10
Email: info@mk-dent.com
Web: www.mk-dent.com

File: GA_MK_QC_002_ES.indd
Rev: A/10_2017