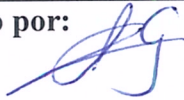
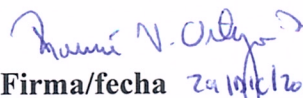
 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO: TOALLITAS LACLEDIN WIPES	CÓDIGO: FT-SGC014.01
	FECHA DE EMISIÓN: 29/DIC/2016	REEMPLAZA: R3
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha 29/DIC/2016	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha 29/DIC/2016
--	---

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

1. CARACTERISTICAS

Toallitas desinfección de superficies de productos sanitarios no invasivos, con un amplio espectro de acción activo frente a Staphylococcus aureus resistente a la Metilicina, Virus Influenza tipo A H1N1, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Mycobacterium tuberculosis (TB), Clostridium difficile (C-Diff) formas vegetativas de organismos Gram positive, Virus HIV-1, Virus Influenza Humana tipo B, Staphylococcus aureus, Virus Hepatitis C, Aspergillus niger, Candida albicans.

Tiene un agradable olor, evitando el olor a desinfectante.
La solución concentrada que impregna la toallita contiene:
Etanol, Propan-2-ol, hidrocloreuro de biguanida polimérica, aroma Dentomint

2. FINALIDAD

Toallitas para desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos.
Especialmente para ambientes médicos y dentales.

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

- Toallitas Lactedin Wipes. Bote con 100 Toallitas
- Toallitas Lactedin Wipes refill recambio de toallitas

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- Ref: 07-011
- Ref: 07-017

6. MODO DE EMPLEO

- Quitar la tapa.
- Cortar la bolsa y sacar la primera toallita a través del orificio.
- Volver a colocar la tapa.
- Tirar de la toallita con un ángulo de 45 °.
- Utilizar una nueva toallita para cada aplicación.
- Humedecer completamente la superficie a desinfectar y esperar hasta su evaporación.

7. ADVERTENCIAS

Precauciones conforme a la Directiva de Sustancias Peligrosas (aplicable a la solución concentrada)

- Fácilmente inflamable,
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Visado DT: 

**TOALLITAS LACLEDIN
WIPES**

CÓDIGO:

FT-SGC14.01

No. PÁG.:

3 de 3

- Manténgase el recipiente bien cerrado
- Protéjase de fuentes de ignición - No fumar.
- No respirar los vapores
- Evítese el contacto con los ojos
- En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.
- No tirar los residuos por el desagüe.
- No utilizar después de la fecha de caducidad
- No utilizar sobre superficies sensibles al alcohol
- No usar conjuntamente con productos clorados ya que se puede producir unacoloración de la superficie a desinfectar.
- Para más información consultar la Hoja de seguridad.

8. IMAGEN



Visado DT:

