

## 3M™ Adhesivo para Poliéter




¿Cómo saber que el adhesivo está seco?

- El nuevo adhesivo parece brillante y tiene una superficie pegajosa
- El adhesivo viejo aparece opaco con una superficie no pegajosa




NOTA: Si realiza una "prueba de toque", el material no debe estar fibroso o jalearse de la cubeta. El material debe estar pegajoso; como si estuviera tocando cinta Scotch®.

### Cubetas personalizadas

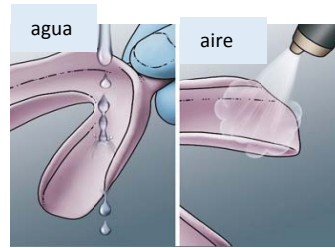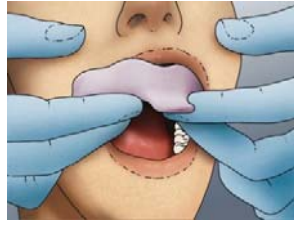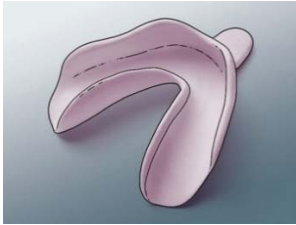

### Cubetas de metal

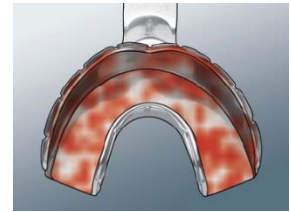




Para asegurar adhesión óptima:

- Remueva la capa inhibida
- Lije la superficie
- Opcional: agregar elementos de retención

Pruébalo

Limpie la cubeta después de ser probada. Seque completamente la cubeta.

Limpie y seque la cubeta metálica después de probar. Aplicar una fina capa adhesiva homogénea de color rojo uniforme. Comience en un extremo de la cubeta y el trabajo hacia el otro. Deje que el adhesivo se seque por completo. El tiempo requerido depende del espesor de la capa. Incluso para las capas gruesas, dos minutos es suficiente.

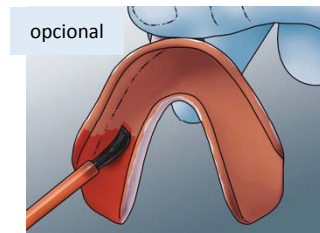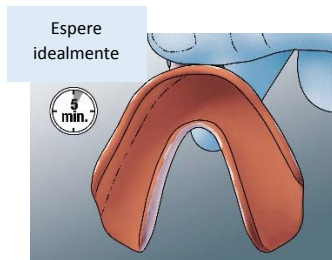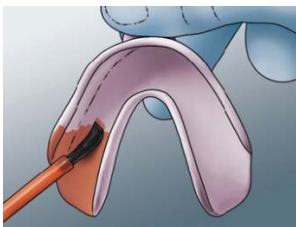

Aplique una capa de adhesivo fina y homogénea de color rojo uniforme, comenzando desde un extremo de la cubeta y trabajando hacia el otro.

Deje que el adhesivo se seque por completo. El tiempo requerido depende del espesor de la capa y puede variar para los diferentes materiales de cubeta personalizadas. Cinco minutos deben ser suficientes, incluso para las capas gruesas, cinco minutos deben ser suficientes.

Deje que una capa fina adhesivo se seque por completo (al menos dos minutos) y aplique una segunda capa delgada. Deje que la segunda capa también se seque durante al menos tres minutos.



Limpieza de la bandeja metálica: La capa adhesiva se puede retirar de la cubeta metálica con el dedo. Quitarlo bajo el chorro de agua permite una extracción rápida y fácil. Alternativamente, se pueden usar agentes disponibles comercialmente para limpiar bandejas de impresión (por ejemplo, Pluraclean Organe (Pluradent) o Solitine (Kerr)).

### 3M Cuidado Oral

2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000  
1-800-634-2249

3M, ESPE and Imprint son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Cualquier otra marca mencionada no es propiedad de 3M  
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.