

Uso previsto del dispositivo:

Los postes metálicos roscados se utilizan para retener o reconstruir los dientes no vitales donde el canal radicular ha sido tratado endodónticamente.

Se deben utilizar escariadores especiales para los postes.

Accesorio principal:

Llave hueca y escariadores especiales.

Los escariadores se utilizan como accesorio para ensanchar y enderezar la parte coronal de los canales con el fin de proporcionar un mejor acceso a los instrumentos utilizados para trabajar en los canales.

Descripción del producto:

<p>Nordin Golden Cylindrical Composite (03-1XX)</p>	
<p>Postes roscados cilíndricos Composite chapados en oro con cabeza de postes « composite » especial para una mayor retención mecánica.</p>	

Tamaños disponibles:

Size	1	2	3	4	5	6		
S	*	*	*	*	*	*	Short 8 mm	
M	*	*	*	*	*	*		Medium 9,5 mm
L	*	*	*	*	*	*		Long 12 mm
XL				*	*	*	Extra long 14 mm	
Ø	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80		

Especificación de material:

Latón sin plomo chapado en oro EG3 ISO (Cu Zn 37)

Composición exacta de los Nordin postes roscados metálicos chapados en oro:

Latón sin plomo	Cu 63,3 % - Ni 0,01 % - Zn 36,69 %
-----------------	------------------------------------

Recubrimiento chapado en oro: el recubrimiento superficial de 0,14 a 0,18 µm se realiza mediante galvanización en un baño de oro - cobalto.

Precauciones:

Se deben tomar las siguientes precauciones al usar los postes roscados metálicos:

- El poste de metal es un dispositivo de un solo uso.

- Debe ser utilizado por profesionales en odontología únicamente.
- La reutilización de estos postes puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada, mala cementación y rotura.
- El poste debe esterilizarse antes de su inserción en el canal.
- Deben utilizarse escariadores de postes metálicos especiales.
- Evitar tocar los postes con los dedos después de la limpieza.
- Recomendamos el uso de un dique de goma.

Se deben tomar precauciones especiales para los postes roscados chapados en oro:

Los postes roscados chapados en oro no deben acortarse ni manipularse de ninguna manera que pueda quitar parte de la capa protectora de oro, ya que esto puede provocar la corrosión del poste.

Contraindicaciones:

Dentina residual insuficiente: se requieren al menos 2 mm de estructura dental alrededor de la preparación.

Empaquetado del producto:

Producto disponible en caja de recarga de 12 postes, o en surtido de 60/120 o 240 (con todos los tamaños de postes) piezas empaquetadas con 1 llave hueca.