

PAPACÁRIE®

Gel de papaya para Remoción Químico-Mecánica de la Carie. La técnica simplificada para el retiro de lesiones cariosas fue aprobada por el OMS con el nombre de la "Atraumatic Restorative Technique". El gel rompe la ligación del colágeno de la dentina cariada, dejando intacta la dentina sana. Hace posible al cirujano-dentista el tratamiento de la caries dental sin la anestesia local y el uso de los instrumentos rotativos de corte, haciendo el procedimiento menos traumático y reduciendo al mínimo el riesgo de exposiciones pulpares.

PRESENTACIÓN:

Ref. PPCDUO - Jeringa plástica desechable con capacidad de 1ml, con tapa vedante y etiquetado con información de fecha de caducidad del producto.

COMPOSICIÓN:

Papaína, Cloramina, Corante Azul, , Vehículo qsp.

Papaína 6000UI/mg

Cloramina T

Propilenoglicol

Corante Azul C.I. 52040

Polietilenoglicol

Composición patentada: la reproducción da la formula solo puede ser efectuada mediante licencia de los inventores.

CARACTERÍSTICAS:

- Color: Azul
- Aspecto físico: Gel
- Olor: Característico
- El producto no presenta características de adhesividad, siendo totalmente lavable en agua, sin dejar residuos que puedan interferir con la restauración del elemento dental

TÉCNICA DE USO:

A - Remoción de la dentina cariada llenar la cavidad de la carie con PAPACÁRIE® Duo y dejar el producto actuar durante 30 segundos en lesiones agudas y de 40 a 60 segundos en lesiones crónicas.

B - Raspar la dentina cariada ablandada con la porción contraria de la cureta, la parte que no tiene corte.

C- Re-aplicar cuantas veces fuese necesario, pues en cuanto presentar la coloración turba indica que está ocurriendo descomposición del tejido cariado.

D - Caso no haya tejido infectado resto, retirar el gel con una bolita de algodón embebida en agua y obturar la cavidad con material apropiado.

IMPORTANTE:

Si necesario, abrir la cavidad con instrumentos rotatorios o manuales. Cualquier resto del material de la restauración que no se quiera mantener debe ser retirado. Aplicar un dique de goma, si fuera necesario.

Cuidados especiales:

PAPACÁRIE® debe ser almacenado en temperatura de 2 a 35 grados celsius. Cerrar bien después del uso.

PAPACÁRIE®

INDICACIONES:

Remoción de las caries radiculares, caries profundas y caries en niños
Elimina la dentina cariada preservando el tejido sano sin la utilización de anestesia local y el uso de instrumentos cortantes rotatorios
En cavidades profundas reduce el riesgo de la exposición pulpar

CONSERVACIÓN Y VALIDEZ:

No utilice el producto fuera del plazo de validez. Mantenga el producto en el envase original y lejos del alcance de niños. Cierre bien el envase después del uso y manténgalo en local fresco y seco.

Almacenaje: Mantener en temperatura de 2° a 35° C.

El PAPACÁRIE DUO tiene validez de 24 meses, desde su fabricación.

FABRICANTE:

Fórmula & Ação: Rua Machado de Assis, 470 Vila Mariana. CEP: 04106-001 - São Paulo SP - Brasil

DISTRIBUIDOR EUROPA:

Especialidades Médicas Tonal S.L. C/ Maestrat 41-43 1° CP:08225 - Terrassa - Barcelona - España