

Anterior



Caso clínico y fotografía de
Dr. Paulo Monteiro
Lisbon, Portugal

?

Acerca del caso:

El paciente solicitó una solución que cubriera los defectos del esmalte tras un tratamiento de ortodoncia, mejorara la estética y diera un aspecto blanco a los dientes.

!

El desafío:

Elegir el color de composite adecuado para un procedimiento monocapa.

Antes:



Después:



Productos destacados en este caso:



Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal



3M™ Filtek™
Universal Restorative



Sistema de pulido con diamante
3M™ Sof-Lex™ Diamond

Anterior



Caso clínico y fotografía de
Dr. Paulo Monteiro
Lisbon, Portugal

Productos destacados en este caso:

- ▶ Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal
- ▶ 3M™ Filtek™ Universal Restorative
- ▶ Sistema de pulido con diamante 3M™ Sof-Lex™ Diamond



Imagen. 1: Situación inicial.



Imagen. 2: Se observa un defecto de esmalte en la cara vestibular los incisivos centrales y laterales superiores.



Imagen. 3: Una vista lateral reveló la gravedad de las irregularidades de la superficie.



Imagen. 4: Se determinó que el color de los dientes del paciente era B1, sin embargo, el paciente quería unos dientes más brillantes, por lo que se utilizó el color extrablanco.

Anterior



Caso clínico y fotografía de
Dr. Paulo Monteiro
Lisbon, Portugal

Productos destacados en este caso:

- ▶ Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal
- ▶ 3M™ Filtek™ Universal Restorative
- ▶ Sistema de pulido con diamante 3M™ Sof-Lex™ Diamond



Imagen. 5: No fue posible la colocación del dique de goma debido al retenedor de ortodoncia del paciente.



Imagen. 6: Grabado con ácido 3M™ Scotchbond™ Universal de toda la superficie vestibular.



Imagen. 7: Las expectativas del paciente se cumplieron una vez que se aplicó el Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal y se colocó una sola capa de composite 3M™ Filtek™ Universal en color extrablanco.



Imagen. 8: Después de utilizar el sistema de pulido con diamante 3M™ Sof-Lex™ Diamond, las restauraciones mostraron un brillo inicial impresionante asociado con un nanocomposite.