

## FICHA TÉCNICA

### DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
NIF	A/28218675
Fabricante/Distribuidor	DISTRIBUIDOR

### DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

<b>Producto</b>	<b>VICRYL™</b> W9756
-----------------	-------------------------

### Indicaciones

La sutura VICRYL™ está indicada para la aproximación y/o cierre de tejidos blandos en general, incluida la cirugía oftálmica, anastomosis de los nervios periféricos y microcirugía de vasos de un diámetro inferior a 2 mm. La seguridad y eficacia de la sutura VICRYL™ en tejido cardiovascular no han sido establecidas.

### Descripción

La sutura quirúrgica VICRYL™ es estéril, sintética y absorbible y está compuesta de un copolímero formado en un 90 % de glicólido y 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sub>m</sub>(C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>)<sub>n</sub>. La sutura VICRYL™ está disponible como sutura con o sin recubrimiento. La sutura VICRYL™ está recubierta de una mezcla a partes iguales de copolímero de glicólido y láctido (poliglactina 370) y estearato de calcio. Se ha comprobado que tanto el copolímero de poliglactina 910 como la mezcla de poliglactina 370 con estearato de calcio carecen de propiedades antigénicas, no son pirogénicos y solamente provocan una reacción leve en el tejido durante la absorción. La sutura VICRYL™ está disponible sin teñir y teñida con violeta D&C n.º 2 (índice de color 60725) para aumentar su visibilidad en el campo quirúrgico. La sutura VICRYL™ está disponible en una amplia variedad de calibres y longitudes, tipos y tamaños, y viene sin aguja o con agujas de diversos tipos y tamaños.

### Contraindicaciones

Al ser absorbibles, estas suturas no se deberán utilizar cuando se requiera la aproximación duradera de tejidos sometidos a tensión.

### Reacciones adversas

Las reacciones adversas asociadas al uso de este dispositivo incluyen dehiscencia de la herida, formación de cálculos en los tractos urinario o biliar en caso de contacto prolongado con soluciones salinas como la orina o bilis, reacción tisular inflamatoria e irritación local transitoria en el lugar de la herida.

### Referencias del producto

Referencia del fabricante	W9756
Referencia del distribuidor	W9756
Marca comercial	VICRYL™



### Atributos y medidas

Longitud del hilo (cm)	45
Longitud de la aguja (mm)	8
Nº de agujas	2
Nº de suturas	1
Calibre del hilo (USP)	6-0
Tipo de aguja	Espatulada Invertida
Nombre de la aguja	S-22
Everpoint/Multipass/Standard	Standard
Fuerza tensil	75% a los 14 días 50% a los 21 días USP 6-0 (métrico 0,7) y mayores tamaños 40% a los 21 días USP 7-0 (métrico 0,5) y menores tamaños 25% a los 28 días USP 6-0 (métrico 0,7) y mayores tamaños
Curvatura	1/2C
Color	incolora
Tiempo de absorción	La absorción prácticamente finaliza entre 56 y 70 días.
Método de esterilización	La sutura VICRYL™ está esterilizada mediante óxido de etileno. No reesterilizar. No usar si el envase está abierto o dañado. Desechar todas las suturas abiertas aunque no se hayan utilizado.

### Datos logísticos

Almacenamiento	No requiere condiciones de almacenamiento especiales. No usar después de la fecha de caducidad.
Caducidad	5 años
Unidades por caja	12
Peso (gr)	90
Ancho (cm)	7
Alto (cm)	6
Largo (cm)	14
Garantía de Calidad	Marcado CE. Ausencia de látex

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios