

FICHA TÉCNICA

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
NIF	A/28218675
Fabricante/Distribuidor	DISTRIBUIDOR

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto	VICRYL* RAPIDE V4270H
----------	--------------------------

Indicaciones
VICRYL* RAPIDE está diseñado para ser usado en la aproximación de tejidos blandos, cuando tan sólo se requiere soporte a corto plazo de la herida, y en los casos en los que está indicada la rápida absorción de la sutura. Gracias a su perfil de absorción, VICRYL* RAPIDE está indicado en las suturas epidérmicas, especialmente en cirugía pediátrica, episiotomías, firosis y cierres de la mucosa oral. Además, VICRYL* RAPIDE se usa con éxito en cirugía oftálmica para las suturas conjuntivales.

Descripción
La sutura quirúrgica sintética absorbible estéril VICRYL* RAPIDE, de rápida absorción está compuesta por un copolímero hecho en un 90 % de glicólido y en un 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es (C₂H₂O₂)_m(C₂H₂O₂)_n. Su pérdida de resistencia acelerada característica se obtiene gracias al uso de un material polimérico de peso molecular inferior al de la sutura VICRYL* normal (poliglactina 910). Las suturas VICRYL* RAPIDE se obtienen recubriendo el material de sutura trenzado con una mezcla compuesta por partes iguales de copolímero de glicólico y láctico (poliglactina 370) y estearato de calcio. Se ha demostrado que el copolímero Poliglactina 910 y la poliglactina 370 con estearato de calcio son no antigénicas, ni pirogénicas y producen tan sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. Las suturas VICRYL* RAPIDE están disponibles con tinte, mediante la adición de violeta D+C # 2 (Índice de color número 60725) durante la polimerización, o sin tinte. La sutura VICRYL* RAPIDE rápida se encuentra disponible en una amplia gama de calibres y longitudes, sin aguja o con agujas de acero inoxidable de tipos y tamaños variados. Los detalles completos pueden consultarse en el catálogo. La resistencia a la tracción del nudo de VICRYL* RAPIDE cumple con los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP) para las suturas de colágeno, así como con los requisitos de la Farmacopea Europea para las suturas absorbibles estériles ("Chorda Resorbilis Sterilis") (excepto por un ligero exceso de calibre en algunas referencias).

Contraindicaciones
Debido a la rápida pérdida de fuerza tensil, VICRYL* RAPIDE no debe ser usado donde se requiera la aproximación prolongada de tejidos bajo tensión o donde se requiera soporte de la herida o ligadura durante más de 7 días. La sutura VICRYL* RAPIDE no es para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos.

Reacciones adversas
Las contraindicaciones asociadas con el uso del VICRYL* RAPIDE incluyen la irritación local transitoria en el lugar de la herida, la respuesta inflamatoria transitoria ante el cuerpo extraño, el eritema y la induración en el caso de la absorción de las suturas subcuticulares. Como todos los cuerpos extraños VICRYL* RAPIDE puede aumentar una infección preexistente.

Referencias del producto

Referencia del fabricante	V4270H
Referencia del distribuidor	V4270H
Marca comercial	VICRYL* RAPIDE



Atributos y medidas

Longitud del hilo (cm)	70
Longitud de la aguja (mm)	19
Nº de agujas	1
Nº de suturas	1
Calibre del hilo (USP)	3-0
Tipo de aguja	Triangular invertida Prime
Nombre de la aguja	PS-2 PRIME
Everpoint/Multipass/Standard	Standard
Fuerza tensil	50% a los 5 días 0% a los 10-14 días
Curvatura	3/8C
Color	incolora
Tiempo de absorción	La absorción está esencialmente concluida en 42 días.
Método de esterilización	VICRYL* RAPIDE violeta está esterilizado por óxido de etileno. VICRYL* RAPIDE sin tinte está esterilizado mediante irradiación. No re-esterilizar! No usar la sutura si el envase está abierto o dañado! Desechar las suturas abiertas no utilizadas!

Datos logísticos

Almacenamiento	Se recomienda almacenar a temperaturas inferiores a 25° C, protegida de la humedad y del calor directo. No usar después de la fecha
Caducidad	5 años
Unidades por caja	36
Peso (gr)	260
Ancho (cm)	12
Alto (cm)	7
Largo (cm)	14
Garantía de Calidad	Marcado CE. Ausencia de látex

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios