

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre
NIF
Fabricante/Distribuidor

ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
A/28218675
DISTRIBUIDOR

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto

VICRYL RAPIDE
V4930H

Indicaciones

Está diseñado para ser usado en la aproximación de tejidos blandos, cuando tan sólo se requiere soporte a corto plazo de la herida, y en los casos en los que está indicada la rápida absorción de la sutura.

Descripción

Está compuesta por un copolímero hecho en un 90 % de glicólido y en un 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es $(C_2H_2O_2)_m(C_2H_2O_2)_n$. Su pérdida de resistencia acelerada característica se obtiene gracias al uso de un material polimérico de peso molecular inferior al de la sutura VICRYL* normal (poliglactina 910).

Modo de uso

Produce tan sólo una reacción inflamatoria mínima o moderada en los tejidos. La pérdida progresiva de resistencia a la tensión y la eventual absorción del VICRYL* RAPIDE se producen mediante hidrólisis, en la cual el copolímero se degrada para formar ácido glicólico y ácido láctico, que posteriormente se absorben y se metabolizan en el organismo. La absorción se inicia por medio de una pérdida de resistencia a la tensión, seguida por una pérdida de masa.

Contraindicaciones

Debido a la rápida pérdida de fuerza tensil, VICRYL* RAPIDE no debe ser usado donde se requiera la aproximación prolongada de tejidos bajo tensión o donde se requiera soporte de la herida o ligadura durante más de 7 días. La sutura VICRYL* RAPIDE no es para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos.

Advertencias

Los usuarios deben conocer los procedimientos y las técnicas de uso de las suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar dependiendo del lugar de aplicación y del material de sutura utilizado. Se aconseja a los cirujanos tener en cuenta el uso "in vivo" al seleccionar una sutura. Tal como sucede con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de una sutura con las soluciones salinas, tales como las que se encuentran en los tractos urinario o biliar, puede dar como resultado la formación de cálculos. Por ser una sutura absorbible, VICRYL* RAPIDE puede actuar temporalmente como cuerpo extraño. Debe seguirse la práctica quirúrgica recomendada en el caso de heridas infectadas o contaminadas.

Referencias del producto

Referencia del fabricante
Referencia del distribuidor
Marca comercial

V4930H
V4930H
VICRYL RAPIDE



Atributos y medidas

Longitud del hilo
Longitud Aguja
Nº Agujas
Calibre del hilo
Tipo Aguja
Fuerza tensil

Curvatura
Color
Tiempo de absorción
Método de esterilización
Aplicaciones

45 cm
13mm
1
5-0
Triangular Prime
No permanente. 5 días después de la implantación perdura alrededor del 50 % de la resistencia a la tensión. La totalidad de la resistencia a la tensión se agota entre 10 y 14 días después de la implantación.
3/8
Incolor
Absorbible. La absorción de VICRYL* RAPIDE se produce a continuación, y está esencialmente concluida en 42 días.
Óxido de etileno.
Deben seleccionarse e implantarse de acuerdo con el estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida. Generalmente VICRYL* RAPIDE se desprende entre 7 y 10 días después de la intervención, o puede retirarse posteriormente con una gasa estéril. Normalmente no es necesario quitar los puntos.

Datos logísticos

Conservación

Caducidad
Envasado
Tipo embalaje
Peso bruto
Anchura
Altura
Profundidad
Garantía de Calidad

Almacenar a temperaturas inferiores a 25° C, protegida de la humedad y del calor directo. No usar después de la fecha de caducidad.
5 años
Sobre individual
Caja de 36 unidades
260 gr
6,4 cm
11,8 cm
14 cm
MARCADO CE