

### DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
NIF	A/28218675
Fabricante/Distribuidor	DISTRIBUIDOR

### DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto	VICRYL RAPIDE V76H
----------	-----------------------

Indicaciones	Está diseñado para ser usado en la aproximación de tejidos blandos, cuando tan sólo se requiere soporte a corto plazo de la herida, y en los casos en los que está indicada la rápida absorción de la sutura.
--------------	---

Descripción	Está compuesta por un copolímero hecho en un 90 % de glicólido y en un 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>m</sub> (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> . Su pérdida de resistencia acelerada característica se obtiene gracias al uso de un material polimérico de peso molecular inferior al de la sutura VICRYL* normal (poliglactina 910).
-------------	--

Modo de uso	Produce tan sólo una reacción inflamatoria mínima o moderada en los tejidos. La pérdida progresiva de resistencia a la tensión y la eventual absorción del VICRYL* RAPIDE se producen mediante hidrólisis, en la cual el copolímero se degrada para formar ácido glicólico y ácido láctico, que posteriormente se absorben y se metabolizan en el organismo. La absorción se inicia por medio de una pérdida de resistencia a la tensión, seguida por una pérdida de masa.
-------------	--

Contraindicaciones	Debido a la rápida pérdida de fuerza tensil, VICRYL* RAPIDE no debe ser usado donde se requiera la aproximación prolongada de tejidos bajo tensión o donde se requiera soporte de la herida o ligadura durante más de 7 días. La sutura VICRYL* RAPIDE no es para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos.
--------------------	--

Advertencias	Los usuarios deben conocer los procedimientos y las técnicas de uso de las suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar dependiendo del lugar de aplicación y del material de sutura utilizado. Se aconseja a los cirujanos tener en cuenta el uso "in vivo" al seleccionar una sutura. Tal como sucede con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de una sutura con las soluciones salinas, tales como las que se encuentran en los tractos urinario o biliar, puede dar como resultado la formación de cálculos. Por ser una sutura absorbible, VICRYL* RAPIDE puede actuar temporalmente como cuerpo extraño. Debe seguirse la práctica quirúrgica recomendada en el caso de heridas infectadas o contaminadas.
--------------	--

### Referencias del producto

Referencia del fabricante	V76H
Referencia del distribuidor	V76H
Marca comercial	VICRYL RAPIDE



### Atributos y medidas

Longitud del hilo	45cm
Longitud Aguja	17mm
Nº Agujas	1
Calibre del hilo	3-0
Tipo Aguja	Triangular invertida
Fuerza tensil	No permanente. 5 días después de la implantación perdura alrededor del 50 % de la resistencia a la tensión. La totalidad de la resistencia a la tensión se agota entre 10 y 14 días después de la implantación.
Curvatura	1/2
Color	Incolor
Tiempo de absorción	Absorbible. La absorción de VICRYL* RAPIDE se produce a continuación, y está esencialmente concluida en 42 días.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Aplicaciones	Deben seleccionarse e implantarse de acuerdo con el estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida. Generalmente VICRYL* RAPIDE se desprende entre 7 y 10 días después de la intervención, o puede retirarse posteriormente con una gasa estéril. Normalmente no es necesario quitar los puntos.

### Datos logísticos

Conservación	Almacenar a temperaturas inferiores a 25° C, protegida de la humedad y del calor directo. No usar después de la fecha de caducidad.
Caducidad	5 años
Envasado	Sobre individual
Tipo embalaje	Caja de 36 unidades
Peso bruto	260 gr
Anchura	6,4 cm
Altura	11,8 cm
Profundidad	14 cm
Garantía de Calidad	MARCADO CE