

FICHA TÉCNICA

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre
NIF
Fabricante/Distribuidor

ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
A/28218675
DISTRIBUIDOR

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto

VICRYL* RAPIDE
VR2294

Indicaciones

VICRYL* RAPIDE está diseñado para ser usado en la aproximación de tejidos blandos, cuando tan sólo se requiere soporte a corto plazo de la herida, y en los casos en los que está indicada la rápida absorción de la sutura. Gracias a su perfil de absorción, VICRYL* RAPIDE está indicado en las suturas epidérmicas, especialmente en cirugía pediátrica, episiotomías, fimosias y cierres de la mucosa oral. Además, VICRYL* RAPIDE se usa con éxito en cirugía oftálmica para las suturas conjuntivales.

Descripción

La sutura quirúrgica sintética absorbible estéril VICRYL* RAPIDE, de rápida absorción está compuesta por un copolímero hecho en un 90 % de glicólido y en un 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es $(C_2H_2O_2)_m(C_2H_2O)_n$. Su pérdida de resistencia acelerada característica se obtiene gracias al uso de un material polimérico de peso molecular inferior al de la sutura VICRYL* normal (poliglactina 910). Las suturas VICRYL* RAPIDE se obtienen recubriendo el material de sutura trenzado con una mezcla compuesta por partes iguales de copolímero de glicólico y láctico (poliglactina 370) y estearato de calcio. Se ha demostrado que el copolímero Poliglactina 910 y la poliglactina 370 con estearato de calcio son no antigénicas, ni pirogénicas y producen tan sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. Las suturas VICRYL* RAPIDE están disponibles con tinte, mediante la adición de violeta D+C # 2 (Índice de color número 60725) durante la polimerización, o sin tinte. La sutura VICRYL* RAPIDE rápida se encuentra disponible en una amplia gama de calibres y longitudes, sin aguja o con agujas de acero inoxidable de tipos y tamaños variados. Los detalles completos pueden consultarse en el catálogo. La resistencia a la tracción del nudo de VICRYL* RAPIDE cumple con los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP) para las suturas de colágeno, así como con los requisitos de la Farmacopea Europea para las suturas absorbibles estériles ("Chorda Resorbilis Sterilis") (excepto por un ligero exceso de calibre en algunas referencias).

Contraindicaciones

Debido a la rápida pérdida de fuerza tensil, VICRYL* RAPIDE no debe ser usado donde se requiera la aproximación prolongada de tejidos bajo tensión o donde se requiera soporte de la herida o ligadura durante más de 7 días. La sutura VICRYL* RAPIDE no es para su uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos.

Reacciones adversas

Las contraindicaciones asociadas con el uso del VICRYL* RAPIDE incluyen la irritación local transitoria en el lugar de la herida, la respuesta inflamatoria transitoria ante el cuerpo extraño, el eritema y la induración en el caso de la absorción de las suturas subcuticulares. Como todos los cuerpos extraños VICRYL* RAPIDE puede aumentar una infección preexistente.

Referencias del producto

Referencia del fabricante
Referencia del distribuidor
Marca comercial

VR2294
VR2294
VICRYL* RAPIDE



Atributos y medidas

Longitud del hilo (cm)
Longitud de la aguja (mm)
Nº de agujas
Nº de suturas
Calibre del hilo (USP)
Tipo de aguja
Nombre de la aguja
Everpoint/Multipass/Standard
Fuerza tensil
Curvatura
Color
Tiempo de absorción
Método de esterilización

75
16
1
1
4-0
Triangular invertida
FS-3
Standard
50% a los 5 días
0% a los 10-14 días
3/8C
incolora
La absorción está esencialmente concluida en 42 días.
VICRYL* RAPIDE violeta está esterilizado por óxido de etileno. VICRYL* RAPIDE sin tinte está esterilizado mediante irradiación. No re-esterilizar! No usar la sutura si el envase está abierto o dañado! Desechar las suturas abiertas no utilizadas!

Datos logísticos

Almacenamiento
Caducidad
Unidades por caja
Peso (gr)
Ancho (cm)
Alto (cm)
Largo (cm)
Garantía de Calidad

Se recomienda almacenar a temperaturas inferiores a 25° C, protegida de la humedad y del calor directo. No usar después de la fecha
5 años
36
250
12
6,6
14,2
Marcado CE. Ausencia de látex

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios