

Foliodrape® Toalla de celulosa

Descripción general del producto/finalidad prevista

Las toallas de celulosa Foliodrape® son toallas absorbentes desechables para recoger el exceso de desinfectante durante los procedimientos de desinfección de la piel en el quirófano. Las toallas están hechas de celulosa y copolímero de acetato de vinilo/etileno como aglutinante. Los productos se comercializan como artículos básicos estériles y no estériles o como parte de sets de paños quirúrgicos estériles (sets de productos sanitarios). Si las toallas de celulosa Foliodrape® se entregan como productos no estériles, deben esterilizarse antes del uso conforme a la información facilitada.

Uso/indicación

Las toallas de celulosa Foliodrape® pueden utilizarse en distintos campos de aplicación/disciplinas, como cirugía general, ginecología, cirugía ortopédica y traumatológica, cirugía ORL, oral y maxilofacial, oftalmología, urología, cirugía cardiotorácica/cardiovascular y neurocirugía. Además, como componentes de set universales, pueden utilizarse para cualquier tipo de cirugía. Están destinados a un uso efímero (duración inferior a 60 min) por profesionales sanitarios.

Números de referencia

Nombre del producto	Núm. REF.	Tamaño	Otra información
Foliodrape® Toalla de celulosa	258 119/3	33 x 30 cm	Estéril

Riesgo residual, contraindicaciones y efectos adversos, advertencias

No se conocen contraindicaciones.

Producto estéril

No utilizar si el envase estéril o el producto están dañados o se ha abierto inadvertidamente el envase antes del uso.

Producto desechable

Reutilizar un producto sanitario desechable es peligroso. Reprocesar los productos para volverlos a utilizar puede dañar gravemente su integridad y sus prestaciones. Información disponible si se solicita.

Eliminación del producto

Para minimizar el riesgo de infecciones peligrosas o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos Foliodrape® deben eliminarse de acuerdo con los procedimientos contemplados en las leyes, normas y reglamentos aplicables sobre prevención de infecciones locales. Se recomienda incinerar todos los desechos infectados.

El material no contaminado, como el papel de desecho, el embalaje y los materiales no estériles pero no contaminados biológicamente se pueden eliminar por separado. Se debe disponer de contenedores separados para los distintos materiales de desecho que se generen, de modo que el personal pueda clasificarlos a medida que se van desechando.

Características de las prestaciones del producto

La gama de productos Foliodrape® se ha desarrollado siguiendo los más altos estándares de calidad para garantizar la seguridad y prevenir infecciones.

Todos los productos están libres de sustancias como las CMR/PBT/mPmB (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, etc.). No contienen retardantes de llama (como bifenilos polibromados, etc.).

Características del material

Composición	Detalles
Composición del material:	celulosa y copolímero de acetato de vinilo/etileno como aglutinante
Peso básico:	aprox. 60 g/m ²

Ficha de datos técnicos

Foliodrape® Toalla de celulosa

Capacidad de absorción 4 g/100 cm²
(conforme a DIN 53 923):

Esterilización: Con gas óxido de etileno conforme a EN 556-1 y EN 11135-1

Características del producto

Nombre del producto	Núm. REF.	Tamaño del producto
Foliodrape® Toalla de celulosa	258 119/3	33 x 30 cm


Ficha técnica

La ficha técnica de Foliodrape® describe la finalidad prevista de este producto tal y como demuestra la evaluación clínica.

La información sobre seguridad facilitada por el fabricante autorizado en la ficha técnica se basa en la documentación de gestión de riesgos y presenta detalladamente todas las advertencias y precauciones de acuerdo con los nuevos requisitos de las normas relativas al producto.

N.º de lote con código de 8 dígitos

p. ej.:

	0	12	XXXXX
año	Semana de fabricación	Solo para uso interno	

Fecha de fabricación

p. ej.:

	2020	04	07
año	mes	día	

Fecha de caducidad

p. ej.:

	2025	04	07
año	mes	día	

Periodo de validez: 5 años

Identificador único de producto (UDI)



 Sistema de barrera estéril simple

Sistema de barrera estéril simple

No utilizar si el sistema de barrera estéril del producto o el envase están dañados



Producto desechable



Mantener en lugar seco



Esterilizado con óxido de etileno



No estéril




Fabricante autorizado

 PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 HEIDENHEIM, GERMANY


Ficha de datos técnicos

Foliodrape® Toalla de celulosa

Eliminar los desechos de forma adecuada 


Símbolos de reciclado: cartón corrugado/polietileno de baja densidad



El fabricante contribuye al reciclaje de envases 

Número de identificación del comercio internacional



Flecha indicativa de por dónde abrir el envase 

Nombre y finalidad prevista del producto **Toalla de celulosa
Cellulose towel**

Número de catálogo/referencia **REF**

Pictograma con el aspecto y las dimensiones del producto



Condiciones de transporte y almacenamiento

Transporte y almacenamiento en condiciones adecuadas para las regiones climáticas I-IVa según el Informe Técnico n.º 953, 2009, de la OMS.

Datos logísticos

Nombre del producto	Núm. REF.	Tamaño de la bolsa pelable [mm]	Productos por bolsa rasgable	Bolsas pelables por dispensador	Tamaño del dispensador	N.º EAN del dispensador	Dispensadores por caja
Foliodrape® Toalla de celulosa	258 119/3	Tamaño: XS 135 x 215	2	25	Tamaño: S 215 x 136 x 185	4049500244060	4

Fecha de la última revisión: 08/06/2020