

# Lámpara de blanqueamiento

## Manual de instalación

### (M-60)



# Índice

<b>1. Introducción.....</b>	<b>3</b>
1.1. Introducción del producto .....	3
1.2. Contenido.....	3
1.3. Características.....	4
<b>2. Funciones.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Modo de uso.....</b>	<b>5</b>
3.2 Instrucciones de montaje.....	6
<b>4 Seguridad.....</b>	<b>7</b>
<b>5.Responsabilidad.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Garantía.....</b>	<b>8</b>

# 1. Introducción

## 1.1 Introduction of products

Queridos clientes,

Gracias por la compra de productos de nuestra empresa , este producto es una máquina de blanqueamiento de dientes especial para gabinete dental , que tiene una alta eficiencia en su diseño, gracias a la cabeza de ganso con ángulo ajustable.

## 1.2 Contenido

1.Cable de corriente	1 pieza
2. Retractor de boca	1 pieza
3 . Gafas	2 piezas
4. Protector de la lámpara	20 piezas
5. Lámpara de aluminio	1 pieza
6. Juntas de silicona	2 pieza
7. Herramientas de montaje	1 set
8. Disco con manual	1 pieza

## 1.3 Características

- 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
- Longitud de onda 430 -490 nm.
- Modelo ergonómico.
- Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- Indicador digital con información de audio.

- 100-240V, 50/60Hz.
- Temporizador automático.
- Adaptable al sillón dental.

## 2.Funciones

Amplio espectro : 420nm ~ 472.5nm ( lámparas de host )


La potencia de salida de luz: hasta 2000 MW / cm<sup>2</sup>

100-240V , 50 / 60Hz , 1.2 A para uso normal.


Max . Radio de trabajo : 50 cm

Alta uniformidad en alta potencia de la luz.


Distancia entre el diente y la iluminación (mm)	Uniformidad
1mm	Sobre 80%
3mm	Sobre 80%
5mm	Sobre 80%
10mm	Sobre 80%

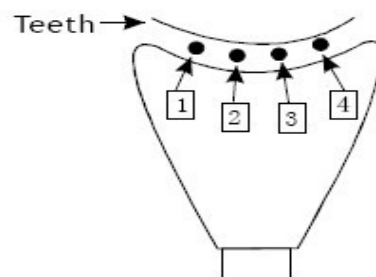


### 3. Modo de uso

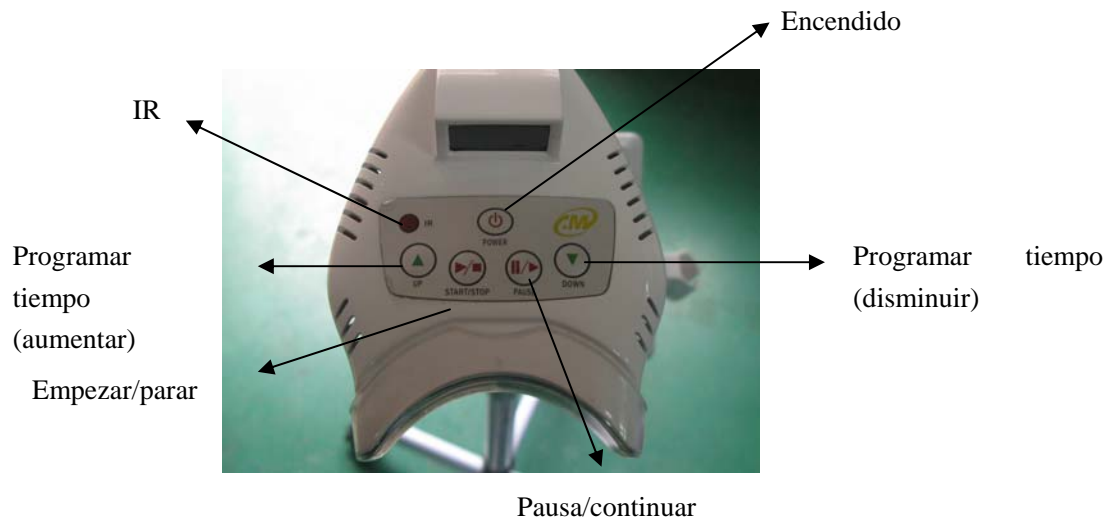

### Remote control

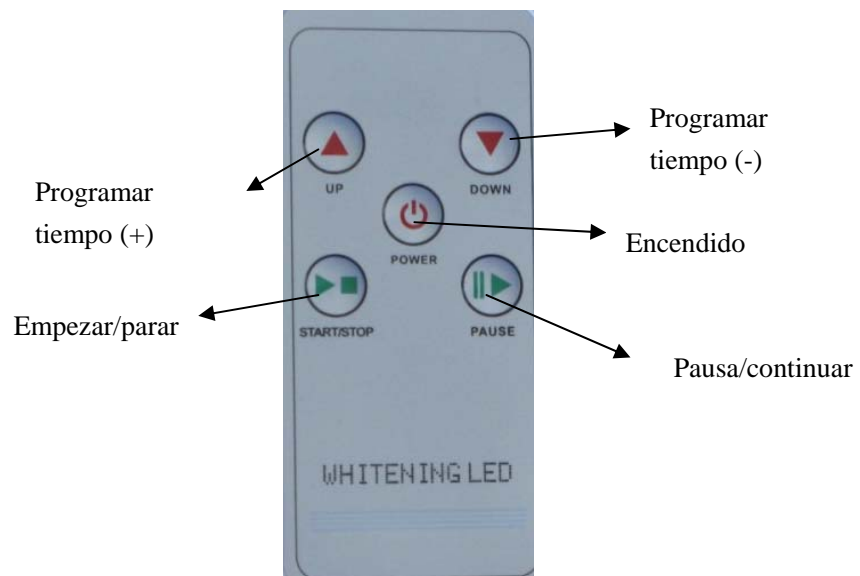

### 3.2 Instrucciones de montaje

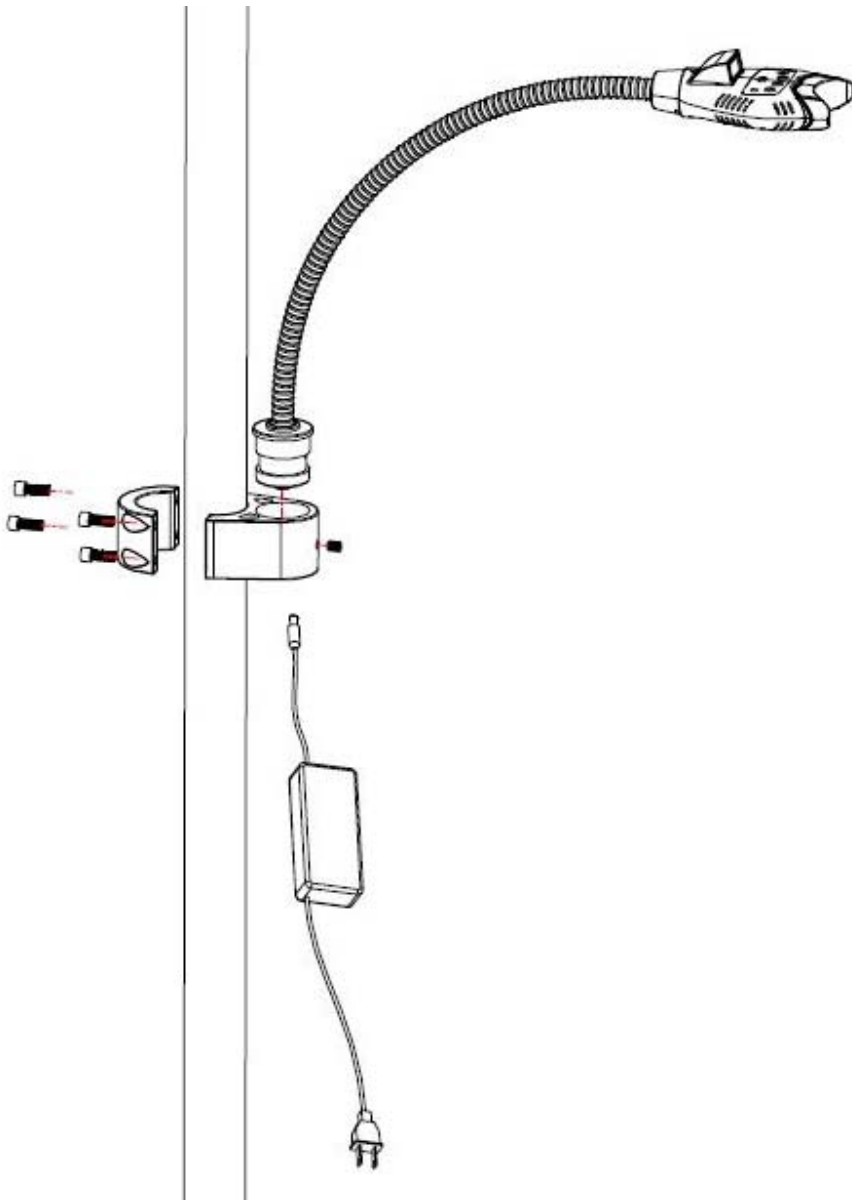

## 4. Seguridad

Antes de la instalación y puesta en marcha de la unidad , lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en este documento , como con todos los dispositivos técnicos , la función y el funcionamiento seguro de la unidad dependen de la los usuarios y del cumplimiento de las recomendaciones de seguridad que se presentan en este manual de instrucciones.

**A) PRECAUCIÓN :** Es importante tener en cuenta las siguientes precauciones :  
No dirija la luz directamente sobre o hacia la piel sin protección.

**B ) PRECAUCIÓN :** Las personas con un historial de fotosensibilidad o que están usando fármacos fotosensibilizantes no deben ser expuestos a la luz de esta unidad.

**C ) PRECAUCIÓN :** Este es un equipo que no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire u óxido nítrico.

**D ) PRECAUCIÓN :** Por favor, no mirar en la luz emitida por la máquina cuando está en uso. Por favor asegúrese de usar gafas .

**E ) PRECAUCIÓN :** Para el ángulo de curvatura , por favor no exceda de 90 grados , o el codo se puede romper fácilmente o causar ruido en el futuro.

## 5. Responsabilidad

Es responsable de los efectos sobre la seguridad , la fiabilidad y el desarrollo de este producto sólo si:

A) La instalación eléctrica de la sala de operaciones cumple de requerimientos exigidos por ley .

B ) El equipo se utiliza de acuerdo con estas instrucciones de uso .

# Certificado de garantía

Gracias por comprar nuestro producto. Para asegurar que nuestra empresa pueda ofrecerle la máxima calidad post-venta, rellene los siguientes campos:

**. Condiciones de mantenimiento del producto:**

1. El producto, que usted ha comprado, tiene un año de garantía de mantenimiento, en este plazo, puede solicitar, al vendedores o a nuestra empresa, información y mantenimiento del producto.
2. Las siguientes situaciones no serán cubiertas por la garantía del producto, suponiendo la reparación un coste para el cliente:
  - 1) Uso inadecuado de la lámpara, o no se ha utilizado el manual del usuario.
  - 2) Cuando otra empresa no autorizada ha reparado nuestro producto.
  - 3) Por el traslado o mal uso del cliente.
  - 4) Accidente por un desastre inesperado (por ejemplo: fuego, agua, etc.)
3. Si el instalador ha verificado las gestiones de calidad del transporte e instalación, y no ha podido solventar el problema. Por favor, contacte con el vendedor o con la empresa de mantenimiento.
4. Teléfono de atención al cliente: + 86-755-33813513

**. Por favor, rellene los siguiente elementos (rellene obligatoriamente las casillas marcadas con \*):**

\*Producto: \_\_\_\_\_ \*Producto No.: \_\_\_\_\_

Condiciones de mantenimiento: **UN AÑO**

Mantenimiento NO.: \_\_\_\_\_

\*Nombre de la compañía: \_\_\_\_\_

\*Dirección: \_\_\_\_\_

\*Teléfono: \_\_\_\_\_ \*Fax: \_\_\_\_\_

Nombre del vendedor: \_\_\_\_\_

\*Fecha de compra: \_\_\_\_\_ \*nº de factura: \_\_\_\_\_

Motivo	Método de mantenimiento	Fecha de mantenimiento