

Lámpara de blanqueamiento

Manual de instalación

(M-66)



Índice

1.	Seguridad.....	3
2.	Instrucciones de instalación.....	4
3.	Características del producto.....	7
4.	Especificaciones del producto.....	7
5.	Contenido.....	8
6.	Modo de uso.....	8
7.	Certificado de Garantía.....	9


Seguridad

TENGA EN CUENTA:

Antes de la instalación y puesta en marcha de la unidad , lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en el presente documento. Al igual que con todos los dispositivos técnicos , la función y el funcionamiento seguro de la unidad dependen del cumplimiento de los usuarios de las recomendaciones de seguridad que se presentan en estas instrucciones.

- ▲ PRECAUCIÓN : no apuntar la luz directamente sobre o hacia gingival sin protección en la piel .
- ▲ PRECAUCIÓN : Las personas con un historial de fotosensibilidad o que estén utilizando medicamentos fotosensibilizantes no deben ser expuestos a la luz de esta unidad.
- ▲ PRECAUCIÓN : Este equipo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas de anestésicos con aire u óxido nitroso.
- ▲ PRECAUCIÓN : No miren directamente a la luz emitida por la máquina cuando está en uso o se hará daño en los ojos , asegúrese de usar gafas .
- ▲ PRECAUCIÓN : El ángulo de la curva en uso por favor que no exceda de 90 grados o el codo se puede romper fácilmente.

Instrucciones de instalación(一)

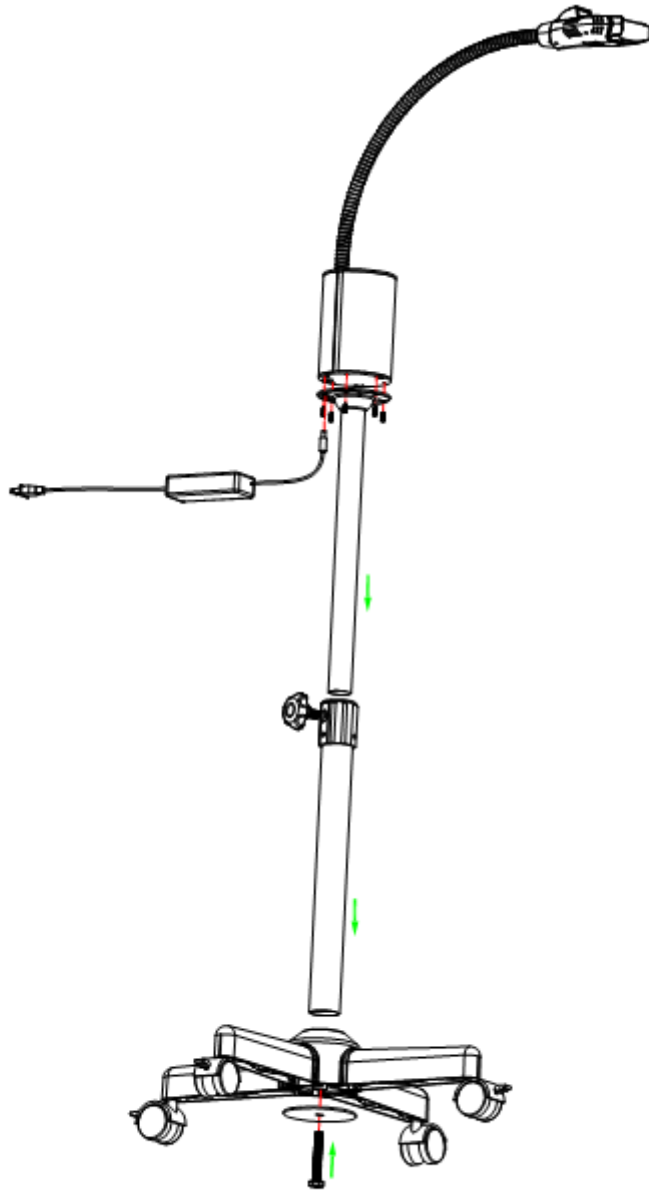


M66 Assembly diagram


Advertencia : Cuando este tornillo está suelto , el resorte se salga.



Manual de botones

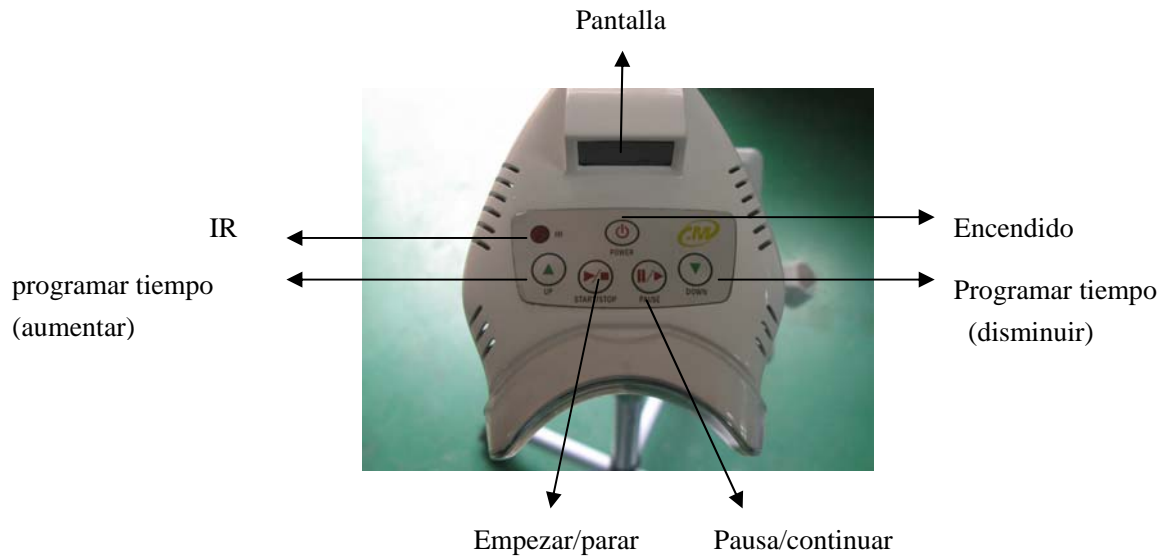

Manual mano a distancia

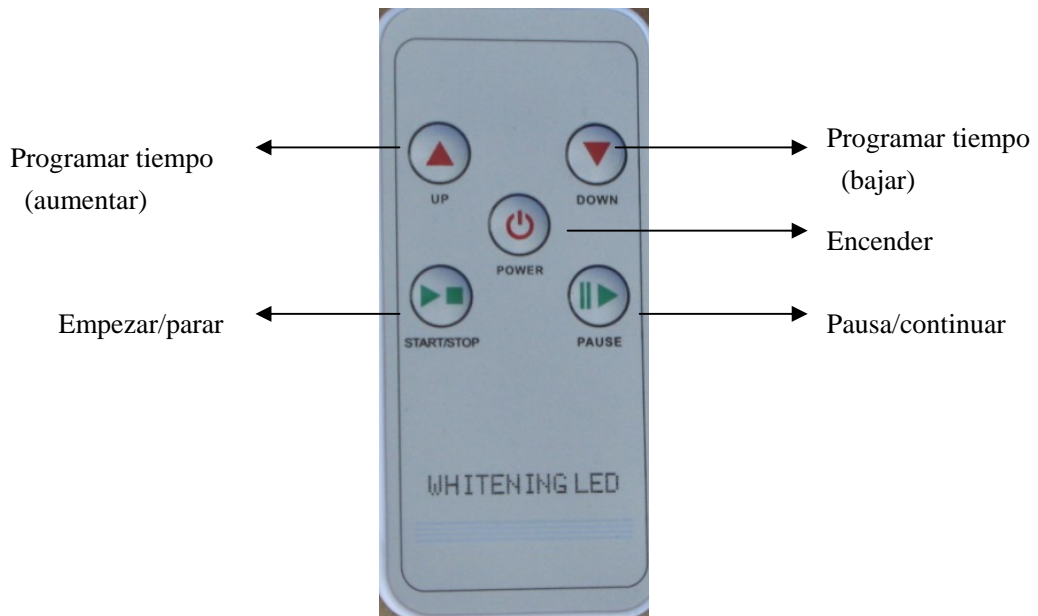

Características del producto


- ◆ Combinación de azul de alta potencia led .
- ◆ Modelo ergonómico.
- ◆ Base móvil.
- ◆ 3 Leds alta producción de energía con 2.327 W.
- ◆ Longitud de onda luz azul 430 - 490 nm, luz roja 610 - 650 nm
- ◆ Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- ◆ Energía adaptable según las necesidades del paciente.
- ◆ Temporizador automático.
- ◆ Indicador digital con información de audio .
- ◆ Selección automática de alimentación inteligente : 100 ~ 240V 50/60 Hz para uso normal.
- ◆ Alta uniformidad de la salida de luz.

Especificaciones del producto

- ◆ Espectro de luz: 420nm~472.5nm
- ◆ Potencia de salida de la luz: 2000 mW/cm
- ◆ 100-240V,50/60Hz
- ◆ Peso 6.74Kg
- ◆ Max . Radio de trabajo: 50cm

Distancia entre el diente y la iluminación (mm)	Uniformidad
1mm	Sobre 80%
3mm	Sobre 80%
5mm	Sobre 80%
10mm	Sobre 80%

DIENTES

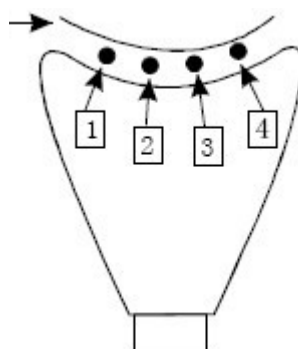

Contenido

M-66	1 pcs
M-66 taburetes para los pies	1 set
12V	1 pcs
Cable de corriente	1 pcs
Gafas	2 pcs
Protector de lámpara	20 pcs
Mando de control remoto	1 pcs
Retractor bucal	1 pcs
Herramientas de montaje	1 set
Disco con manual	1 pcs

Modo de uso

Encender la lámpara de blanqueamiento dental

- A) Enchufe la lámpara.
- B) Encienda el interruptor.



Enchufe de alimentación.

Advertencia:

Hemos fijado un fusible de seguridad en ella , si la corriente se sobrecarga, se cortará de inmediato. Al cambiarlo por un fusible nuevo , todo funcionará sin problemas, como de costumbre.

Pasos a seguir para empezar a blanquear los dientes:

- A) : Encender / apagar la luz presionando el botón START / STOP .
- B) : Controlar la emisión de luz pulsando el botón Pausa/Detener. El tiempo restante para blanquear brillará en el indicador digital. Presione de nuevo el botón Pausa, empezará a emitir luz y el tiempo contará continuamente.
- C) : Baje o aumente el tiempo para ajustar el blanqueamiento. Cuenta con 5 minutos de memoria , el tiempo de blanqueamiento más largo es de 30 minutos para cada ciclo.

1. Sonido de advertencia

A) Después del arranque, la máquina emitirá un pitido cada minuto.

B) Se oye tres pitidos después del acabado.

2.Marco de enfriamiento

A) Para garantizar que todos los LED trabajan en la temperatura normal, en proceso de blanqueamiento , fijamos una alta eficiencia y un ventilador para expulsar el aire caliente.

B) Además , hemos incorporado protección de temperatura inteligente, cuando se llegue a una alta temperatura se apaga la alimentación automáticamente , después del enfriamiento , todo vuelve a funcionar correctamente .

3.Responsabilidad

Es responsable de los efectos sobre la seguridad , la fiabilidad y el desarrollo de este producto sólo si:

A) La instalación eléctrica de la sala de operaciones cumple de requerimientos exigidos por ley .

B) El equipo se utiliza de acuerdo con estas instrucciones de uso .

Certificado de garantía

Gracias por comprar nuestro producto. Para asegurar que nuestra empresa puede ofrecer la máxima calidad post-venta para usted, rellene los siguientes campos:

. Condiciones de mantenimiento del producto:

1. El producto, que usted ha comprado, tiene un año de garantía de mantenimiento, en este plazo, puede solicitar al vendedores o a nuestra empresa para información y mantenimiento del producto.
2. Las siguientes situaciones no serán cubiertas por la garantía del producto, suponiendo la reparación un coste para el cliente:
 - 1) Uso inadecuado de la lámpara, o no se ha utilizado el manual del usuario.
 - 2) Cuando otra empresa no autorizada ha reparado nuestro producto.
 - 3) Por el traslado o mal uso del cliente.
 - 4) Accidente por un desastre inesperado (por ejemplo: fuego, agua, etc.)
3. Si el instalador ha verificado las gestiones de calidad del transporte e instalación, y no ha podido solventar el problema. Por favor, contacte con el vendedor o con la empresa de mantenimiento.
4. Teléfono de atención al cliente: + 86-755-33813513

. Por favor, rellene los siguientes elementos (rellene obligatoriamente las casillas marcadas con *):

*Producto: _____ *Producto No.: _____

Condiciones de mantenimiento: **UN AÑO**

Mantenimiento NO.: _____

*Nombre de la compañía: _____

*Dirección: _____

*Teléfono: _____ *Fax: _____

Nombre del vendedor: _____

*Fecha de compra: _____ *nº de factura: _____

Motivo	Método de mantenimiento	Fecha de mantenimiento