

# Lámpara de blanqueamiento

## Manual de instalación

### (M-69)



# Índice

<b>1.</b>	<b>Seguridad.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Instrucciones de instalación.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Características del producto.....</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Especificaciones del producto.....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Contenido.....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Modo de uso.....</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Certificado de garantía.....</b>	<b>13</b>


# Seguridad

## **TENGA EN CUENTA:**

Antes de la instalación y puesta en marcha de la unidad , lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en el presente documento. Al igual que con todos los dispositivos técnicos , la función y el funcionamiento seguro de la unidad dependen del cumplimiento de los usuarios de las recomendaciones de seguridad que se presentan en estas instrucciones.


- ▲ PRECAUCIÓN : no apuntar la luz directamente sobre o hacia gingival sin protección en la piel .
- ▲ PRECAUCIÓN : Las personas con un historial de fotosensibilidad o que estén utilizando medicamentos fotosensibilizantes no deben ser expuestos a la luz de esta unidad.
- ▲ PRECAUCIÓN : Este equipo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas de anestésicos con aire u óxido nitroso.
- ▲ PRECAUCIÓN : No miren directamente a la luz emitida por la máquina cuando está en uso o se hará daño en los ojos , asegúrese de usar gafas .
- ▲ PRECAUCIÓN : El ángulo de la curva en uso por favor que no exceda de 90 grados o el codo se puede romper fácilmente.



## Instrucciones de instalación (I)


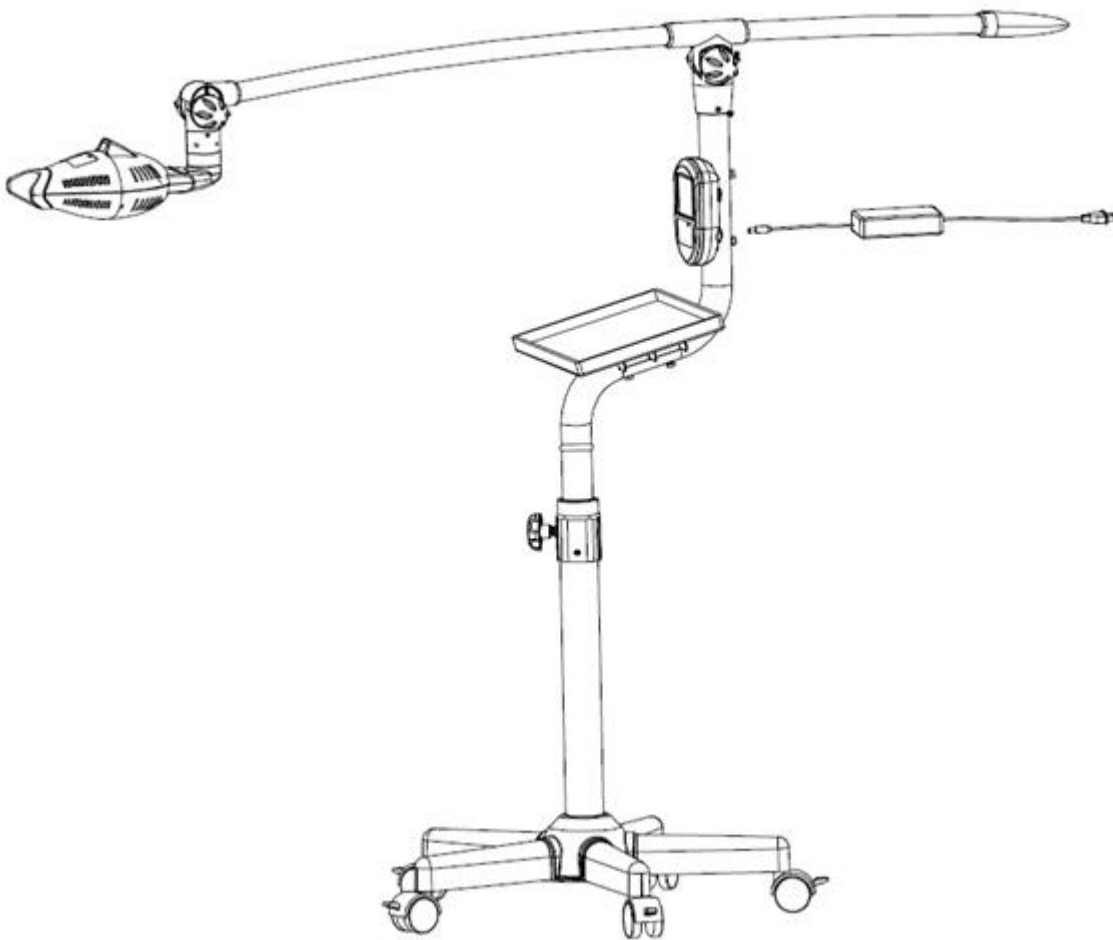


**Advertencia : Cuando este tornillo está suelto, el muelle se suelta.**


(II)

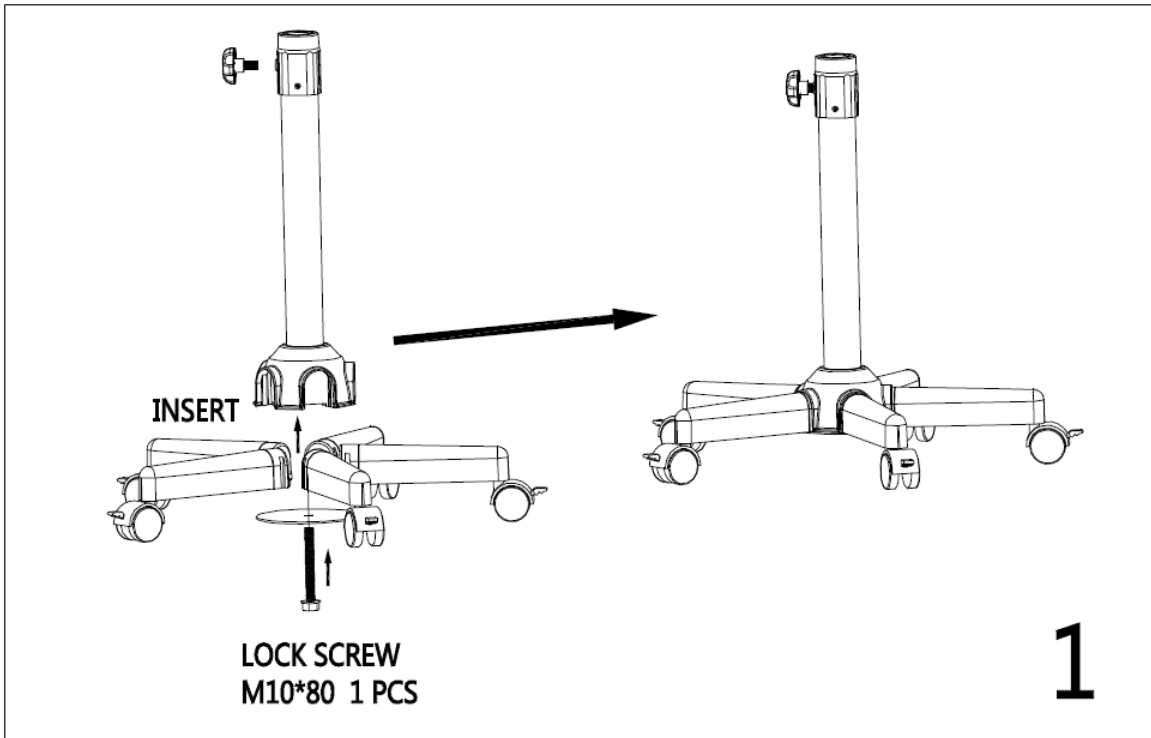

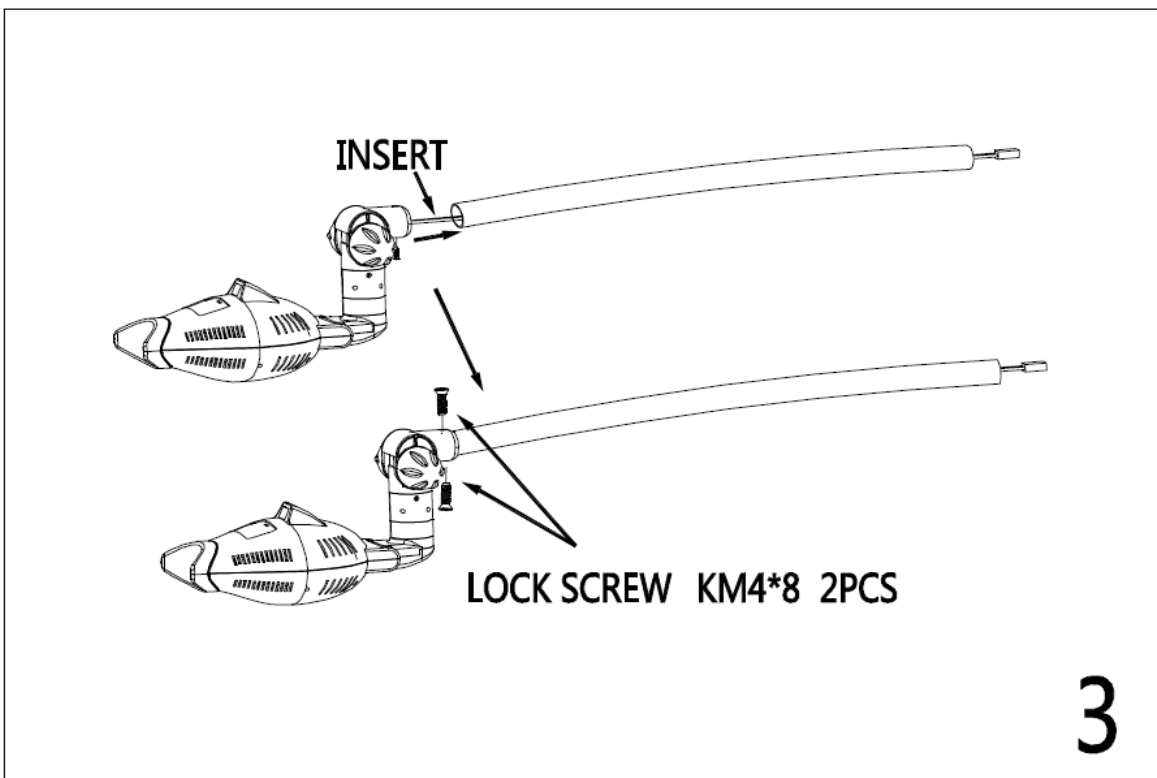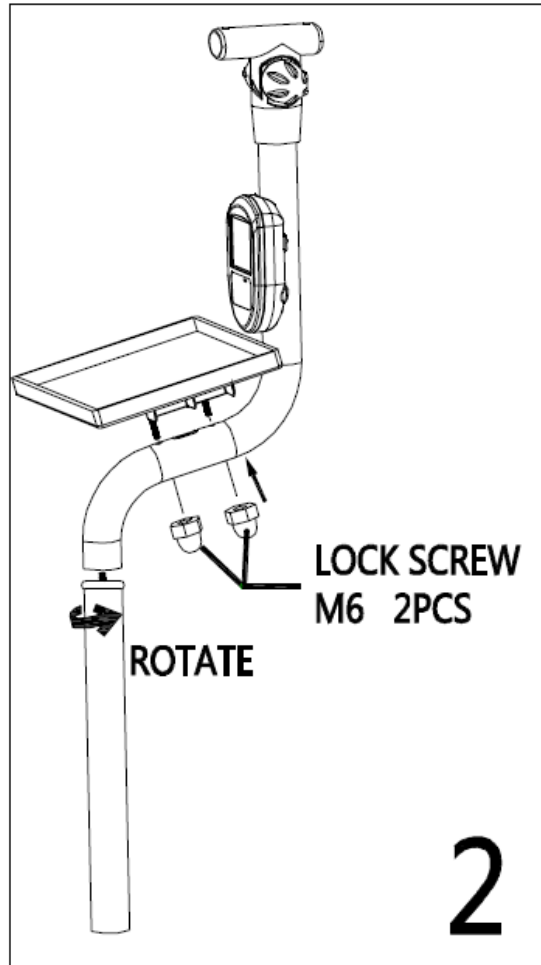


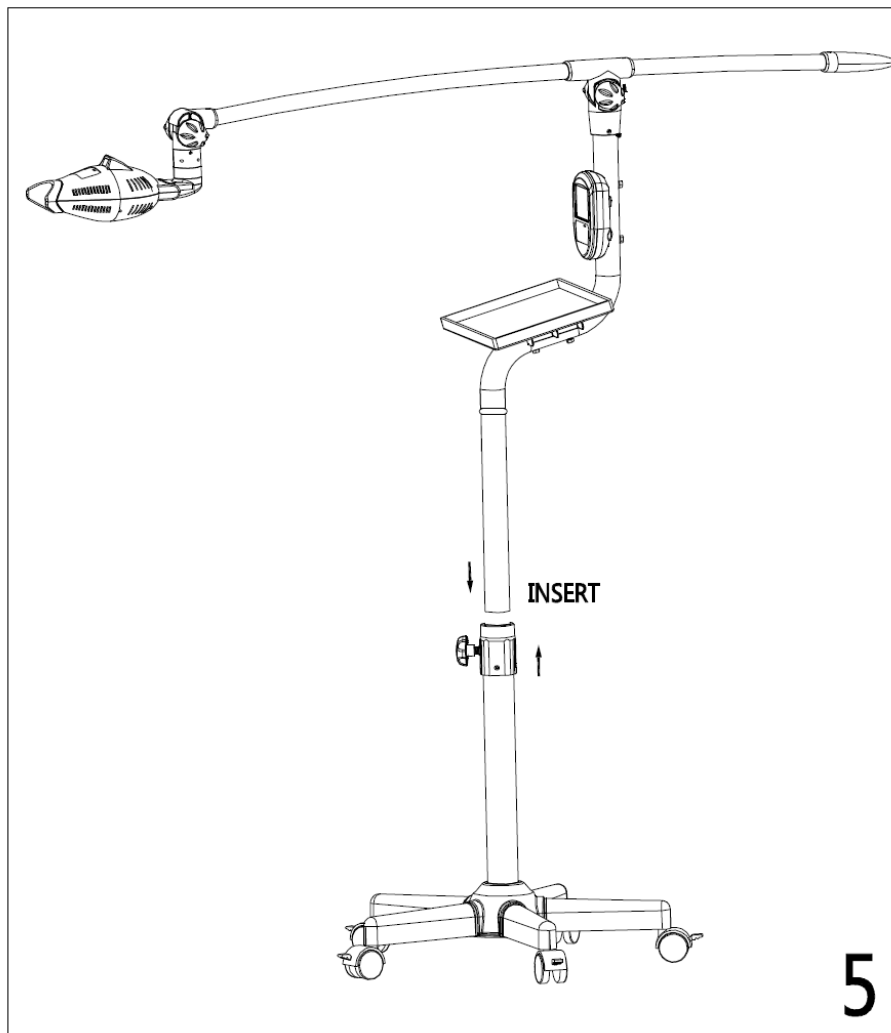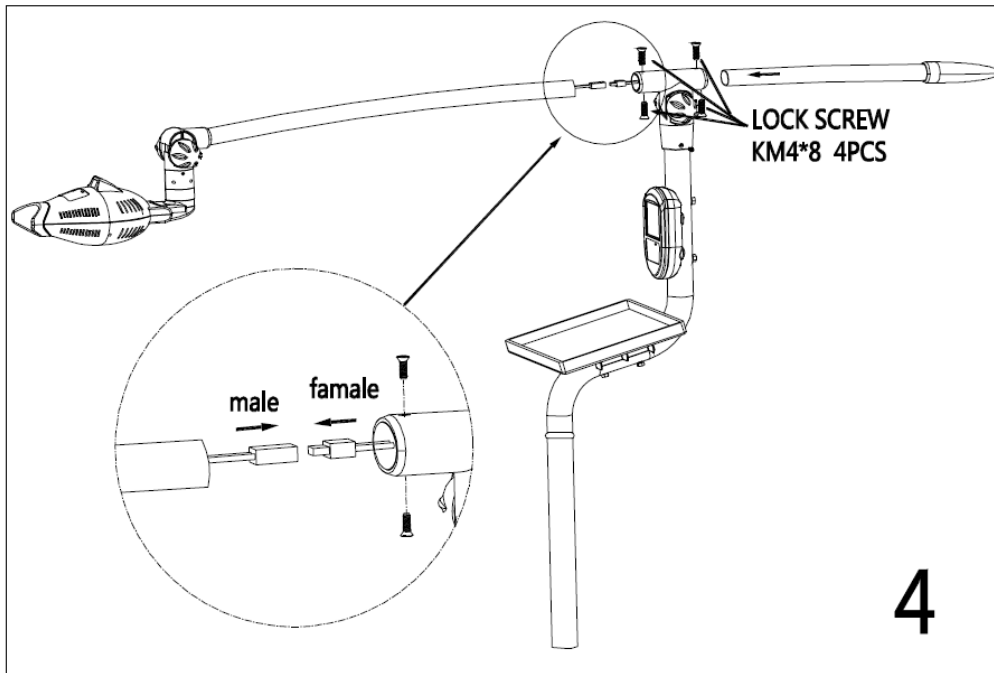

## Manual de botones

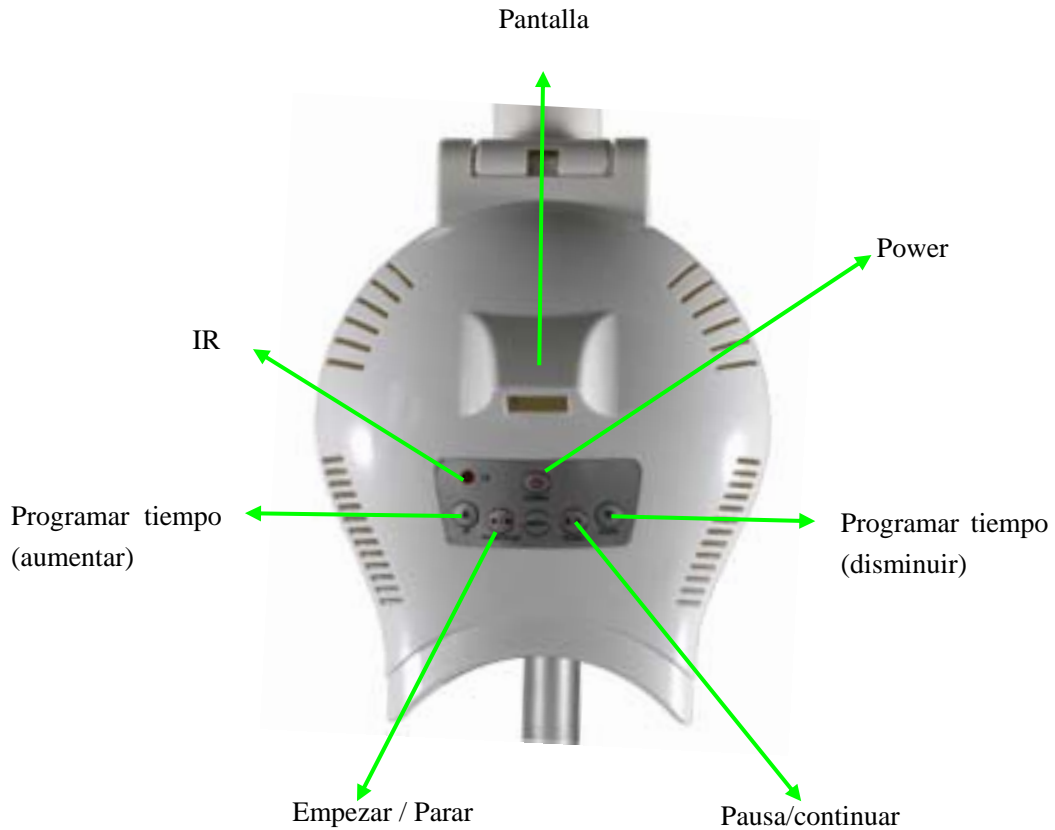

## Manual mando a distancia

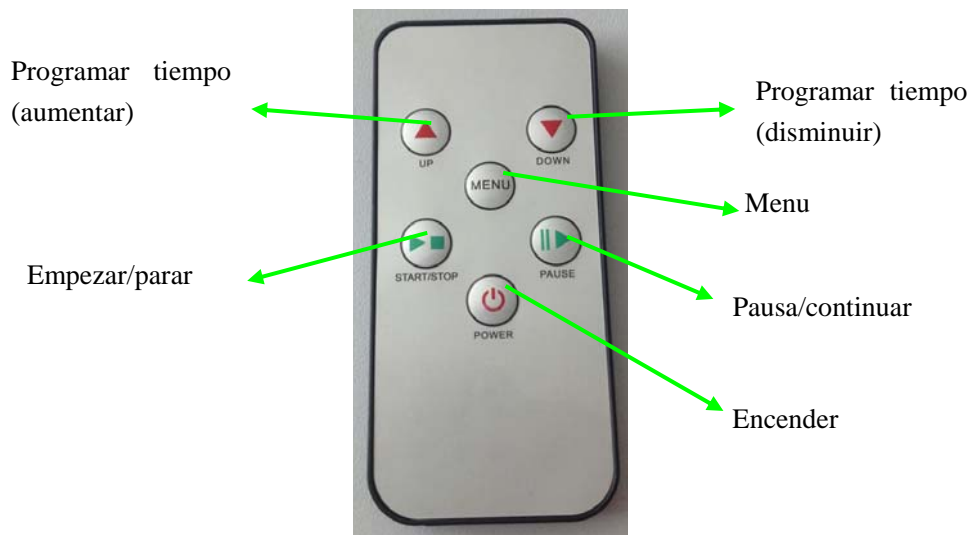

**Aviso: este dispositivo es compatible con dos idiomas : Inglés y Chino. Pulse botón " menú" , pulsación larga , usar "arriba" o "abajo " para pasar , y a continuación, pulse "Menú " para guardar el idioma.**



## Características del producto

- ◆ Modelo ergonómico.
- ◆ Base móvil.
- ◆ 3 Leds alta producción de energía con 2.327 W.
- ◆ Longitud de onda luz azul 430 - 490 nm, luz roja 610 - 650 nm
- ◆ Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- ◆ Energía adaptable según las necesidades del paciente.
- ◆ Pequeña base, para facilitar el trabajo.
- ◆ Indicador digital con información de audio.
- ◆ Temporizador automático.

## Especificaciones del producto

- ◆ Espectro de luz: Azul :420nm~472.5nm - Roja :610nm~650nm.
- ◆ Potencia de salida de la luz: Max. 2327 mW/cm
- ◆ 100-240V,50/60Hz
- ◆ Peso: 8.52Kg
- ◆ Max.Radio de trabajo:50cm

Distancia entre el diente y la iluminación (mm)	Uniformidad
1mm	Sobre80%
3mm	Sobre80%
5mm	Sobre80%
10mm	Sobre80%

## Contenido

M-69	1 pcs
M-69 Taburete para los pies	1 set
12V adaptador	1 pcs
Cable de corriente	1 pcs
Gafas	2 pcs
Protector de lámpara	20 pcs
Mando de control remoto	1 pcs
Retracto bucal	1 pcs
Herramienta de montaje	1 set
Disco con manual	1 pcs

## Modo de uso

### Encender la lámpara de blanqueamiento dental



Interruptor

Conexión de corriente

A) Enchufe la lámpara.

B) Encienda el interruptor.

### **Advertencia:**

**Hemos fijado un fusible de seguridad en ella , si la corriente se sobrecarga, se cortará de inmediato. Al cambiarlo por un fusible nuevo , todo funcionará sin problemas, como de costumbre.**

## Pasos a seguir para empezar a blanquear los dientes

A) Pulse el botón de encender



B) Presione “menu” para establecer tiempo, brillo y el LED . Utilice botón arriba o abajo para ajustar el tiempo de blanqueamiento , brillo y LED , el clico de blanqueamiento más largo es de 30 minutos.



**Tenga en cuenta: ajuste del LED con rojo , azul , rojo + azul.**



Rojo

Rojo+Azul

Azul

C) Turn on/off the light by pressing the START/STOP button.

B) : Stop the time counting and emitting light by pressing the Pause button. The remaining whitening time will sparkle on the digital indicator. Press the Pause button again, light will emit and time will count continually.

D) The screen date is displaying synchronization to the host

C) Si ha terminado el blanqueamiento pulse el botón Parar.

D) Si necesita pausarla, pulse el botón Pausa/continuar, el tiempo restante se marcará en la pantalla digital. Si desea continuar pulse de nuevo Pausa/continuar, la lámpara continuará funcionando con la programación.

E) La pantalla muestra la fecha de sincronización.



En estos botones también puede fijar brillo, tiempo y LED.

### 1. Sonido de advertencia

A) Después del arranque, la máquina emitirá un pitido cada minuto.

B) Se oye tres pitidos después del acabado.

### 2. Marco de enfriamiento

A) Para garantizar que todos los LED trabajan en la temperatura normal, en proceso de blanqueamiento, fijamos una alta eficiencia y un ventilador para expulsar el aire caliente.

B) Además, hemos incorporado protección de temperatura inteligente, cuando se llegue a una alta temperatura se apaga la alimentación automáticamente, después del enfriamiento, todo vuelve a funcionar correctamente.

### 3. Responsabilidad

Es responsable de los efectos sobre la seguridad, la fiabilidad y el desarrollo de este producto sólo si:

A) La instalación eléctrica de la sala de operaciones cumple de requerimientos exigidos por ley.

B) El equipo se utiliza de acuerdo con estas instrucciones de uso.

# Certificado de garantía

Gracias por comprar nuestro producto. Para asegurar que nuestra empresa puede ofrecer la máxima calidad post-venta para usted, rellene los siguientes campo:

**. Condiciones de mantenimiento del producto:**

1. El producto, que usted ha comprado, tiene un año de garantía de mantenimiento, en este plazo, puede solicitar al vendedores o a nuestra empresa para información y mantenimiento del producto.

2. Las siguiente situaciones no serán cubiertas por la garantía del producto, suponiendo la reparación un coste para el cliente:

- 1) Uso inadecuado de la lámpara, o no se ha utilizado el manual del usuario.
- 2) Cuando otra empresa no autorizada ha reparado nuestro producto.
- 3) Por el traslado o mal uso del cliente.
- 4) Accidente por un desastre inesperado (por ejemplo: fuego, agua, etc.)

3. Si el instalador ha verificado las gestiones de calidad del transporte e instalación, y no ha podido solventar el problema. Por favor, contacte con el vendedor o con la empresa de mantenimiento.

4. Teléfono de atención al cliente: + 86-755-33813513

**. Por favor, rellene los siguiente elementos (rellene obligatoriamente las casillas marcadas con \*):**

\*Producto: \_\_\_\_\_ \*Producto No.: \_\_\_\_\_

Condiciones de mantenimiento: **UN AÑO**

Mantenimiento NO.: \_\_\_\_\_

\*Nombre de la compañía: \_\_\_\_\_

\*Dirección: \_\_\_\_\_

\*Teléfono: \_\_\_\_\_ \*Fax: \_\_\_\_\_

Nombre del vendedor: \_\_\_\_\_

\*Fecha de compra: \_\_\_\_\_ \*nº de factura: \_\_\_\_\_

Motivo	Método de mantenimiento	Fecha de mantenimiento