



Agente de aclarado para el procesamiento automático de instrumental termoestable y termosensible

Concentrado líquido

Aplicación:

- Aclarado de productos médicos como instrumental quirúrgico incluyendo microinstrumental, instrumental oftalmológico, utensilios para anestias, contenedores, endoscopios flexibles, implantes así como biberones en equipos de limpieza y desinfección.

Características especiales:

- Garantiza un secado rápido sin manchas ni rayas debido a sus buenas propiedades humectantes.
- Permite acortar notablemente el tiempo de secado por lo que se reduce la duración global del proceso de limpieza y el consumo de energía.
- Embalajes estériles de papel o folio no se ven afectados por el contacto con productos médicos tratados con neodisher MediKlar.
- Para accesorios de utensilios para anastias de polisulfona o sulfuro de polifenileno pueden sufrir fisuras por presión en el contacto con neodisher MediKlar special. Por tanto, se requiere una prueba previa.

Aplicación y dosificación:

neodisher MediKlar se usa en el aclarado final en equipos de limpieza y desinfección. Dosificar 0,3 - 1,0 ml/l dependiendo del instrumental y de la calidad del agua. Añadir al agua del aclarado final. Recomendamos el uso de equipos de dosificación apropiados.

Para evitar manchas de agua y proteger objetos de aluminio anodizado recomendamos utilizar agua desionizada en el aclarado final.

Consejos de uso:

- Solo para uso profesional.
- No mezclar con otros productos.
- Antes de cambiar de producto aclarar el sistema de dosificación incluidos todos los tubos con agua.
- Tener en cuenta las recomendaciones de uso del

fabricante del instrumental según norma DIN EN ISO 17664.

- Respetar las instrucciones de uso de los fabricantes de los equipos de limpieza y desinfección.

Toxicología:

Disponemos de una valoración toxicológica de acuerdo con la norma EN ISO 10993-1. En función de esta valoración neodisher MediKlar puede ser clasificado como toxicológicamente inocuo. Si lo desean pueden solicitar copia de este documento.

Datos técnicos:

pH	Aprox. 5,7 (0,3 – 1,0 ml/l determinado en agua desionizada, 20 °C)
Densidad	1,0 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidad	< 50 mPa s (concentrado, 20 °C)

Composición:

De acuerdo con las recomendaciones de la Directiva Europea 648/2004/CE sobre detergentes:

< 5 % tensoactivos aniónicos, policarboxilatos
5 - 15 % tensoactivos no iónicos

Contiene conservantes (Quaternium 15).

Marcado CE:

neodisher MediKlar cumple las exigencias de la Directiva Europea 93/42/CEE, anexo I sobre productos médicos.

Almacenamiento:

Almacenar a una temperatura entre 0 °C y 30 °C. Con un almacenaje adecuado se puede usar durante 2 años.

Fecha de caducidad: ver este símbolo .

Consejos y medidas de seguridad:

neodisher MediKlar no está clasificado como preparado peligroso, de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos.

Desechar solo cuando el contenedor esté vacío y cerrado. Para la eliminación de residuos de producto consultar la hoja de seguridad.

Más información sobre seguridad y medio ambiente en las hojas de seguridad de la Unión Europea. Las podrá



neodisher[®] MediKlar

encontrar en la página web www.drweigert.com bajo la sección "Service".

MB 4045 / 2-5
05/2012