

DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO neodisher® MultiZym

CONCENTRACIONES DE USO PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, ENDOSCOPIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Litros de Agua	5 Litros	10 Litros	15 Litros	20 Litros	25 Litros	30 Litros
<i>neodisher® Multizym</i>	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50	60 ml

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

- 1°. Llenar la cubeta de agua (a **temperatura entre 15-55°C**) hasta alcanzar el volumen deseado.
- 2°. Dosificar la cantidad de neodisher® Multizym en función de los litros de agua utilizados.
- 3°. Limpiar: manualmente, por inmersión o en ultrasonidos.
Tiempo de contacto: **5 minutos**.
- 4°. Aclarar con abundante agua a temperatura ambiente con calidad mínima de potable y secar.



**5 Litros
de Agua
(15-55°C)**



**10 ml
neodisher®
MultiZym**



www.area-medica.com

93 409 53 00