


Ahora con
nueva cánula

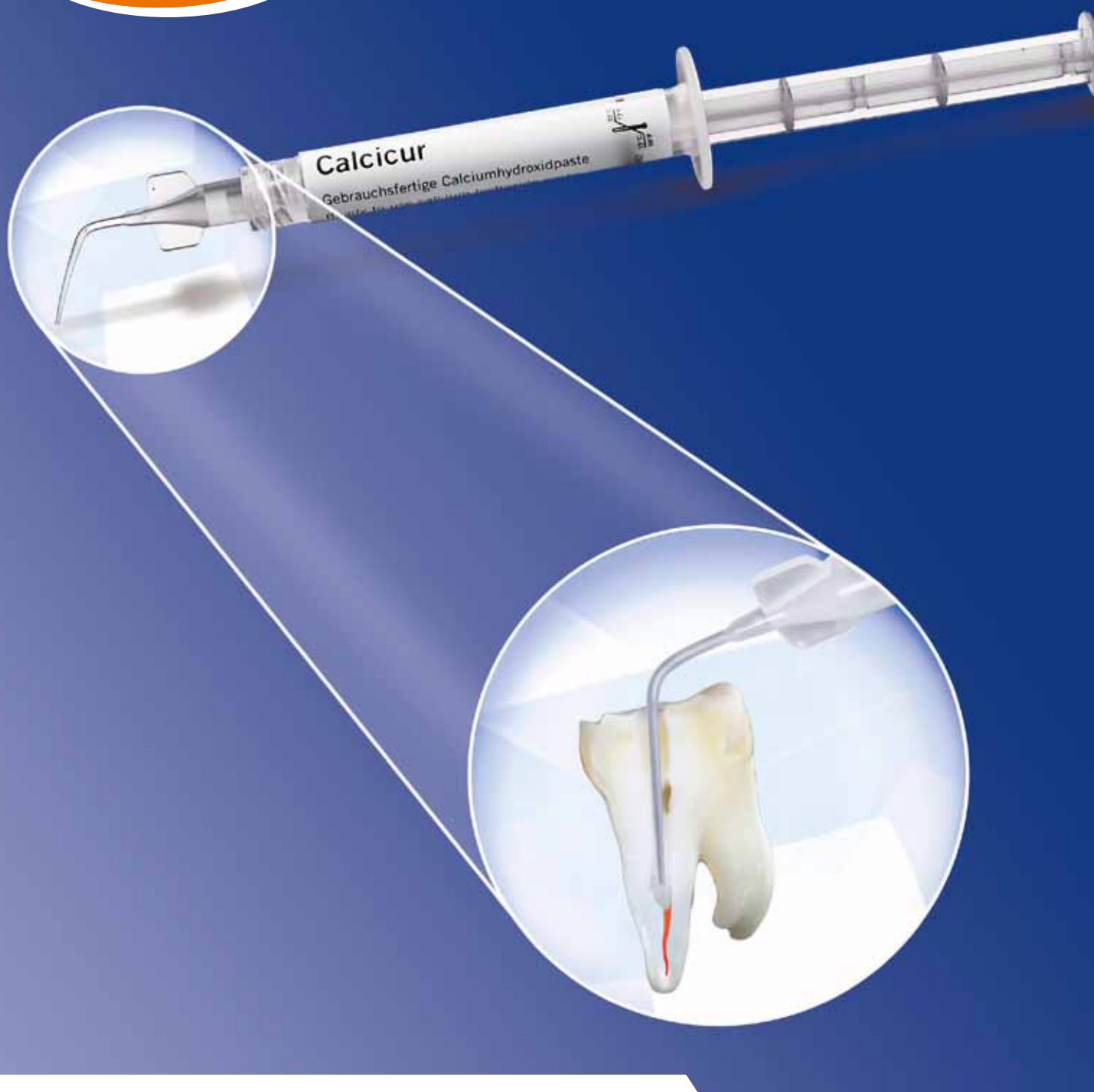

Calcicur®

Calcicur®

PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO LISTA PARA SU USO


Calcicur® – la pasta de hidróxido de calcio, de eficacia probada, ahora aún más fácil de aplicar

Los preparados de hidróxido de calcio desempeñan un papel importante en el trabajo diario del consultorio. Una excelente calidad de producto y una consistencia adecuada son características imprescindibles para una aplicación cercana a la pulpa o en el conducto radicular.

Con Calcicur, VOCO ofrece un producto que cumple con todos los requisitos en cuanto al material y que ahora además, gracias a la nueva cánula, garantiza una mejor manipulación. El líder de mercado* Calcicur, con su habitual consistencia cremosa, ya está disponible en una nueva jeringa con una cánula optimizada.

Calcicur es el material ideal para las obturaciones temporales y desinfecciones del conducto radicular, pero también para recubrimientos directos o indirectos. Los dentistas que se ofrecieron a probar en sus consultorios Calcicur con la nueva cánula quedaron entusiasmados. El 90 % de los participantes en el ensayo otorgaron a la pasta de hidróxido de calcio la calificación de “buena”.

La nueva cánula, gracias a su forma delgada y a su gran flexibilidad, es perfecta para la aplicación de Calcicur en cavidades de difícil acceso y en conductos radiculares. Con una longitud de 20 mm y un diámetro en la punta de 0,6 mm, el nuevo aplicador transparente es notablemente más fácil de usar. Tras probar la nueva cánula, más de la mitad de los dentistas participantes en el ensayo cambiaría su método de aplicación indirecta con lentulo por una aplicación directa en el conducto radicular.

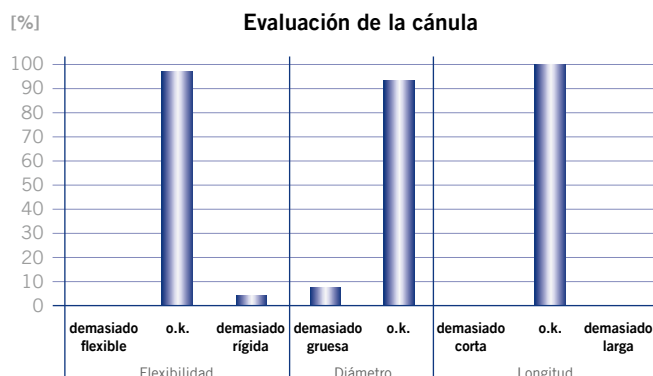

Para el 86 % de los odontólogos, la cánula ya ha demostrado su eficacia en la práctica diaria del consultorio, puesto que “ahorra tiempo y esfuerzo” y permite realizar “un trabajo limpio y rápido”. La cánula se ancla muy fácilmente con ayuda de las aletas laterales a la nueva jeringa de 2,5 g mediante el cierre Luer. El 90 % de los odontólogos participantes ha valorado la capacidad de expulsión de forma positiva en todas las aplicaciones.

Conclusión: El producto Calcicur, de calidad contrastada, facilita aún más el trabajo gracias a su nueva cánula de aplicación – para una mayor efectividad en la práctica diaria del consultorio.

Fuente: Test realizado internamente por VOCO, 2012

* en el segmento preparados de hidróxido de calcio según GfK 2011, Alemania.