



**CleanJoy®**

**PASTA PROFILÁCTICA PARA LA LIMPIEZA DENTAL  
PROFESIONAL Y PULIDO**

### **Limpieza efectiva y a la vez especialmente suave**

La base para la profilaxis de caries, periodontitis y periimplantitis es, además de la higiene bucal esmerada en casa, una limpieza dental profesional que se hace regularmente y que se ajusta a los requerimientos. CleanJoy, el sistema de pasta profiláctica y de limpieza de VOCO, ha sido desarrollado para simplificar el tratamiento de limpieza dental del modo más simple posible y para otorgarle al paciente una experiencia positiva. Con este sistema se pueden remover cuidadosa y al mismo tiempo suavemente las placas dentales duras como también blandas y manchas del tejido duro del diente, obturaciones, implantes y restauraciones protésicas. La pasta “fina” es apenas abrasiva y por eso es apropiada para el pulido después del uso de aeropolidores por chorreado de polvo. La aplicación final de CleanJoy crea así superficies notablemente lisas las cuales inhiben la nueva colonización de bacterias que forman placa y la formación de manchas. Estas son condiciones perfectas para una salud bucal a largo plazo.

### **Manipulación y consistencia**

CleanJoy se caracteriza por su consistencia bien ajustada y su homogeneidad. La pasta profiláctica es estable y al mismo tiempo suave. Esto permite una dosificación exacta y la pasta no salpica cuando se utiliza, independientemente si se trabaja con cepillitos o copas. La consistencia homogénea y la estabilidad garantizan una buena humectación y una retención en las superficies a tratar. La remoción subsiguiente de la pasta también es simplemente efectuable con un chorro de agua.

### **El sistema de semáforo – tres granulaciones para óptimos resultados**

CleanJoy es un sistema de limpieza con tres pastas combinadas una con la otra que también convencen individualmente por su efectividad y protección del tejido duro del diente. Depende de la gravedad de las placas y de las decoloraciones puede ser utilizada o bien la pasta “gruesa”, “media” o “fina”. De todos los modos se debe utilizar la pasta pulidora fina como paso de pulido concluyente. El respectivo grado de abrasión está adaptado al sistema de semáforos:

**Pasta roja (gruesa – valor RDA\* = 195):** Sobre todo placa dental fuerte, persistente y decoloraciones pueden ser removidas efectivamente y también suavemente.

**Pasta amarilla (media – valor RDA\* = 127):** Remueve óptimamente la placa dental ligera hasta media.

**Pasta verde (fina – valor RDA\* = 16):** Con esta pasta pueden ser removidas las placas dentales ligeras. También sirve para limpiar implantes. La pasta verde es necesaria para el pulido final después del uso de la pasta roja y/o amarilla. Además, también puede ser aplicada tras el uso de dispositivos por chorreado de polvo.

### **Superficies lisas, fluoruro y xilitol como base óptima hasta la próxima limpieza dental profesional**

Todos los grados de abrasión de las pastas profilácticas de CleanJoy contienen fluoruro (700 ppm) y xilitol. El fluoruro ayuda a fortalecer el tejido duro del diente y tiene un efecto remineralizante. Xilitol dispone de un efecto bacteriostático. Las superficies lisas, en combinación con xilitol, inhiben el depósito / colonización de bacterias que forman la placa dental.

\* Valor RDA de acuerdo con DIN EN ISO 11609

## AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE

1<sup>er</sup> caso

Ligeras decoloraciones extrínsecas en el maxilar inferior de los anteriores



Uso de la pasta de limpieza amarilla



Acabado con la pasta pulidora verde



Superficies dentales limpias y lisas

2<sup>o</sup> caso

Fuertes decoloraciones extrínsecas en el maxilar inferior de los anteriores



Elaboración de las superficies dentales con la pasta roja



Acabado con pasta pulidora verde



Superficies dentales limpias y lisas

Fuente: Dr. Sanzio Marques, Passos, Brasil



Imagen: Bonn Medien

Andrea Beyer, Asistente Dental especializada en profilaxis y ortodoncia, Münchhausen (Alemania):  
*“Limpiezas dentales profesionales son más y más demandadas por pacientes de todas las edades. Es por eso que nuestro equipo ha buscado mucho tiempo por una pasta limpiadora que remueva la placa dental persistente y que limpie suavemente el diente. Además, deseábamos encontrar una pasta profiláctica para nuestros pacientes pequeños que pudiera ser aplicada sin dudas en niños, en general, como también en particular en niños que lleven multibandas. Una pasta que limpie sin dejar una sensación áspera en la superficie dental o que no dañe los Brackets.*

*Ahora hemos encontrado CleanJoy de VOCO y su aplicación es divertida gracias a los “colores del semáforo” que pueden ser ajustados individualmente según el grado de decoloración de los dientes que presente cada paciente. Trabajando de rojo (para decoloraciones más fuertes) a verde (para decoloraciones más pequeñas) deja una sensación aterciopelada en la boca sin áreas ásperas. Las mejores experiencias con CleanJoy las tenemos en combinación con copas de limpieza a base de silicona.”*

## SIMPLEMENTE PRÁCTICO

**Indicaciones**

Remoción de placas dentales blandas y duras sobre la superficie dentaria

Remoción de pigmentaciones extrínsecas (p. ej. decoloraciones de café, té o tabaco)

Pulido de superficies dentarias en tratamientos de limpieza dental profesional limpieza dental antes del blanqueamiento y después de retirar aparatos ortodóncicos

Limpieza y pulido de obturaciones en tratamientos de limpieza dental profesional

Remoción de los restos de material de la fijación provisional antes de efectuar la retención definitiva (cementación)

**Ventajas**

- Consistencia estable, homogénea
- No salpica (2.000 – 3.000 r. / min.)
- Disponible en tres grados de abrasión, por eso ajustable a cada situación individual
- Codificación de semáforo: de uso simple y sin confusión
- Utilizable con todos los instrumentos convencionales (cepillitos, copas, etc.)
- Contiene fluoruro (700 ppm)
- Contiene xilitol (efecto inhibitorio en el metabolismo bacteriano)
- La pasta pulidora verde tiene un muy bajo grado de abrasión y es por eso apropiado para el cuidado de los implantes
- Valores RDA (medidos de acuerdo con DIN EN ISO 11609)
  - gruesa (rojo) RDA = 195
  - media (amarillo) RDA = 127
  - fina (verde) RDA = 16
- Ligero sabor a menta

**Presentaciones**

- REF 2090 Tubo 100 grs. gruesa (rojo)  
 REF 2091 Tubo 100 grs. media (amarillo)  
 REF 2090 Tubo 100 grs. fina (verde)

VOCO GmbH  
 Anton-Flettner-Straße 1-3  
 27472 Cuxhaven  
 Germany

Línea gratuita: +800 44 444 555  
 Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com  
 www.voco.com

Distribuidor: