

Fácil
de aplicar
en el surco

VOCO Retraction Paste

VOCO Retraction Paste

PASTA CON EFECTO ASTRINGENTE PARA UNA EFECTIVA
AMPLIACIÓN PROVISIONAL Y SECADO DEL SURCO

El hilo que viene del compute

PASTA CON EFECTO ASTRINGENTE PARA UNA EFECTIVA AMPLIACIÓN PROVISIONAL Y SECADO DEL SURCO

Efectuar tomas de impresión perfectas, controlar la humedad y realizar un tratamiento cuidadoso de los tejidos blandos son requisitos imprescindibles para lograr unos bordes exactos de las coronas, un sellado marginal perfecto y restauraciones estéticas y duraderas.

¡Indispensable en el consultorio!

VOCO Retraction Paste es una ayuda indispensable para la apertura provisional efectiva y el secado del surco. Por ello, proporciona la condición previa para obtener con éxito una toma de impresión convencional o digital.

VOCO Retraction Paste se puede aplicar en el surco de forma sencilla e higiénica directamente desde la cápsula SingleDose, desarrollada por los ingenieros de VOCO, y alcanza hasta para 3 surcos. Gracias al plástico suave y flexible de la cápsula, la aplicación es más respetuosa con los tejidos y, así más cómoda para sus pacientes en comparación con cánulas metálicas o hilo de retracción. La viscosidad se ha desarrollado conforme a los requerimientos del tratamiento clínico. Según la presión que se ejerza sobre la pasta, esta presenta diferentes grados de viscosidad, denominado Viscosity Change. Es fácil de extraer presionando, fluye bien y puede aplicarse con gran precisión ejerciendo poca presión. Es estable en el surco y permite una ampliación provisional efectiva.

Esta pasta con efecto astringente, que contiene cloruro de aluminio, detiene cualquier hemorragia y repele la humedad. Tras una breve actuación de 1 – 2 minutos, VOCO Retraction Paste de gran contraste ya se puede enjuagar con facilidad. Se puede usar como alternativa o en combinación, p.ej., con hilos de retracción. Ud. decide entre obtener una impresión clásica con material de impresión, o digital con un escáner intraoral.

Indicaciones

Para la retracción provisional de la encía marginal y el secado del surco gingival en caso de un periodonto sano, por ejemplo antes de:

- Tomas de impresión analógicas o digitales
- Cementación de restauraciones provisionales y definitivas
- Elaboración de obturaciones de las clases II y V

Ventajas

- **Cánula fina con punta flexible** – aplicación fácil y precisa en el surco
- **“Viscosity Change” (cambio de viscosidad)** – la consistencia de la pasta varía durante la aplicación y la ampliación del surco
- **Buena visibilidad** – buen contraste con la gingiva
- **Limpio y ordenado** – eliminación fácil por simple enjuague

Presentaciones

REF 1012 Caps 25 x 0,3 grs.

REF 1013 Caps 100 x 0,3 grs.



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemania
www.voco.dental

Servicio de atención al cliente de VOCO
Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Disponible en: