

LARIDENT SRL

REF. : SOPORTE DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE G29 PARA ESPONJA ENDODÓNTICA

LIMPIADOR DE INSTRUMENTOS ENDODONTICOS PLASTICOS G29, BASE CERRADA

CONSEJOS DE ESTERILIZACIÓN

- **Limpiar a fondo antes de colocar en un autoclave.**
- **Autoclave 134 ° C. Se recomienda utilizar el ciclo a 121 ° C.**
- **Ciclo hasta 50x**
- **Evite la presencia de metales en un autoclave.**

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACIÓN

- **Enjague bien los materiales de desinfección antes de esterilizarlos en autoclave.**
- **Autoclavable hasta 134 ° C. Recomendamos el programa de seguridad de 121 ° C.**
- **Ciclo hasta 50x**
- **Evite el contacto con el instrumento de metal cuando esterilice en autoclave.**

