


● Componentes de la impresora

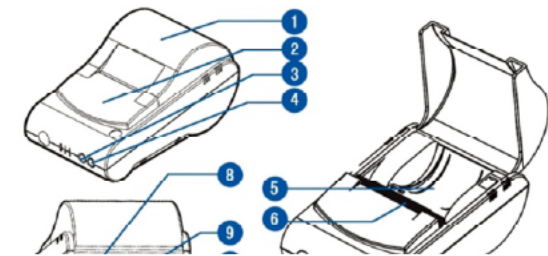

1. Cubierta del compartimento de papel
2. Panel
3. Botón SEL
4. Botón LF
5. Compartimento de papel
6. Cinta / cabezal de impresión
7. Indicador
8. Pestillo de apertura
9. Ranura de reserva

Funcionamiento de los botones e indicadores

Durante la configuración, el botón izquierdo (LF) alimenta el papel y el botón derecho selecciona (SEL).

Al encender la impresora, el indicador permanece iluminado. Si parpadea, falta papel y la impresora no puede recibir datos. Pulse LF para alimentar papel.

Autopruueba

Mantenga pulsado LF mientras enciende la impresora; imprimirá la tira de auto comprobación.

● Mantenimiento del producto

Solución de problemas

La impresora no recibe datos: compruebe que está encendida, conectada y con papel.
Impresión anómala o ilegible: compruebe el papel, la cinta, el cabezal de impresión y los parámetros de comunicación.

El papel no avanza: confirme que el sensor y el mecanismo de alimentación no estén bloqueados.

No enciende: compruebe la fuente de alimentación, el cable y la polaridad.

Uso y mantenimiento

1. Antes de usarla, instale correctamente el rollo o la cinta y encienda el equipo. No extraiga la batería durante el uso.
2. Utilice papel de buena calidad; el papel demasiado grueso o estrecho puede afectar a la impresión.
3. No imprima si falta papel, para evitar daños en el cabezal.
4. Mantenga los líquidos y objetos metálicos alejados del interior. Si entra algún objeto, desconecte inmediatamente la alimentación.
5. Si la impresora no se utiliza durante mucho tiempo, retire el papel o la cinta.
6. Limpie solo con un paño suave y seco; no use disolventes.
7. Evite golpes, caídas y ambientes húmedos o con polvo.
8. Para reparaciones, contacte con personal técnico autorizado.

Runyes

T1/T2

Impresora de agujas T1
Impresora térmica T2

INSTALACIÓN RÁPIDA




Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.

宁波蓝野医疗器械有限公司
Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.

版本号: 20190402



● Dimensiones

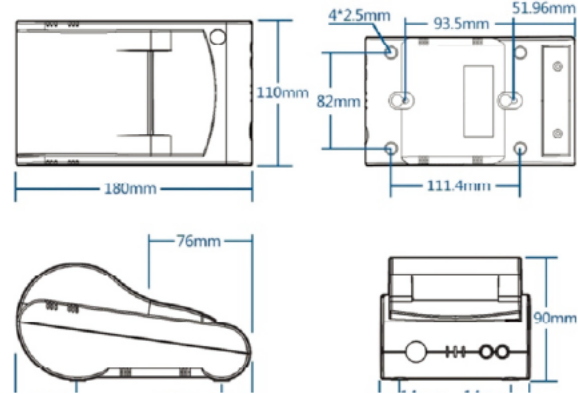

RY-T1/T2 - Dimensiones del producto

Dimensiones exteriores: 180 mm x 110 mm x 90 mm

Distancia entre orificios de montaje: 93,5 mm

Tamaño de papel


Tipo de papel Grosor Ancho Diámetro

Papel térmico 0,06-0,08 mm 57 ± 0,5 mm máx. 50 mm

Papel para agujas 0,06-0,08 mm 44 ± 0,5 mm / 57 ± 0,5 mm máx. 50 mm

Nota: para papel térmico se recomienda papel de larga conservación; el papel térmico común puede conservarse alrededor de un mes.

● Instalación

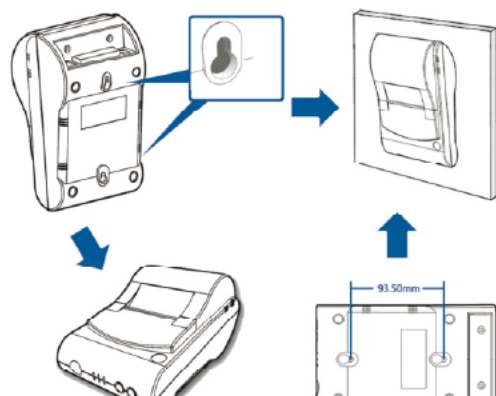


Método de instalación

Fije dos tornillos en el equipo según la posición relativa de los orificios de montaje de la parte posterior de la impresora. A continuación, cuelgue la impresora en el equipo.

Distancia entre los dos orificios de montaje: 93,5 mm.

● Conexión

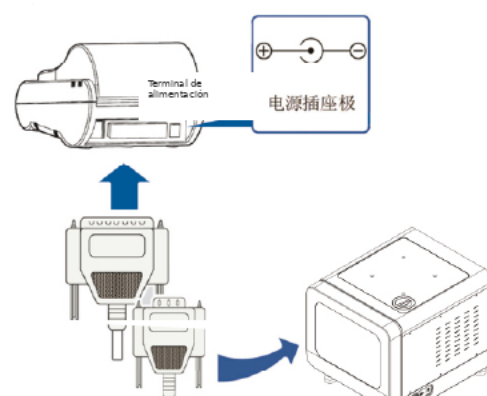

Conexión de comunicación

Consulte el manual de la impresora en el sitio web de la empresa.

Conexión de alimentación

Observe el cable de alimentación: el conductor central es positivo (+) y el exterior es negativo (-), como se muestra en la figura.

Atención: la fuente de alimentación es opcional.


● Rollo de papel



Pasos de instalación

1. Abra la tapa de papel.
2. Introduzca el rollo en la impresora. Tire de una pequeña longitud de papel e insértela en la guía; observe el sentido de avance.
3. Encienda la impresora y pulse SEL hasta que el indicador SEL se apague. Pulse LF para que avance el papel y salga una pequeña longitud. Pulse SEL de nuevo para apagar la impresora.
4. Cierre la tapa de papel. (En el modelo T2, este paso no es necesario).

● Cinta

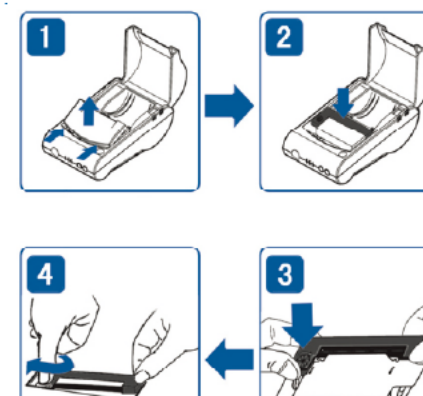

Tipo de cinta: Epson ERC-05

Instalación de la cinta

1. Abra la tapa de papel y empuje la cubierta móvil como se muestra.
2. Retire el casete de cinta. Localice el extremo izquierdo y colóquelo en la ranura izquierda; después presione el lado derecho para encajarlo.
3. Instale la cinta: compruebe que entra suavemente en la guía. Si el extremo derecho no baja hasta el fondo, gire ligeramente la rueda del casete en el sentido de la flecha hasta que quede correctamente asentado.
4. Vuelva a colocar la cubierta móvil y cierre la tapa de papel. (En el modelo T2, este paso no es necesario).