

GUIDA RAPIDA SD CARD E SOFTWARE TECNO HEART PLUS

TECNO-GAZ comunica che all'interno del defibrillatore nel vano apposito (vedi Figura Sotto), è inserita un SD CARD per la registrazione degli eventi del defibrillatore.

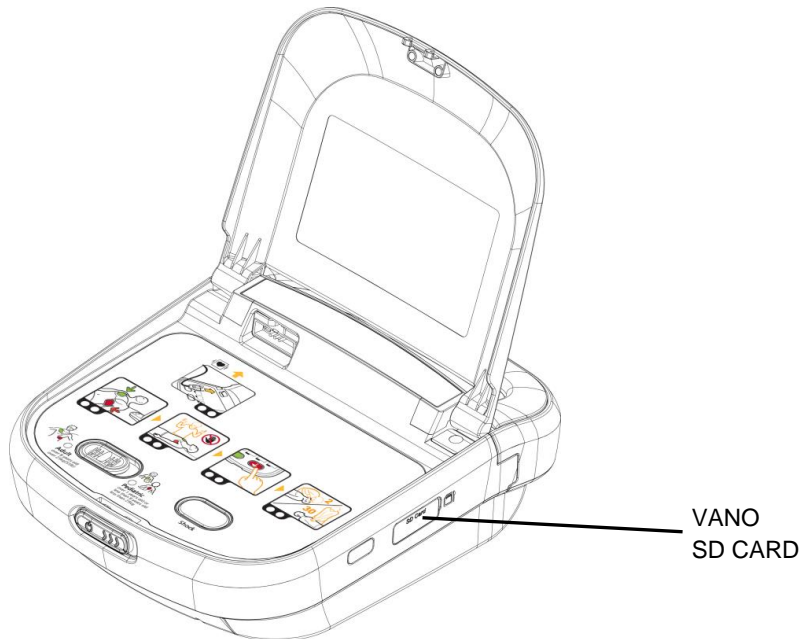


Figura 1. TECNOHEART plus: vano SD CARD

All'interno della SD CARD sono salvati 2-4 file elaborati dal defibrillatore durante il collaudo in fabbrica.

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
001		Cartella di file	
002		Cartella di file	

Figura 2. TECNOHEART plus: file in SD CARD

NOTA BENE:

Il programma di gestione eventi del defibrillatore è scaricabile al sito TECNO-GAZ link: <http://www.tecnogaz.com/tecnogaz/product.aspx?id=1099&pkey=&fl=>


Il programma di gestione eventi defibrillatore è compatibile solo con sistemi operativi Microsoft Windows ®.

Per l'installazione e l'uso del programma di gestione eventi defibrillatore fare riferimento al manuale cartaceo allegato al defibrillatore.

PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE UTENTE ALLEGATO ALLO STESSO.

Risoluzione Problemi:

Se installando il software nella barra dello start non è presente l'icona il programma (vedi esempio qui sotto)

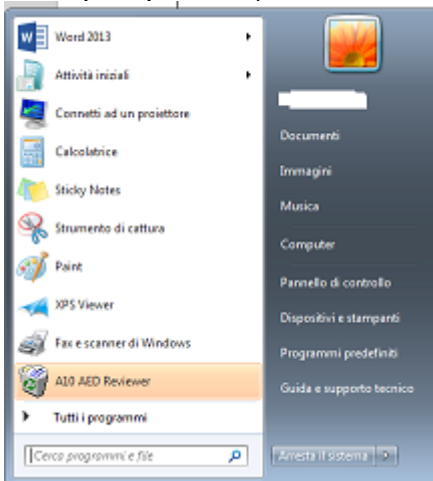

Verificare su desktop che sia presente il collegamento al programma *HeartOn AED Event Review Software* e fare doppio click su di esso



Se il link non è presente sul desktop, lanciare il programma dalla cartella di installazione. Il programma è installato nella cartella nel Disco locale (C:)\Programmi\Mediana A10:

- Disco locale (C:)
- Programmi
- Mediana A10

Per accedere al programma di gestione selezionare AEDReview (vedi Pos. 1 immagine sotto).

