

# Toallitas limpiadoras desinfectantes ASEPTONET

Toallitas limpiadoras desinfectantes para superficies,  
pequeño material y dispositivos médicos non-invasivos.

Dispositivo médico clase IIa



Para limpiar y desinfectar dispositivos médicos no sumergibles y non-invasivos (estetoscopios, sensores de presión, conectores y cables, ...).



## Formula

Ethanol (< 3%), Dimethylbenzylammonium clorido, Propan-2-ol (< 1%).

Tolerancia con la piel dermatológicamente probada.

El aclarado es ineficaz, a menos que el dispositivo médico pueda estar en contacto con las membranas mucosas.

Cierre la tapa correctamente después de cada uso. Se seca rápidamente y no deja residuos. Deje actuar el producto entre 1 y 15 minutos según el tipo de eficacia antimicrobiana deseada.



## Propiedades microbiológicas

En condiciones de suciedad (excepto \*)

- Bactericida EN1276\*, EN13727, EN13697\*, EN14561 (cuyo SARM) en 5 min.
- Tuberculocida sobre Mycobacterium Terrae EN14348\* et EN14563\* en 15mn.
- Fungicida EN14562\* (sobre Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricida EN1650, EN13697\*, EN13624\*, EN14562\* sobre Candida albicans en 5 min.
- Virucida EN14476 sobre HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus\* en 1 mn, Rotavirus\* en 15 mn.



## Precauciones de utilización

Sin pictograma de peligro.

Consulte la ficha de datos de seguridad con antelación.



## Empaquetado

**REF : ASEP0001**

Bote de 100 toallitas 130 x 200m.

Caja de 12 botes.

Paleta de 90 cajas.

**REF : REFILL**

Recarga de 100 toallitas 130 x 200mm.

Caja de 12 botes.

Paleta de 133 cajas.

**REF : ASEP0002**

Pack de 100 toallitas gruesas 180 x 200mm.

Caja de 12 botes.

Paleta de 50 cajas.



## Modo de empleo

Levante la tapa y retire el opérculo de sellado. Introduzca la toallita central en el centro de la tapa.

Producto listo para un sólo uso.

Ficha Técnica. Versión 10 - 09/2018

STERIDIS - 497, Rue Stéphane Hessel - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON - France  
Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com

STERIDIS