



Safety Line

Technical Data Sheet – rev.04 – 30.07.2015

Protezioni per strumentazione - *Equipment protections*

Mordedor

1. Identificazione del prodotto/Product identification →**Protezioni per strumentazione/Equipment protections**

Classificati nella Classe I secondo la Regola 1 dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e sono marcati CE.

Product is classified in Class I in accordance with Rule 1 of Annex IX to Directive 93 /42/EEC and are CE marked.

2. Identificazione del fabbricante/ Manufacturer identification

Omnia Spa - Via Francesco Delnevo 190 -43036 Fidenza – Parma
Tel. 0524.527453 – Fax. 0524.525867 – www.omniaspa.eu

3. Identificazione dei prodotti/ General product description

Codice/Code	Descrizione/Description	Materiale Material	PZ/Conf. Pcs/box
30.Z0025.00	Copertura blocco a mordere per ortopantomografo/ <i>Bite block cover for orthopantomograph - cm 4 x 6</i>	LDPE	500
30.Z0036.00	Copertura blocco a mordere per ortopantomografo/ <i>Bite block cover for orthopantomograph - Ø 7-10 mm</i>	Nitrile Latex Free	200

4. Sterilizzazione/ Sterilization: il prodotto è venduto non sterile/ non sterile product**5. Confezionamento/ Packaging**

I dispositivi sono confezionati in scatole dispenser etichettate con le informazioni relative al codice, lotto, fabbricante e marchio CE.

Products are packaged in carton box dispenser labeled with all information about code, lot, manufacturer and CE mark.

6. CND: T030102 – Guaine copri strumenti e apparecchi**7. N° di repertorio:**

30.Z0025.00	N° di repertorio 328241/R
30.Z0036.00	N° di repertorio 328240/R

La guaina trasparente **Mordedor** è ideale per proteggere il blocco a mordere dell'ortopantomografo, durante le procedure di scansione del cavo orale.

*The transparent sheath is ideal to protect the **Mordedor** bite block of the orthopantomograph during mouth scanning procedures.*

Applicazione della copertura
 Apply of hygienic cover / Anwendung den Bissaufsatz/
 Colocación de la funda / Mode d'emploi

1. Posizionare / Apply / Aufziehen / Posicionar / Appliquer
- 2.3. Calzare srotolando / Unroll on / Durch Abrollen aufziehen / Colocar desenrollando / Enfiler en laderoulant

30.Z0036



Rev. 01	Integrazione codici e n° repertorio /Update code list and info point 7	09.02.2011
Rev. 02	Allineamento con i codici a listino/Update with the list of code in "Price List"	08.05.2013
Rev. 03	Aggiornamento grafico/ Design update	26.01.2015
Rev. 04	Nuove specifiche del codice 30.Z0036 – nuovi lotti di produzione/ New specification for code 30.Z0036 – new lots of production	30.07.2015

