

	TÍTULO: CUBETAS DE FLUORIZACIÓN	CÓDIGO: FT-SGC05.02
	FECHA DE EMISIÓN: 28/FEB/2019	REEMPLAZA: FT-SGC05.01
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Cubetas desechables dobles para fluorización con Gel de Flúor Clarben están constituidas por paredes exteriores y contorneadas que reducen el desbordamiento e impiden la ingesta de flúor.
- El arco superior encaja naturalmente, proporcionando un ajuste cómodo.
- Presentan una exclusiva pestaña extra larga que aseguran limpieza y facilidad de inserción.
- Cuentan con un diseño anatómico que asegura la cobertura del Gel de Flúor Clarben en el diente entero.
- Su exclusivo "pliegue-bisagra" que evita el reflejo nauseoso y permite la fácil separación para utilizar un solo arco.
- Evita el choque vestibular.
- La práctica ranura en la lengüeta para una cómoda sujeción de la cubeta.

2. FINALIDAD

Cubetas desechables dobles para fluorización con mango y con la cara interior rugosa. Indicado para:

- **ORTODONCIA:** En todos los tratamientos en los que existe contacto del metal, por ejemplo los brackets.
- **LIMPIEZA:** Al limpiar con ultrasonidos, se produce cierta agresión al esmalte; hay que reforzar la estructura dental y prevenir la hipersensibilidad.
- **PERIODONCIA:** Ayuda durante el proceso del raspaje periodontal y reduce la hipersensibilidad.
- **PROTESIS:** Las prótesis removibles constituyen una agresión constante al esmalte de los dientes de apoyo.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- CUBETAS FLÚOR DOBLES GRANDES AZULES BOLSA 50 U.
- CUBETAS FLÚOR DOBLES MEDIANAS BLANCAS BOLSA 50 U.
- CUBETAS FLÚOR DOBLES PEQUEÑAS AMARILLAS BOLSA 50 U.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- Ref: 06-024
- Ref: 06-025
- Ref: 06-025

6. MODO DE EMPLEO

- Rellenar la cubeta con el Gel de Flúor Clarben 1/3 de su volumen.
- Secar los dientes e introducir la cubeta en la boca.
- Mantener en la boca unos 60 segundos, con un máximo de 4 minutos.

- La acción de masticar facilita la penetración en los espacios interproximales.
- Retirar la cubeta y hacer que el paciente expulse el exceso de gel.
- Se debe informar al paciente que no debe comer, ni beber ni enjuagarse durante 30 minutos.

7. ADVERTENCIAS

- Uso exclusivamente profesional.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para más información, consultar la Hoja de Seguridad.

8. IMAGEN

