



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

DENTASEPT Ultra y BANDELETTES DENTASEPT ULTRA (tiras reactivas)

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE EN EL ÁMBITO DENTAL

- Solución lista para usar: ausencia de activador
- Actúa contra bacterias, levaduras, moho, virus y micobacterias en 10 minutos
- Control de la conformidad de la solución desinfectante con tiras reactivas



DENTASEPT Ultra

Desinfectante de alto nivel para instrumental termosensible en el ámbito dental


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución de color verde claro
- Solución de glutaraldehído al 2% tamponada a pH 6 (citrato de sodio)
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. No diluir. Asegurarse de que los dispositivos sanitarios estén correctamente limpios y aclarados antes de usar Dentasept Ultra.

Paso previo a la desinfección: Limpie los dispositivos sanitarios con un detergente o producto desinfectante previo. Aclarar minuciosamente con agua.

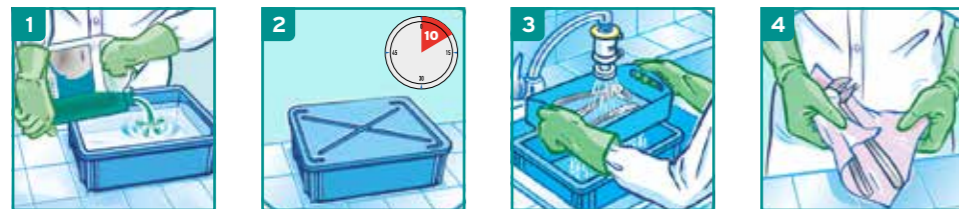

Paso de desinfección: Verter la solución.

Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el DENTASEPT Ultra.

Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto.

Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Para garantizar la eficacia del desinfectante, compruebe el nivel de glutaraldehído con una tira de prueba de DENTASEPT Ultra al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 30 días.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD/CONDICIONES	CONTACT TIME
Bactericida* según EN 13727/EN 14561*	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562*	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562*	10 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111*	10 min
Esporicida frente a Clostridium difficile* según EN 17126*	60 min

*=condiciones de limpieza

INFORMACIÓN SOBRE EL ENVASE Y EL PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Dentasept Ultra	4 garrafas de 5 L	3133904

CE
0459

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Desinfectante de alto nivel para instrumental termosensible en el ámbito odontológico.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. No diluir. Asegurarse de que los dispositivos sanitarios estén correctamente limpios y aclarados antes de usar Dentasept Ultra.

Paso previo a la desinfección: Limpie los dispositivos sanitarios con un detergente o producto desinfectante previo. Aclarar minuciosamente con agua.

- Paso de desinfección: Verter la solución.
- Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el DENTASEPT Ultra.
- Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto.
- Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Para garantizar la eficacia del desinfectante, compruebe el nivel de glutaraldehído con una tira de prueba de Dentasept Ultra al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 30 días.

INGREDIENTES

Solución de glutaraldehído (al 2%) en tampón a pH 6, tensoactivos, colorante y excipientes.

ALMACENAMIENTO


Peligroso: respetar las precauciones de uso (elaboradas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: de +5°C a +25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad microbiológica completa se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

PRODUCTO SANITARIO UTILIZAR DE FORMA SEGURA

Por favor lea la información del producto y etiqueta.

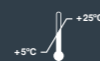

PARA USO PROFESIONAL.

BANDELETES DENTASEPT Ultra (tiras reactivas)

100 tiras reactivas para comprobar el nivel de glutaraldehído en la solución Dentasept Ultra

INSTRUCCIONES DE USO

- Mojar la tira durante un segundo, sacarla sacudiéndola para eliminar el exceso de líquido
- Lectura en 15 segundos:
Rosa uniforme - CONFORME
Pink Orange - NO CONFORME
- No interpretar un resultado obtenido en más de 30 segundos tras la inmersión
- Frecuencia de uso: comprobar la solución con una tira reactiva Dentasept Ultra al inicio de la sesión, al reanudar el trabajo tras una interrupción y, al menos, una vez al día.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el envase cada vez que se retire una tira reactiva. Mantener lejos de la humedad. Respetar la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta. Almacenar durante un máximo de 90 días después de su apertura. Almacenar entre +5°C y +25°C.

PRECAUCIONES DE USO

Desechar el producto y su envase siguiendo todas las precauciones de uso. Reservado para uso profesional.


INFORMACIÓN SOBRE EL ENVASE Y EL PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	CÓDIGO DE ARTÍCULO
Bandelettes Dentasept Ultra	100 tiras reactivas	3133904


CE

LECTURA EN 15 SEGUNDOS:

Conforme
Rosa uniforme

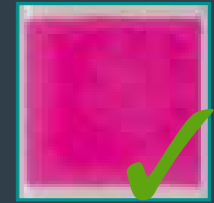

No conforme
Rosa anaranjado

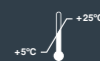

PARA USO PROFESIONAL.



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n^os. 3-5
Sant Joan Despí-08970

