



INSTRUMENTOS



DENTASEPT®

Ultra

INDICACIONES

Dentasept® Ultra es una solución desinfectante de alto nivel para el tratamiento de instrumentos termosensibles tras la primera etapa de limpieza y desinfección.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Listo para su uso
- ✓ pH neutro – compatible con todo tipo de materiales
- ✓ Actividad bactericida, fungicida y virucida: 10 min.
- ✓ Actividad esporicida (desinfección de alto nivel): 60 min.
- ✓ Solución utilizable durante 30 días
- ✓ Dispositivo médico de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada)

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561.
SARM: EN 13727.
Micobactericida: EN 14348, EN 14563.
Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucida: EN 14476 (10 min). Actúa contra VIH-1, VHB, BVDV (virus modelo VHC) y Herpesvirus.
Esporicida: NF T 72-231, (C. Sporogenes), T 72-301 (C. difícil).

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Solución de glutaraldehído (2%) tamponada de pH 6, en presencia de un catalizador de efecto de superficie, colorante y excipientes.

ACONDICIONAMIENTO

Garrafa de 5 litros.



INSTRUMENTOS

DENTASEPT® Ultra

PROTOCOLO DE USO

Dentasept® Ultra es una solución desinfectante de alto nivel para el tratamiento de instrumentos termosensibles tras la primera etapa de limpieza y desinfección.

ANTES DE UTILIZAR


Asegurarse de que los instrumentos estén correctamente limpios (Dentasept® 3H Rapide, Dentasept® Enzymatique etc) y que hayan sido aclarados antes de usar Dentasept Ultra.

Aclarar los instrumentos minuciosamente con agua del grifo.

Use indumentaria y guantes adecuados, así como protección para los ojos/la cara.

MODO DE USO

- 1 Verter Dentasept® Ultra en una cubeta de desinfección. No diluir.
- 2 Sumergir los instrumentos totalmente en la solución.
- 3 Cubrir y dejar en remojo durante 10 minutos, como mínimo. (1 hora para lograr actividad esporicida).
- 4 Retirar la cesta de la cubeta de desinfección y aclarar los instrumentos con agua estéril o filtrada a 0,2 µm.
- 5 Secar los instrumentos con un paño seco.

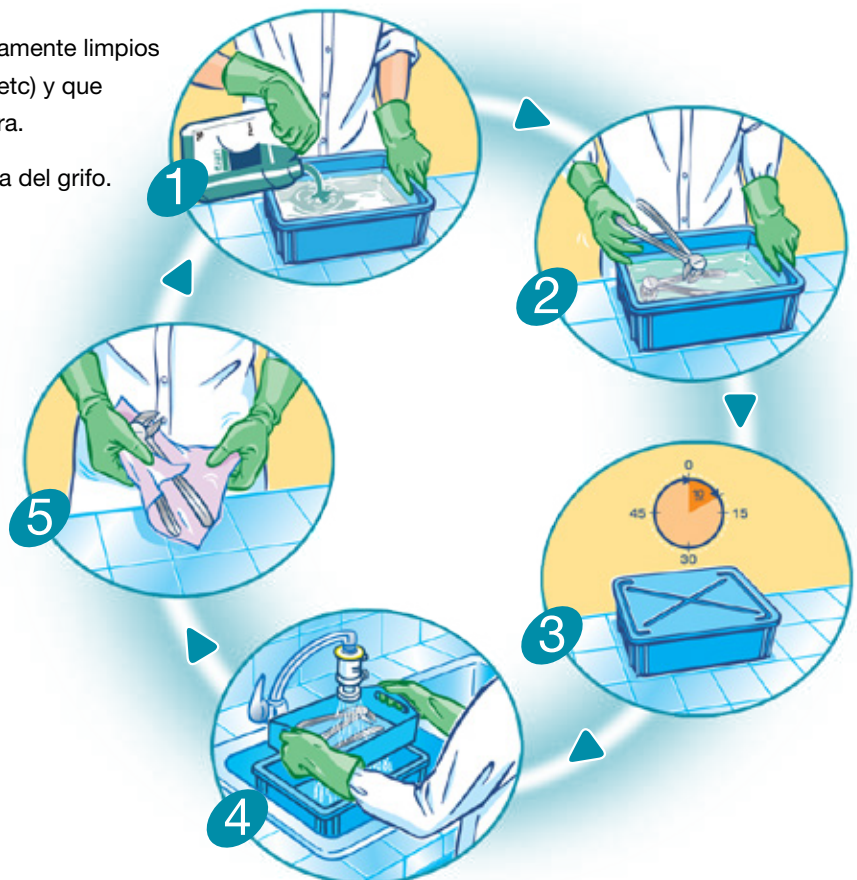

PRECAUCIONES

No mezclar Dentasept® Ultra con otros detergentes o productos químicos.

Leer siempre la Ficha de datos de seguridad, a fin de que tome las precauciones de uso relativas al producto. Según la Directiva Europea 99/45/EEC y sus adaptaciones, Dentasept® Ultra está clasificada como una sustancia peligrosa.

Renovar la solución como mínimo cada 30 días. Conservar entre +5°C y +35°C.