

Dental Dam Nic Tone

Dique de hule natural

DESCRIPCION

Dique de hule profesional

Aísla el campo operatorio desde un diente hasta toda la arcada dental. Proporciona una amplia visión de campo por su color contrastante, previniendo contaminación y deglución de instrumentos pequeños por la cavidad oral.

Color verde o azul

Tamaño 5" X 5" y 6" X 6"

De espesor, delgado, medio y grueso.

Especificaciones

Elongación: > 700%

Tensión: > 51 Mpa

Olor Característico a menta

INSTRUCCIONES

Lo primero que se debe realizar es la selección de la hoja de dique según las necesidades del caso.

Es común que en la endodoncia se aisle una única pieza dentaria.

Para la correcta perforación se coloca la hoja de dique Nic Tone en el porta dique y sin ninguna perforación externa se lleva hacia el interior de la boca ejerciendo presión con el dedo, hasta tocar el diente que será el punto primordial donde se reunirá todo el aislamiento.

La hoja de Dique permanecerá sutilmente empapada y esto indicará cual es la zona a perforar.

Ventajas

- Colores contrastantes a los tejidos orales
- Influencia positiva sobre la capacidad de concentración
- Ajuste en la retracción de los tejidos blandos
- Mejor resistencia y alargamiento
- Fabricado de látex refinado
- Elongación hasta 800% sin desgaste
- Bajo en polvo y proteínas
- Facilitar la aplicación de medicamentos cáusticos, ácidos y/o irritantes.
- Obtener un campo seco.
- Proteger al paciente de riesgos como la deglución accidental de algún instrumento pequeño.

Presentación

Caja con 36 piezas;

Verde 5" X 5", Verde 6"X6"

Azul 5" X 5", Azul 6"X6"

FICHA TECNICA

Almacenaje

Este material tiene una vida útil por 60 meses, a partir de la fecha de fabricación siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento, libre de contaminación, en un ambiente protegido de la humedad y luz solar, y en su empaque original.

SEGURIDAD

Piel: Puede causar irritación en personas alérgicas al látex.

Manufacturera Dental Continental, S.A. de C.V.
Industria del Plástico 2113
Fracc. Zapopan Industrial Norte
Zapopan Jalisco México
Tel.: 01 33 3833 0333
www.dental.com.mx