

### DATOS DE LA EMPRESA

Nombre  
NIF  
Fabricante/Distribuidor

ETHICON SURGICAL CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
A/28218675
DISTRIBUIDOR

### DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

#### Producto

<b>Cera para Huesos</b>	<b>CÓDIGO EAN</b>	<b>30705031056989</b>
W31C	ECA	

#### Indicaciones

La cera para huesos está destinada a controlar la hemorragia que proviene de los bordes óseos cortados, taladrados o astillados, actuando mediante taponamiento físico de los canales óseos que contienen los capilares sangrantes.

#### Descripción

La cera para huesos es una mezcla de cera estéril no absorbible que contiene:  
Cera blanca de abejas PhEur 75 % peso  
Cera parafina PhEur 15 % peso  
Palmitato de Isopropilo PhEur 10 % peso

#### Modo de uso

Contiene una pastilla de 2,5 gramos moldeada de Cera para Huesos, envuelta en una funda y colocada en una carpeta de papel. La cera para huesos deberá ser ablandada mediante el uso de una técnica aséptica hasta obtener la consistencia deseada, mediante manipulación con los dedos. La cera así suavizada será aplicada al borde óseo según lo indiquen las circunstancias quirúrgicas y la preferencia del cirujano.

#### Contraindicaciones

La cera para huesos no debe usarse cuando se desee una rápida regeneración y fusión ósea.

#### Advertencias

La cera para huesos debe usarse con cuidado y debe retirarse cualquier exceso del área operatoria. La cera para huesos puede actuar como barrera del proceso de reparación.

El paquete que contiene la cera para huesos debe abrirse inmediatamente antes de su uso para minimizar la posibilidad de contaminación y de secado excesivo.

#### Referencias del producto

Referencia del fabricante  
Referencia del distribuidor  
Marca comercial  
Otro nombres comerciales

W31C
W31C
Cera para Huesos



#### Atributos y medidas

Cantidad por sobre  
Color  
Tiempo de absorción

>2,5gr.
Semi-transparente, crema pálida
No absorbible

#### Datos logísticos

Caducidad  
Conservación  
Envasado  
Tipo embalaje  
Garantía de Calidad

5 años
Condiciones recomendadas de almacenamiento: menos de 25° C, alejadas de la humedad y del calor directo. No
Sobre individual
Caja de 24 unidades
MARCADO CE LIBRE DE LATEX