



Detenga caries incipientes – sin fresas – use Icon.

Para caries incipientes, hasta un tratamiento poco invasivo sacrificará el tejido rígido sano. Icon ahora ofrece una solución revolucionaria: la superficie del esmalte está preparada con gel de HCL especialmente desarrollado. Después, el sistema de poros es rellamado, estabilizado y sellado con resina fotopolimerizadora, deteniendo la progresión de las caries y preservando el tejido rígido sano – sin perforaciones.

Icon está indicado para caries incipientes con esmalte sin cavitación y con progresión radiológica de la lesión en el tercio externo de la dentina. Los kits de tratamientos están disponibles para aplicaciones en superficies lisas y proximales.




La solución revolucionaria:

Icon de DMG

Icon ofrece una revolucionaria forma del tratamiento de las manchas blancas y negras con caries activas en apenas una consulta. Las lesiones tratadas con el Icon se asemejan a un esmalte saludable y natural. Esto proporciona además una opción altamente estética, con tratamientos sencillos sin fresas o brocas.


Situación inicial

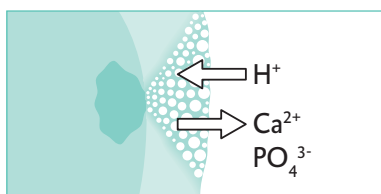

La lesión cariosa antes del tratamiento:

Ácidos dañinos penetran en el esmalte a través de los poros que han desarrollado, y retiran los minerales.

Icon tratamiento innovador

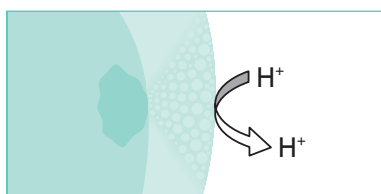

Después del tratamiento:

Al cerrar el sistema de poros, ácidos ya no son capaces de penetrar en el diente. Por lo tanto, es posible detener la progresión de la carie incipiente en una etapa temprana.



Icon, Infiltrante proximal de caries

1 Unidad de tratamiento: 1 Syringe @ 0.30 ml Icon-Etch, 1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Dry
1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Infiltrant, 6 Vestibular-Tips, 1 Luerlock-Tip

Kit Iniciante: Contenido 2 unidades de tratamiento REF 220341

Paquete económico: Contenido 7 unidades de tratamiento REF 220237



Icon, Infiltrante de caries en superficie lisa

1 Unidad de tratamiento: 1 Syringe @ 0.30 ml Icon-Etch, 1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Dry
1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Infiltrant, 6 Vestibular-Tips, 1 Luerlock-Tip

Kit Iniciante: Contenido 2 unidades de tratamiento REF 220343

Paquete económico: Contenido 7 unidades de tratamiento REF 220238



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

SF Icon ES 100611