

# BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

# INSTRUNET INIBSA TOALLITAS

Desinfectante de superficies  
listo para usar sin aldehydos

Eficaz en 30 segundos

Agradable olor a limón



Las toallitas Instrunet Inibsa son la solución para desinfectar aquellos elementos del box de difícil acceso con un desinfectante en formato spray, como por ejemplo los tubos de elementos rotatorios del sillón dental.



# BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

## Características

120 toallitas de gran tamaño: 130 x 190 mm.

Formulación sin aldehídos ni colorantes.

Agradable olor a limón.

Amplio espectro de eficacia en 30 segundos.

## Modo de empleo

Utilizar las toallitas Instrunet Inibsa en los dispositivos previamente limpios.

1. Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario.
2. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
3. Repetir la aplicación cada vez que sea necesario.
4. Cerrar bien el envase tras cada apertura.

Importante: no reutilizar la toallita ya que la desinfección no podría garantizarse.  
Los aparatos eléctricos a desinfectar deben estar desconectados de la red.

## Composición

Solución de impregnación: Solución hidroalcohólica (Etanol 55%) propionato de amonio cuaternario y perfume.

## Precauciones de empleo

Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.

Almacenar entre +5°C y +25°C.

Producto sanitario de clase IIa (Directiva 93/42/CEE modificada).

## Propiedades Microbiológicas a 20°C

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
<b>Bactericida</b>	EN 16615, EN 13727	30 segundos
<b>Levuricida</b>	EN 16615, EN 13624	30 segundos
<b>Tuberculicida</b>	EN 14348	30 segundos
<b>Virucida</b>	EN 14476 Activo frente a HIV-1, BVDB (virus modelo HCV), PRV (virus modelo HBV), Rotavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Coronavirus, <i>Vaccinia virus</i> <sup>(1)</sup> , Influenza virus A (H1N1)	30 segundos

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición

### Referencia: 4909

(1) RKI: El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la indicación "begrenzt viruzid wirksan", es decir actividad virucida limitada, para interrumpir la cadena de transmisión. Según este instituto, la actividad virucida limitada corresponde a una actividad sobre el virus de la viruela y el de la BVDV.

**Fabricado por:** Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68

**Distribuido por:** Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 08185 Lliçà de Vall - Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

