


# Información sobre el producto

## Automat XR/C revelador concentrado

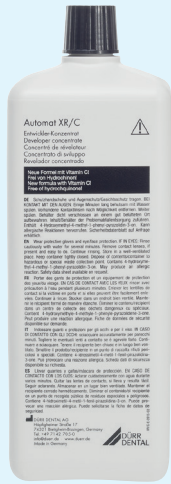

### Automat XR/C revelador concentrado - breve descripción

- Revelador concentrado de un solo componente para el revelado de películas radiográficas sensibles al verde en reveladoras automáticas de rodillos de Dürr Dental.
- Libre de hidroquinona y aldehídos.
- De fácil aplicación: llenar, diluir y listo.

### Propiedades

El revelador concentrado Automat XR/C es un revelador especial para las reveladoras de películas radiográficas XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II y XR 24 de Dürr Dental. La función del revelador Automat XR/C consiste en hacer visible en la película radiográfica la imagen latente generada por rayos X o por una luz. En este proceso se reducen los cristales de bromuro de plata expuestos a plata metálica gracias a las sustancias orgánicas del revelador, con lo que se consigue el ennegrecimiento de la película.

### Composición del producto

El revelador concentrado Automat XR/C es alcalino y contiene ácido ascórbico y dimezona S como agentes reveladores, sulfito potásico como protección contra la oxidación, y agentes complejantes, carbonatos, estabilizadores y adyuvantes en solución acuosa.

### Aplicación

El revelador concentrado Automat XR/C se ofrece como concentrado de un solo componente. La solución de trabajo se debe preparar siguiendo las instrucciones de uso. Una preparación produce 5 litros de solución de revelador lista para el uso.

### Impacto ambiental

Los baños reveladores usados deben eliminarse conforme a la normativa local vigente (código de identificación de residuos: CER 090101). El embalaje, de polietileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Enjuagar las botellas con agua para reciclarlas y utilizar para una preparación nueva.

### Datos físicos

#### Concentrado:

Aspecto: solución transparente, de color amarillento

Densidad:  $D = 1,30 \pm 0,25 \text{ g/ml (20 } ^\circ\text{C)}$

pH:  $10,7 \pm 0,5$

#### Solución de trabajo:

Aspecto: solución transparente, ligeramente amarillenta

pH:  $10,4 \pm 0,5$

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarlos en todo momento.

# Información sobre el producto

## Automat XR/C revelador concentrado

### Vida útil

Concentrado: 18 meses

### Solución de trabajo:

Al utilizar con XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II y XR 24: 4 semanas (suponiendo 10 radiografías intraorales y 3 radiografías extraorales al día sin regeneración), 3 meses (suponiendo más de 10 radiografías intraorales y 3 radiografías extraorales al día con regeneración automática).

### Presentación

Cada juego contiene:

2 botellas de 1,5 litros de revelador concentrado

2 botellas de 1,5 litros de fijador concentrado

1 botella de 120 ml de Automat XR/C Cleaner

Concentrados de un solo componente para 2 preparaciones (se obtienen 2 soluciones de trabajo de revelador de 5 litros y 2 soluciones de trabajo de fijador de 5 litros)

### Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y 25 °C.

### Accesorios

Spray limpiador WR 2000

### Advertencias de seguridad

Automat XR/C revelador concentrado se ha clasificado según el reglamento CLP y no está sujeto a la obligación de etiquetado.



### Distribuido por

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

### Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de)

# Información sobre el producto

## Automat XR/C<sup>+</sup> fijador concentrado



### Automat XR/C<sup>+</sup> fijador concentrado - breve descripción

- Fijador concentrado de un solo componente para la fijación de películas radiográficas intraorales y extraorales en reveladoras automáticas de rodillos de Dürr Dental.
- Archivado seguro según la normativa alemana sobre radiología Röntgen.
- Fácil aplicación: llenar, diluir y listo.

### Propiedades

El fijador concentrado Automat XR/C<sup>+</sup> es un fijador especial optimizado para las reveladoras de películas radiográficas XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II y XR 24 de Dürr Dental. La función del fijador Automat XR/C<sup>+</sup> consiste en eliminar de la película el bromuro de plata sin reducir. Además, el baño fijador debe garantizar un valor pH siempre constante gracias a las sustancias tampón adecuadas, incluso cuando se arrastra cierta cantidad de revelador con la película. La tercera función del fijador consiste en endurecer la capa de gelatina de la película para evitar la eliminación de la sustancia portadora.

### Composición del producto

El fijador concentrado Automat XR/C<sup>+</sup> es ligeramente ácido y contiene tiosulfato de amonio para la fijación, sulfito sódico como protección contra la oxidación, ácidos orgánicos y aditivos en solución acuosa.

### Aplicación

El fijador concentrado Automat XR/C<sup>+</sup> se ofrece como concentrado de un solo componente. La solución de trabajo se debe preparar siguiendo las instrucciones de uso. Una preparación produce 5 litros de solución de fijador lista para el uso.

### Impacto ambiental

Los baños fijadores usados deben eliminarse conforme a la normativa local vigente (código de identificación de residuos: CER 090104). El envase es de polietileno, por tanto, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Enjuagar las botellas con agua para reciclarlas y utilizar para una preparación nueva.

### Datos físicos

#### Concentrado:

Aspecto: solución transparente, incolora  
Densidad:  $D = 1,30 \pm 0,25$  g/ml (20 °C)  
pH:  $4,5 \pm 0,5$

#### Solución de trabajo:

Aspecto: solución transparente, incolora  
pH:  $4,5 \pm 0,5$

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarlos en todo momento.



# Información sobre el producto

## Automat XR/C<sup>+</sup> fijador concentrado

### Vida útil

Concentrado: 18 meses

### Solución de trabajo:

Al utilizar con XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II y XR 24: 4 semanas (suponiendo 10 radiografías intraorales y 3 radiografías extraorales al día sin regeneración), 3 meses (suponiendo más de 10 radiografías intraorales y 3 radiografías extraorales al día con regeneración automática).

### Presentación

Juego que contiene:

2 botellas de 1,5 litros de revelador concentrado

2 botellas de 1,5 litros de fijador concentrado

Concentrados de un solo componente para 2 preparaciones (se obtienen 2 soluciones de trabajo de revelador de 5 litros y 2 soluciones de trabajo de fijador de 5 litros)

### Almacenamiento

Almacenar el concentrado a una temperatura de entre 5 °C y 25 °C.

### Accesorios

Spray limpiador WR 2000

### Advertencias de seguridad

Automat XR/C<sup>+</sup> fijador concentrado se ha clasificado según el reglamento CLP y no está sujeto a la obligación de etiquetado.



### Distribuido por

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerdental.com](http://www.duerdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

### Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de)