



TRIPLO

LÁSER DE DIODO

CON MÚLTIPLES ONDAS PARA CIRUGÍA Y TERAPIA DENTAL



Wifi



Pantalla táctil



Tiempo de tratamiento



Puntas ópticas



Pedal Inalámbrico



Fibra óptica



TECNOLOGÍA LÁSER AVANZADA

El láser Triplo, combina las propiedades de la **luz láser azul, roja e infrarroja**, brindando una nueva experiencia clínica tanto a especialistas como a pacientes, ofrece una **amplia gama de aplicaciones**. Es la alternativa ideal a los métodos quirúrgicos convencionales realizados con **electrobisturí**.

- Dos modalidades de uso:
 - **Modalidad rápida:** un intuitivo menú permite el ágil y simple uso del equipo para todas las aplicaciones.
 - **Modalidad avanzada:** para cada aplicación, es posible la configuración personalizada de los parámetros del láser.
- **Unidad portátil** con pedal inalámbrico.
- Más de **30 protocolos** establecidos incorporados.
- Fibra flexible, puntas ópticas intercambiables, **accesorios versátiles y esterilizables**.
- **Diseño ergonómico** moderno que garantiza mayor comodidad.
- Pieza de mano **esterilizable en autoclave**.
- Longitud de onda: 450nm / 3W - 635nm / 200mW
980nm / 10W

MEJORES RESULTADOS

- **Tratamientos más rápidos.**
- **Tiempos de recuperación más cortos.**
- **Efecto térmico reducido.**
- **Intervenciones exangües.**
- **Menos uso de anestésicos infiltrativos.**
- **Sin puntos de sutura.**
- **Menos edema y dolor post operatorio.**
- **Amplio efecto descontaminante.**



TERAPIA



CIRUGÍA



COSMÉTICA



ENDODONCIA




PERIODONCIA



IMPLANTOLOGÍA

INTERACCIÓN DE LOS CROMÓFOROS SEGÚN LA LONGITUD DE ONDA

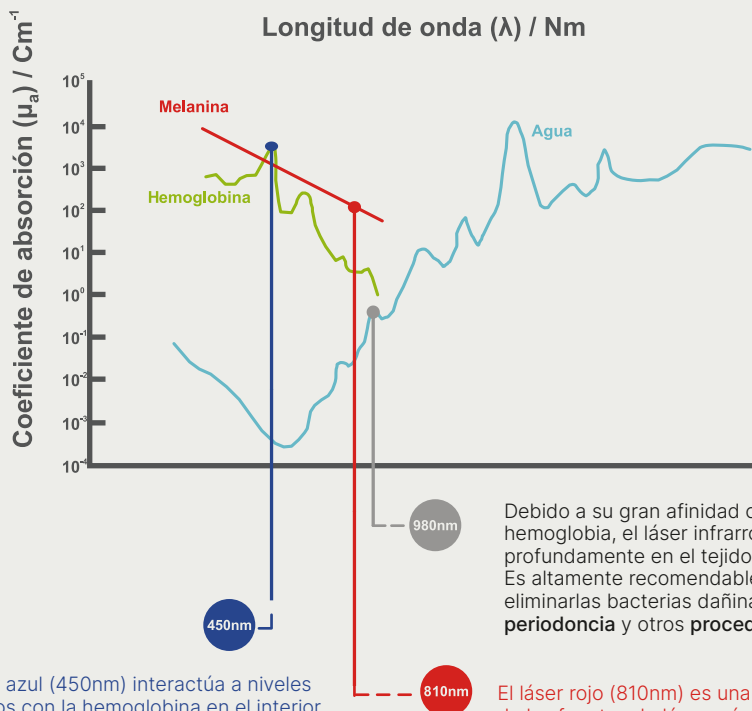

El láser azul (450nm) interactúa a niveles máximos con la hemoglobina en el interior del tejido, por lo que es muy recomendado para ofrecer **excelentes procedimientos quirúrgicos con efectos hemostáticos superiores** y menor potencia aplicada al tejido.

Debido a su gran afinidad con el agua y la hemoglobina, el láser infrarrojo (980nm) ingresa profundamente en el tejido biológico. Es altamente recomendable para disminuir y eliminar las bacterias dañinas durante la **periodoncia** y otros **procedimientos selectivos**.

El láser rojo (810nm) es una de las fuentes de láser más investigadas para **la curación del lugar** y aplicaciones **terapéuticas**. Promueve la **bioestimulación** de los tejidos y tiene una acción analgésica y antiinflamatoria.



AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



Pieza de mano para bioestimulación

- Parestesias postquirúrgicas
- Terapia ATM
- Rejuvenecimiento facial y eliminación de manchas



Pieza de mano tipo campana para ATM



Pieza de mano para bioestimulación intrabucal



Pieza de mano blanqueamiento hemiarcada



Puntas fibra óptica autoclavables

Código	LAMED0093
3 Longitudes de onda	450nm - 635nm - 980nm
Potencia	Hasta 10W
Frecuencia	Hasta 25 kHz
Modo de pulso	Continuo - Pulso múltiple
Rango de pulso	20 μ s hasta 1s
Clase médica/láser	IIB / 4
Dimensiones/Peso	205×130×50mm / 1.5kg

El láser Medency Primo es un dispositivo médico con marcado CE 0476 que cumple con la Directiva Europea CEE 93/42.

Todos los productos de Medency se fabrican en Italia.

CE **MEDENCY**
0476 TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

COMUNIDAD EDUCATIVA | ACTIVE EDUCATION

Distribuidor en España y Portugal:

Incotrading S.A.

Camino de Hormigueras, 119-121,
Pol. Ind. de Vallecas, 28031 Madrid (España)
T. (+34) 913 807 490

incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

incotrading

Tecnología para la salud

