

Monoprotect[®] Inibsa

Agujas dentales con **triple bisel**
para inyecciones de anestesia local
de **un solo uso**.



Control del dolor
Sinónimo de experiencia

Monoprotect® Inibsa

Agujas dentales con **triple bisel** para inyecciones de anestesia local de **un solo uso**.

Recubiertas con silicona para ayudar a reducir la fuerza a emplear en la penetración de la piel. El resultado es el de un confort en la inyección considerablemente mejorada.

Compatibles con jeringas dentales de rosca europea.

El punto de soldadura que une el capuchón con el protector de la aguja garantiza el mantenimiento de la esterilidad de la aguja.

Indicador de bisel.



Libres de pirógenos.
Fabricadas en la UE.

Diseñada para proteger la aguja y asegurar el mantenimiento de la esterilidad, la inviolabilidad y que la parte del capuchón protector de la longitud de penetración útil se pueda utilizar como ayuda para fijar la aguja sobre la jeringa, sin que el operador la toque.

No contienen latex.

MODO DE EMPLEO

Inserción de la aguja en la jeringa:

- 1 Romper el sello y girar y separar el capuchón.
- 2 Enroscar el cono de plástico de la aguja en la rosca de la jeringa sin extraer el protector de la aguja.
- 3 Retirar el protector de la aguja con un ligero movimiento de rotación antes de efectuar la carga de la anestesia.

Después del uso:

- 1 Desenroscar la aguja de la jeringa con mucho cuidado para evitar pincharse accidentalmente.
- 2 Desechar inmediatamente la aguja utilizada en un contenedor adecuado a las disposiciones vigentes.

REFERENCIAS

- 5285 - Monoprotect Inibsa 30 G x 21 mm (caja 100 unidades).
- 5286 - Monoprotect Inibsa 30 G x 25 mm (caja 100 unidades).
- 5282 - Monoprotect Inibsa 27 G x 36 mm (caja 100 unidades).
- 5283 - Monoprotect Inibsa 30 G x 12 mm (caja 100 unidades).
- 5284 - Monoprotect Inibsa 30 G x 16 mm (caja 100 unidades).