

normocem prime

ES

AGENTE DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE PARA IMPRIMAR CERÁMICA Y PORCELANA

NORMOCEM PRIME es un agente de imprimación **monocomponente**, eficaz y fácil de usar, para imprimir **cerámica y porcelana**.

Aislamiento

Se recomienda firmemente el uso de dique de goma durante la reparación intraoral del trabajo protésico.

Tratamiento previo de las superficies de los trabajos protésicos

Después de limpiar a fondo las áreas a imprimir, raye la superficie con una fresa de diamante (40 µm) o, si está indicado, con un chorro de arena intraoral adecuado. A continuación, enjuague con abundante agua y seque con aire exento de agua y aceite.

Si la aplicación se puede realizar de manera extraoral, la cerámica o la porcelana se pueden grabar con ácido fluorhídrico. Esto resulta en una fuerza de adherencia mejorada.

¡Precaución: el ácido fluorhídrico es muy corrosivo y tóxico! ¡Evite terminantemente cualquier contacto corporal (por ejemplo, con las manos)!

Después del grabado, enjuague con abundante agua. **Nunca** lo use por vía intraoral.

Aplicación de NORMOCEM PRIME

Deposite **NORMOCEM PRIME** en un pocillo de mezcla y aplíquelo inmediatamente en forma de capa fina con una pincel sobre la superficie preparada. Séquelo con suavidad con aire exento de aceite, hasta que la superficie deje de estar húmeda y parezca brillante. En este punto, las zonas preparadas se encuentran listas para la adherencia con resinas acrílicas. Este paso ha de efectuarse en 30 minutos.

Las resinas acrílicas adecuadas son las resinas adhesivas, los composites, composites fluidos o cementos de composite.

Nota importante:

NORMOCEM PRIME puede interferir con la adhesión a la dentina. Por tanto, al aplicar silano, utilice un cepillo fino y limite su aplicación al material restaurador. No permita que **NORMOCEM PRIME** se derrame sobre la estructura del diente adyacente.

Conservación

¡No almacenar por encima de los 25°C (77°F)! No usar después de la fecha de caducidad.

Garantía

SanaPro Dental GmbH garantiza este producto contra defectos materiales y de fábrica. SanaPro Dental GmbH no ofrece ninguna otra garantía, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para fines específicos. El usuario es responsable de determinar la idoneidad de este producto para su propio uso. Si este producto se muestra defectuoso dentro del período de garantía, su único derecho y la única obligación de SanaPro Dental GmbH será la de reparar o sustituir dicho producto.

Limitación de la Responsabilidad

Salvo en los casos en los que la ley lo prohíba, SanaPro Dental GmbH no será responsable de ninguna pérdida o daño producido por este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica bajo la que se reclame, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para uso dental.



normocem prime

PT

AGENTE DE PREPARAÇÃO MONOCOMPONENTE
PARA IMPRIMAR CERÂMICA E PORCELANA

NORMOCEM PRIME é um agente de preparação monocomponente, eficaz e fácil de usar, para imprimir cerâmica e porcelana.

Isolamento

Recomenda-se fortemente a utilização de dique de borracha durante a reparação intraoral do trabalho protésico.

Tratamento prévio das superfícies dos trabalhos protésicos

Depois de limpar a fundo as áreas a preparar, risque a superfície com uma fresa de diamante (40 µm) ou, se for indicado, com um jato de areia intraoral adequado. Em seguida, lave com água abundante e seque com ar isento de água e óleo.

Se a aplicação se puder realizar de forma extraoral, a cerâmica ou a porcelana podem gravar-se com ácido fluorídrico. Isto dá origem a uma força de aderência melhorada.

Precaução: o ácido fluorídrico é muito corrosivo e tóxico! Evite terminantemente qualquer contacto corporal (por exemplo, com as mãos)!

Depois da gravação, lave com água abundante. Nunca o use por via intraoral.

Aplicação de NORMOCEM PRIME

Deposite **NORMOCEM PRIME** num alvéolo de mistura e aplique-o imediatamente numa camada fina com um pincel sobre a superfície preparada. Seque-o suavemente com ar isento de óleo, até a superfície deixar de estar húmida e pareça brilhante. Neste ponto, as zonas preparadas estão prontas para a aderência com resinas acrílicas. Este passo deve efetuar-se em 30 minutos.

As resinas acrílicas adequadas são as resinas adesivas, os compósitos, compósitos fluidos ou cimentos de compósito.

Nota importante:

NORMOCEM PRIME pode interferir com a aderência à dentina. Portanto, ao aplicar silano, utilize uma escova fina e limite a sua aplicação ao material restaurador. Não permita que **NORMOCEM PRIME** se derrame sobre a estrutura do dente adjacente.

Conservação

Não armazenar acima dos 25 °C (77 °F)! Não utilizar depois da data de validade.

Garantia

A SanaPro Dental GmbH garante este produto contra defeitos materiais e de fábrica. A SanaPro Dental GmbH não oferece qualquer outra garantia, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou idoneidade para fins específicos. O utilizador é responsável por determinar a idoneidade deste produto para a sua própria utilização. Se este produto apresentar defeitos dentro do período de garantia, o seu único direito e a única obrigação da SanaPro Dental GmbH será a de reparar ou substituir o produto referido.

Limitação da Responsabilidade

Exceto nos casos em que a lei o proíba, a SanaPro Dental GmbH não será responsável por qualquer perda ou dano produzido por este produto, quer seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente, independentemente da teoria jurídica sob a qual se reclame, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Manter fora do alcance das crianças.

Apenas para uso dentário.

Distribuído por:

LABORATÓRIOS NORMON, S.A.
Av. Infante D. Henrique, 333H
Piso 3, Esc. 42
1800 – 282 Lisboa (PORTUGAL)



Fabricante:
SanaPro Dental GmbH,
27570 Bremerhaven, Alemanha



NORMON
DENTAL