

CEMENTO PROVISIONAL SIN EUGENOL PARA CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES

NORMOCEM TEMP (AUTOMIX) es un cemento de automezclado, sin eugenol, para coronas y puentes provisionales, adecuado para el cementado de coronas y puentes provisionales, así como para el cementado de prueba de restauraciones permanentes. Presenta una excelente capacidad de adhesión a los materiales de coronas y puentes provisionales, pero puede retirarse fácilmente de los muñones dentales preparados. NORMOCEM TEMP se presenta en cartuchos de AUTOMEZCLADO, por lo que es muy fácil y cómodo de usar. Gracias a su fórmula sin eugenol, no influye en el fraguado de materiales de relleno y materiales de cementado a base de resina. El cemento para coronas y puentes provisionales se basa en ZnO/ácidos orgánicos. Se recomienda usar este tipo de cemento sin eugenol especialmente en casos de alergia al eugenol.

NORMOCEM TEMP cumple los requisitos establecidos en las normas DIN EN ISO 3107 y ADA/ANSI Especificación Nº. 30.

Aplicación

Pistola de aplicación y cartucho

Cargue la pistola de aplicación con émbolo 1:1 y retire y deseche la tapa de cierre. ¡No reutilice la tapa! Instale la cánula de mezclado en el cartucho y extruya el material necesario. Después de cada uso, deje la cánula mezcladora usada en su lugar para sellar el cartucho.

Nota:

La extrusión inicial de la cánula de mezclado (de, aproximadamente, el tamaño de un guisante) debe desecharse. Entonces, la siguiente mezcla resultará adecuada. Repita este paso con cada nueva mezcla.

Cementado

NORMOCEM TEMP se puede aplicar directamente en la corona y puente provisionales a partir de la cánula de mezclado, ejerciendo una ligera presión.

Aplique una fina capa en el interior de la corona o puente provisional y ajústelo en un tiempo inferior a 1 minuto (tiempo de trabajo), con precaución, pero con firmeza, sobre las estructuras dentales preparadas.

Nota:

No seque los muñones, es mejor humedecerlos con un poco de agua. De hecho, un medio húmedo (muñones húmedos, en este caso) facilitará la retirada de la corona o puente provisional más adelante.

NORMOCEM TEMP fragua en la boca en 2 o 3 minutos. Una vez NORMOCEM TEMP haya fraguado, elimine cualquier exceso.

Precauciones

- No utilice NORMOCEM TEMP en caso de alergia conocida a cualquiera de los componentes.
- No utilice NORMOCEM TEMP en casos en los que puedan existir alergias de contacto individuales.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico, si lo estima necesario.
- En caso de ingestión, consulte a un médico.

Conservación

Conservar a 8 – 25 °C (47 - 77 °F). No usar después de la fecha de caducidad.

Garantía

SanaPro Dental GmbH garantiza este producto contra defectos materiales y de fábrica. SanaPro Dental GmbH no ofrece ninguna otra garantía, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para fines específicos. El usuario es responsable de determinar la idoneidad de este producto para su propio uso. Si este producto se muestra defectuoso dentro del período de garantía, su único derecho y la única obligación de SanaPro Dental GmbH será la de reparar o sustituir dicho producto.

Limitación de la Responsabilidad

Salvo en los casos en los que la ley lo prohíba, SanaPro Dental GmbH no será responsable de ninguna pérdida o daño producido por este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica bajo la que se reclame, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para uso dental.

CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL PARA COROAS E PONTES PROVISÓRIAS

NORMOCEM TEMP (AUTOMIX) é um cimento de automistura, sem eugenol, para coroas e pontes provisórias, adequado para a cimentação de coroas e pontes provisórias, bem como para a cimentação de teste de restaurações permanentes. Apresenta uma excelente capacidade de aderência aos materiais de coroas e pontes provisórias, mas pode retirar-se facilmente dos cotos dentários preparados.

NORMOCEM TEMP apresenta-se em cartuchos de AUTOMISTURA, pelo que é muito fácil e cómodo de usar. Graças à sua fórmula sem eugenol, não influencia o endurecimento de materiais de carga e materiais de cimentação à base de resina. A cimentação para coroas e pontes provisórias baseia-se em ZnO/ácidos orgânicos. Recomenda-se usar este tipo de cimento sem eugenol especialmente em casos de alergia ao eugenol.

NORMOCEM TEMP cumpre os requisitos estabelecidos nas normas DIN EN ISO 3107 e ADA/ANSI Especificação N.º 30.

Aplicação

Pistola de aplicação e cartucho

Carregue a pistola de aplicação com êmbolo 1:1 e retire e elimine a tampa de fecho. **Não reutilize a tampa!** Instale a cânula de mistura no cartucho e extraia o material necessário. Depois de cada utilização, deixe a cânula misturadora usada no seu lugar para selar o cartucho.

Nota:

A extrusão inicial da cânula de mistura (de, aproximadamente, o tamanho de uma ervilha) deve eliminar-se. Então, a mistura seguinte será adequada. Repita este passo com cada nova mistura.

Cimentação

NORMOCEM TEMP pode aplicar-se diretamente na coroa e ponte provisória a partir da cânula de mistura, exercendo uma ligeira pressão.

Aplique uma fina camada no interior da coroa ou ponte provisória e ajuste-o em menos de **1 minuto** (tempo de trabalho), com precaução, mas com firmeza, sobre as estruturas dentárias preparadas.

Nota:

Não seque os cotos. É melhor humedecê-los com um pouco de água. De facto, um meio húmido (cotos húmidos, neste caso) facilitará a remoção da coroa ou ponte provisória mais tarde.

NORMOCEM TEMP endurece na boca em **2 ou 3 minutos**. Depois de **NORMOCEM TEMP** endurecer, elimine qualquer excesso.

Precauções

- Não utilize **NORMOCEM TEMP** em caso de alergia conhecida a qualquer um dos componentes.
- Não utilize **NORMOCEM TEMP** nos casos em que possam existir alergias de contacto individuais.
- Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico, se considerar necessário.
- Em caso de ingestão, consulte um médico.

Conservação

Conservar a 8 – 25 °C (47 - 77 °F). Não utilizar depois da data de validade.

Garantia

A SanaPro Dental GmbH garante este produto contra defeitos materiais e de fábrica. A SanaPro Dental GmbH não oferece qualquer outra garantia, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou idoneidade para fins específicos. O utilizador é responsável por determinar a idoneidade deste produto para a sua própria utilização. Se este produto apresentar defeitos dentro do período de garantia, o seu único direito e a única obrigação da SanaPro Dental GmbH será a de reparar ou substituir o produto referido.

Limitação da Responsabilidade

Exceto nos casos em que a lei o proíba, a SanaPro Dental GmbH não será responsável por qualquer perda ou dano produzido por este produto, quer seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente, independentemente da teoria jurídica sob a qual se reclame, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.


Manter fora do alcance das crianças.

Apenas para uso dentário.

Distribuído por:

LABORATÓRIOS NORMON, S.A.
Av. Infante D. Henrique, 333H
Piso 3, Esc. 42
1800 – 282 Lisboa (PORTUGAL)

Fabricante:

 SanaPro Dental GmbH,
27570 Bremerhaven, Alemanha

8°C  25°C  0482



NORMON
DENTAL