


INSTRUCCIONES MAQUINA DE ADAPTACIONES TERMOPLASTICAS YU JIN JT-18

Esta máquina ha sido diseñada para adaptar termoplásticos a modelos de escayola, admite varios tipos de placas, blandas o duras y de diferentes grosores. Es adecuada para adaptar placas de no más de 2mm sobre modelos de escayola no muy altos. Para placas más gruesas o modelos altos, los resultados obtenidos pueden ser no muy ajustados. Si desea un aparato más potente existe The Machine Dentaflux, que es el modelo superior.

Componentes:

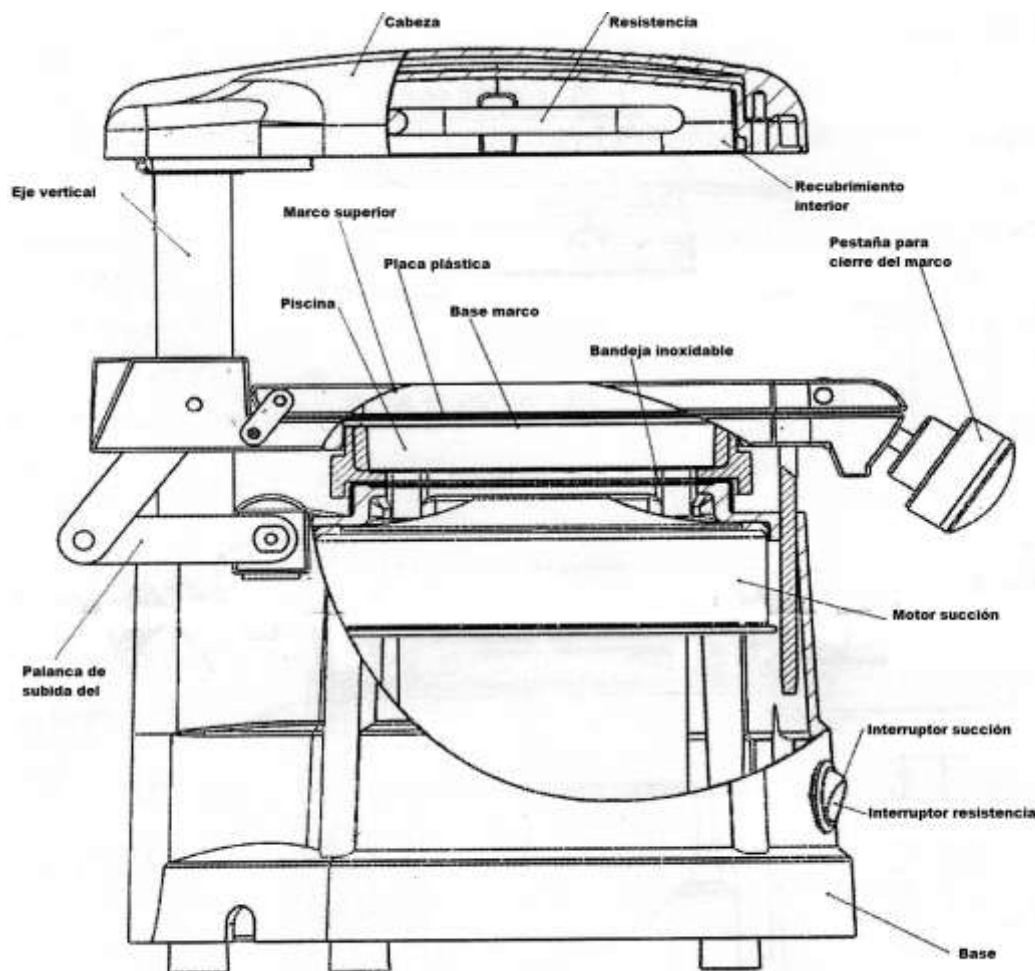

Instrucciones de funcionamiento:

1. Enchufar a la red eléctrica de 220 V 50 Hz. Compruebe el funcionamiento de la resistencia y del motor de aspiración.
2. Gire la cabeza 90°, desde el lado derecho o izquierdo, coloque una placa de plástico en el marco y cierre éste con la pestaña.
3. Gire de nuevo la cabeza para colocarla sobre el plástico y baje la palanca roja para elevar el marco a la posición de calentamiento. Este quedará sujeto, ya que se encaja en una muesca en el eje vertical.
4. Coloque el modelo centrado en la plataforma y conecte la resistencia con su interruptor.
5. Apague la resistencia unos 2-3 minutos después de conectarla, cuando la placa plástica se haya abombado más de 1cm bajo el marco.

6. Suba la palanca roja para que baje el marco sobre el modelo de escayola y encienda el motor de succion.
7. Retire la adaptación tras dejarlo un tiempo succionando
8. Uso de la piscina de bolas: coloque el marco – piscina de bolas. Entierre el modelo de escayola en las bolas metálicas para cubrir las zonas retentivas. Proceda a la adaptación del modo habitual



No. 2009-C158-8-LVD

CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
No.45 Wen Ming Dong Road
Longquanyi Chengdu Sichuan P.R. China
www.cepresc.org

DECLARATION OF CONFORMITY

CE DECLARATION OF CONFORMITY is hereby responsibility of the Name Grantee/
Responsible Party and issued to certify the following equipment:

Client	YUYAO JINTAI MACHINE FACTORY
Address	148# Xijiang, Mingwei, Yuyao, Zhejiang, China
Manufacturer	YUYAO JINTAI MACHINE FACTORY
Address	148# Xijiang, Mingwei, Yuyao, Zhejiang, China
Product	VACUUM FORMER
Model	JT-18
Trademark	 JIN TAI
Date of issue	July. 17, 2009

Complies with the requirement set out the Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)

Test standards EN 60204-1:2006

This DOC is only valid in connection with the test report below:

Report number SCC(09) -384-8-10-LVD

Signature: _____

Heis



Title: Engineer manager