

El salvavidas después de un paro cardiaco:



**Cardio  
First  
Angel**

– POSICIÓN CORRECTA – FRECUENCIA CORRECTA – PRESIÓN CORRECTA –



## ¡EN CASO DE PARADA CARDÍACA, CADA SEGUNDO CUENTA!

Si el corazón deja de latir, también se deja de suministrar oxígeno al cerebro y se producen daños irreparables, a menos que se haga un masaje cardíaco con la presión adecuada al paciente de inmediato. No obstante, hasta que llega el médico de urgencias, a menudo pasan unos minutos valiosísimos durante los cuales no se llevan a cabo intentos de reanimación o se realizan de manera incorrecta. En esta situación de emergencia, el miedo por cometer errores o la falta de conocimientos en primeros auxilios puede ser resuelto gracias al Cardio First Angel.

Pues para eso llega **Cardio First Angel**. Con él, incluso una persona inexperta puede llevar a cabo un masaje cardíaco de manera rápida y eficiente, sin riesgo alguno de cometer errores con consecuencias graves.

Muchas personas encargadas de los primeros auxilios no encuentran el punto adecuado para realizar un masaje cardíaco si no cuentan con ayuda. Sin embargo, con el **Cardio First Angel** se lleva a cabo el masaje fácilmente donde más efectivo resulta gracias a su ayuda para el posiciona-

miento. El dispositivo se coloca en el centro del pecho y un dibujo en el pulsador muestra cómo hay colocarlo y poner las manos. Pero, ¿cuánto hay que presionar? El **Cardio First Angel** aporta seguridad también en eso. Cuando se aplica la fuerza suficiente, se oye el fuerte „clic“ de un muelle especial, y también se siente. Si a continuación se deja de presionar, guardando las manos en el pulsador, otro „clic“ indica la decompresión es correcta y que hay que ejercer presión de nuevo hasta el clic. El cambio entre los dos sonidos „clic“ ayuda a la persona ejecutando el masaje a determinar de forma exacta el ritmo correcto.

Así, con el **Cardio First Angel**, el „ángel“ en los primeros minutos, los primeros minutos se utilizan de manera eficiente hasta la llegada del médico de urgencias. Pues solo en Europa se producen al año unos 700.000 infartos de miocardio; en todo el mundo se llega a 30 millones. Si el **Cardio First Angel** estuviera disponible siempre en el plazo de entre uno y tres minutos, se podrían salvar numerosas vidas humanas y proteger a muchas personas de daños a largo plazo.



## ¿POR QUÉ ESPERAR MÁS?




## ¡CADA VIDA CUENTA!



# ¿QUÉ HACER EN CASO DE PARADA CARDÍACA?

## Comportamiento con el Cardio First Angel

- » Llamar al número de emergencias 112 o al número correspondiente del país.
- » Utilice el Cardio First Angel (CFA) de inmediato en el plazo de tres minutos.
- » Coloque el CFA en el centro del esternón (véase el dibujo en el pulsador) para encontrar automáticamente la posición correcta con la base de gomaespuma.
- » Empiece con el masaje cardiaco de inmediato. El CFA hace „clic“ al alcanzar la intensidad de la presión correcta y „clac“ al relajarla.
- » Orientándose a la secuencia „clic-clac“ se consigue una frecuencia adecuada de 100-120 compresiones por minuto.
- » Siguiendo estos pasos se consigue un masaje eficaz de la persona.
- » Continúe con el tratamiento hasta que llegue el médico de urgencias y se encargue del paciente.

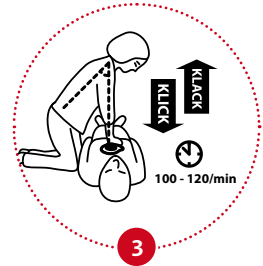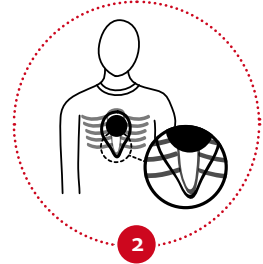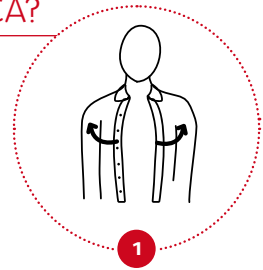

# EL CARDIO FIRST ANGEL DEBE ACOMPAÑARLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE SU VIDA

## PARA QUE PUEDA AYUDAR O LE PUEDAN AYUDAR A USTED.

El manejo sencillo y las instrucciones estam-  
padas de fácil comprensión del Cardio First  
Angel garantizan un masaje cardiaco efectivo  
que salva vidas y que puede llevar a cabo  
también una persona inexperta sin conoci-  
mientos previos de ningún tipo.

Gracias a los sonidos "clic – clac" del Cardio  
First Angel, la persona encargada de los  
primeros auxilios tiene automáticamente  
la seguridad de que está haciéndolo todo  
bien, y las inhibiciones a la hora de ayudar se  
reducen en un 90%.

(según la encuesta de un estudio  
de la LMU de Múnich del 12 al 13 de agosto de 2013)



### PROF. DR. CHRISTIAN HAGL

Director de la Clínica de Cirugía Cardiaca y del Policlínico  
en el Hospital Universitario de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich/Großhadern

En nuestra página web podrá ver un breve vídeo explicativo del Prof. Dr. Christian Hagl.



CARDIO FIRST ANGEL INTERNATIONAL GROUP | URSULASTR. 1 | 80802 MÜNCHEN  
INFO@CARDIOFIRSTANGEL.COM | WWW.CARDIOFIRSTANGEL.COM

FABRICANTE: INOTECH KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH | BOSCHSTR. 3 | 92507 NABBURG  
INFO@INOTECH.DE | WWW.INOTECH.DE