



Manuale di istruzioni  
Instruction manual  
Manuel d'instruction  
Manual de uso

V.8.02

## CARRELLO SERVITORE 3 RIPIANI



DE1005X



## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Tecnomed Italia.

Tecnomed Italia s.r.l. ha realizzato il presente libretto con l'intento di supportare l'utilizzatore nell'uso dell'apparecchiatura e con l'obiettivo di facilitare la messa in funzione e l'impiego dell'apparecchiatura. Per danni derivanti dall'uso improprio nonché alterazioni dell'apparecchio stesso Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità. Ogni apparecchiatura viene fornita di una copia del presente libretto e l'osservanza delle istruzioni contenute in questa documentazione tecnica sono condizioni necessarie per la garanzia di un perfetto funzionamento. E' assolutamente da evitare l'uso dell'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati nelle istruzioni d'uso e depliant. Non attenendosi alle norme contenute nella presente documentazione tecnica si determina la cessazione immediata della garanzia. Per qualsiasi richiesta indicare sempre la data di acquisto, il modello dell'apparecchiatura ed il numero di matricola.

## CARATTERISTICHE

Carrello in acciaio inox AISI304 dotato di 3 ripiani con dimensioni 1000 mm x 500 mm e portata 180 Kg. Il carrello ha dimensioni totali: L 1090 mm x P 590 mm x H 960 mm.

I ripiani, in acciaio inox 18/10 finemente satinato, sono stampati a forma di vassoio con invasi perfettamente arrotondati.

Massima garanzia di igiene.

Telaio portante in tubo di acciaio inox 18/10 di diametro 25 mm lucidato a specchio.

Quattro ruote piroettanti in gomma di diametro 120 mm, di cui 2 frenanti e 2 senza freno. Con adesivo antirombo per limitare i rumori.

I quattro paracolpi sono di serie.

Doppia ribordatura perimetrale dei ripiani con conseguente irrigidimento di tutta la struttura.

Squadre di rinforzo angolari in acciaio inox 18/10 a forte spessore.

Insonorizzazione con materiale fonoassorbente.

Massima silenziosità di marcia.

Le caratteristiche costruttive di questi carrelli ne fanno uno strumento di lavoro indispensabile per qualsiasi problema di movimentazione.

Molto indicati per servizi ospedalieri.



| Dimensioni                |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni esterne        | L 1090 mm x P 590 mm x H 960 mm |
| Dati tecnici              |                                 |
| Dimensione ripiani        | 1000 mm x 500 mm                |
| Portata carrello          | 180 Kg                          |
| Numero ripiani carrello   | 3                               |
| Distanza ripiani carrello | 26 cm                           |
| Dotazione di serie        |                                 |
| Dotazione di serie        | 4 ruote multidirezionali        |
| Informazioni generali     |                                 |
| Tipologia carrello        | Carrello multiuso               |
| Materiale carrello        | struttura in acciaio inox       |

## MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione disconnettere l'alimentazione

Per garantire l'efficienza del dispositivo regolare di tanto in tanto i dadi di frizione degli snodi e lubrificare i perni di snodo con olio di vasellina.



Consigliamo di pulire l'apparecchio e le attrezzature dopo ogni utilizzo.

## PULIZIA E DISINFEZIONE



Consigliamo l'utilizzo di:

### GREEN & CLEAN RD N



Concentrato per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici. Ottima tollerabilità da parte dei materiali. Adatto anche per vetro acrilico e plexiglass. Con 5 litri di concentrato, diluiti allo 0,25%, si ottengono 2000 l di soluzione. Privo di aldeidi. Inseriti nella lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario e alchilamina. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: soluzione allo 0,25%: 60 minuti - soluzione al 0,5%: 30 minuti / Battericida - fungicida: soluzione allo 0,25%: 4 ore - soluzione al 0,5%: 1 ora - soluzione al 1,5%: 30 minuti - soluzione al 2%: 15 minuti / Tuberculocida: soluzione al 2%: 30 minuti - soluzione al 4%: 15 minuti. Codice 60030023: 4 flaconi da 500


ml + dosatore (RD N START).

### GREEN & CLEAN WD



Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo per la disinfezione esterna delle piccole superfici e attrezzature. Chiusura sigillata. L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculocida: 5 minuti. Codice 60030018: dispenser con 120 salviette (WD START).

# MONTAGGIO

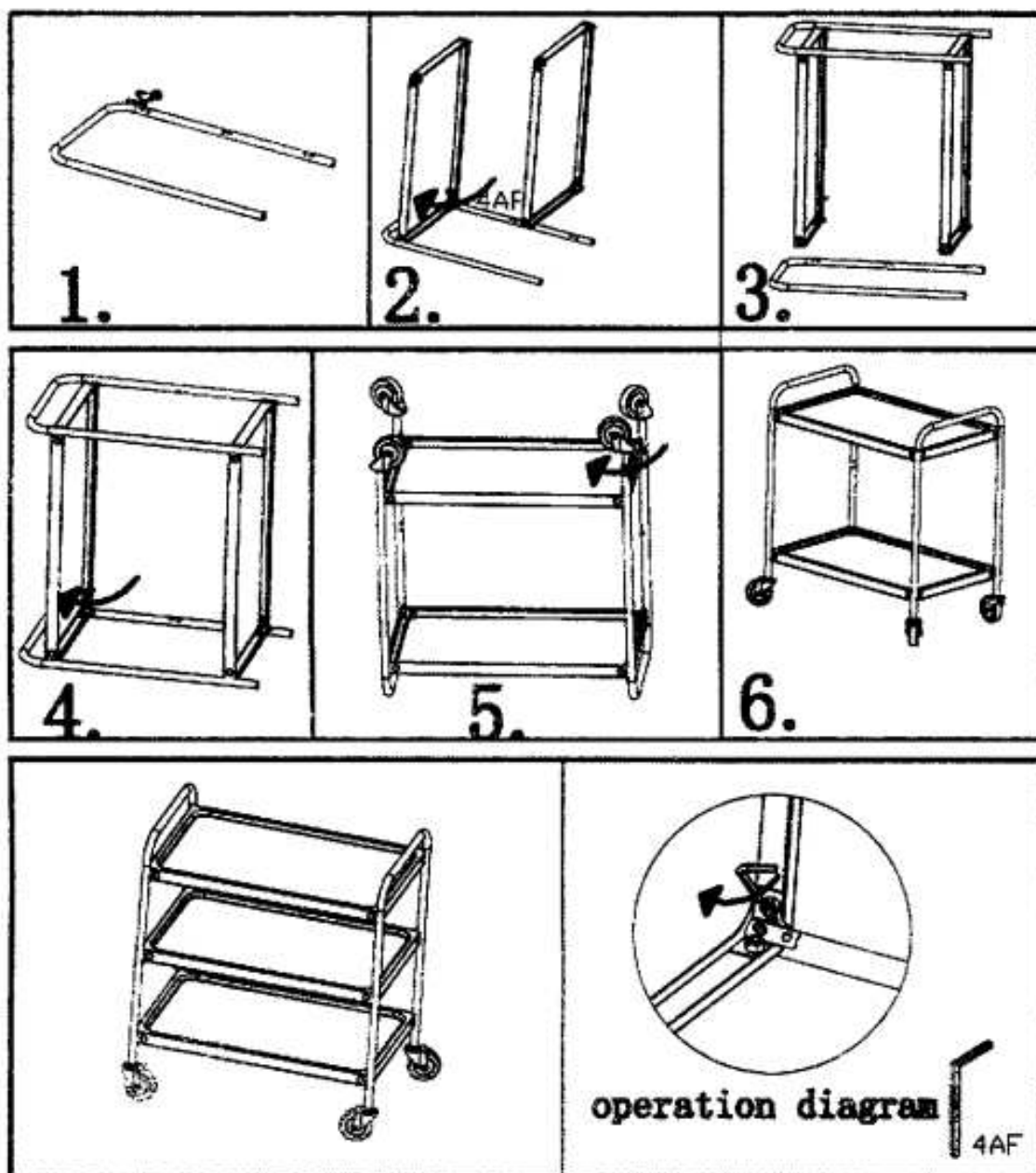

1. Estrarre la vite in senso antiorario

2. Montaggio del tavolo per sequenza

3. Installare il lato del carrello e girare il carrello

4. Installare anche il lato opposto

5. Montare le ruote in senso orario

6. Finito

## Note

L'operazione è la stessa per tutti i livelli.

## TERMINI DI GARANZIA

Con il presente documento il fabbricante certifica che la corretta costruzione del prodotto è avvenuta nel pieno rispetto delle discipline nazionali e comunitarie di riferimento. Il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di 36 mesi. Il soggetto che intende far valere la garanzia deve dare comunicazione del guasto, ai sensi dell'art. 1495 c.c., entro 8 giorni dalla scoperta. Sono escluse dalla garanzia le spese di manodopera, di trasferta del personale tecnico, di trasporto e parti soggette a normale usura. Sono escluse dalla garanzia le spese di manodopera, di trasferta del personale tecnico, di trasporto e parti soggette a normale usura. Si raccomanda di disconnettere l'alimentazione pneumatica, idrica ed elettrica a fine giornata (se presente). Tecnomed Italia srl non copre i danni causati dall'inadempienza di tali operazioni.

La Garanzia, inoltre, decade se:

- l'apparecchiatura presenta danneggiamenti provocati da caduta, da esposizione a fiamme, da rovesciamenti di liquidi, da fulmini, da calamità naturali, da errori di manutenzione, da cattive fonti di alimentazione elettrica, idraulica o pneumatica, da cause non imputabili a difetti di fabbricazione;
- non vi è stata corretta installazione;
- l'installazione non è stata eseguita da un tecnico autorizzato;
- vi è errato collegamento all'alimentazione o non sono stati installati gli adeguati dispositivi di protezione;
- Il numero di matricola/serie o marcatura CE risultano asportati, cancellati od alterati.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovuti all'eventuale inefficienza dell'apparecchiatura. Per gli interventi in garanzia l'acquirente dovrà rivolgersi al rivenditore, ai centri d'assistenza autorizzati o a Tecnomed Italia. La Garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita della parte difettosa. È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell'intero apparecchio. In caso di guasto irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine si provvederà, ad insindacabile giudizio della casa costruttrice, alla sostituzione dell'apparecchio. La garanzia sul nuovo prodotto continuerà fino al termine del contratto originario. Nel caso di contestazione sull'applicazione della garanzia, sulla qualità o sulle condizioni delle apparecchiature consegnate, l'acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento del prezzo per intero o a rate.

Nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'acquirente per fermo delle apparecchiature. Qualora il pezzo da cambiare non venga restituito, verrà addebitato all'ordinante. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Pesaro.

## SMALTIMENTO

Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa di un errato

trattamento del prodotto giunto a fine vita. Il simbolo  sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento dovrà essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, per favore contattare il Dipartimento Ecologia e Ambiente, il vostro servizio di raccolta di rifiuti a domicilio, o il vostro distributore di apparecchiature dentali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data: 10/01/2019

Oggetto: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Nome del fabbricante: TECNOMED ITALIA SRL

Tipo/modello: DE1005X

Classe: I

Designazione del prodotto: CARRELLO SERVITORE INOX 3 RIPIANI

Io sottoscritto amministratore della TECNOMED ITALIA SRL dichiaro che i prodotti sopradescritti sono del tutto conformi ai requisiti della direttiva 93/42 EEC (Dispositivi Medicali). La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura:



TECNOMED ITALIA SRL

Luca Riccardi  
Amministratore

## Garanzia-Guarantee-Garantie-Garantía

36

Mesi-Months-Mois-Meses

Nome-Name-Nom-Nombre

Cognome-Surname-Prenom-Apellido

Indirizzo-Address-Adresse-Dirección

Codice-Code-Code-Código

SN

Timbro del rivenditore-Dealer's stamp  
Cachet d'achat-Sello del revendedor

Data d'acquisto-Purchase date  
Date d'achat-Fecha de compra

Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvechio di Monte Porzio (PU) Italy  
Phone +39 0721 95 51 25 Fax +39 0721 95 52 29 - [www.dentalastec.it](http://www.dentalastec.it)

